

Accueil Formation Cueillette CPU

Sécurité

Présentation

Fonctionnement

Changement consommable

Entretien

Initialisation machine


Gestion machine

SOMMAIRE


- **Sécurité :**
 - 03.A - Sécurité
- **Présentation :**
 - 03.B - Présentation module de cueillette CPU
 - 03.C - Descriptif de l'interface de cueillette CPU
 - 03.D - Préparation d'une cueillette CPU à la prise de poste
- **Fonctionnement :**
 - 03.E - Cycle cueillette en DN* et validation
 - 03.F - Cycle cueillette en sache de regroupement  Disponible uniquement avec L'option sache de regroupement
 - 03.G - Cycle cueillette en sortie globale et validation
 - 03.H - Cycle de retour produits
 - 03.I - Cycle de transfert
 - 03.J - Cycle de nuit
- **Changement consommable :**
 - 03.K - Ticket imprimante  Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.
- **Entretien :**
 - 03.L - Entretien du module
- **Initialisation machine :**
 - 03.M - Comprendre et lancer le cycle d'initialisation
- **Gestion machine :**
 - 03.N - Comprendre et débloquer les boites bloquées
 - 03.O - Comprendre et créer les taquins
 - 03.P - Gestion des boites de rejet
 - 03.Q - Gestion des périmés

*DN = Dispensation nominative.


Sécurité d'une cueillette CPU

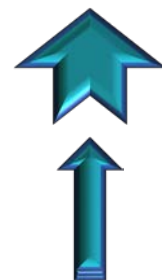

03.A – Sécurité

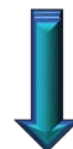

Sécurité

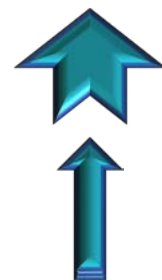

Conseils de sécurité



Respecter scrupuleusement ces conseils de sécurité afin d'éviter tout risque et dommage pour les personnes et les biens.




Avant toute opération sur la machine, la documentation doit avoir été lue et comprise.

Travaux sur l'appareil

L'entretien et les réparations devront être impérativement effectuées par du personnel qualifié, habilité et certifié par la société ECO-DEX.



Sécurité

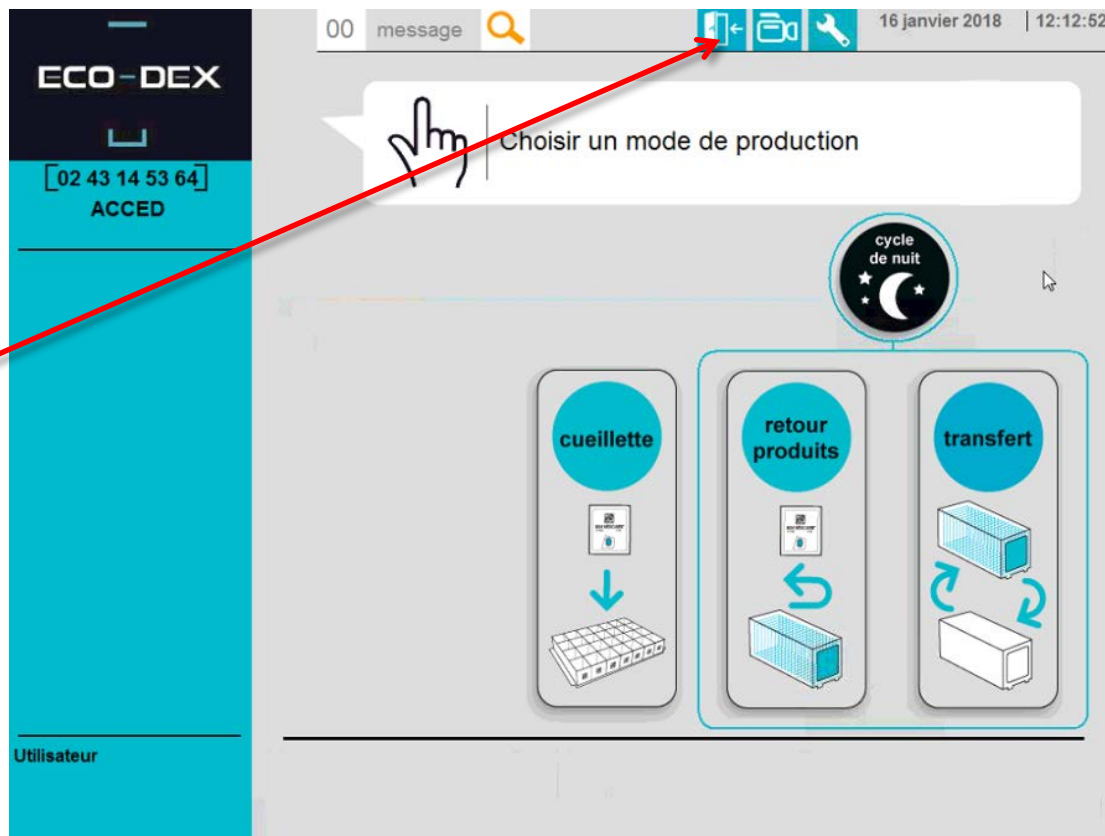

Pour entrer dans le module de cueillette, faire une demande d'accès.

Sécurité



⚠ *Il est strictement interdit de démonter les éléments de sécurité.*


⚠ *Toujours vérifier que la lumière soit allumée dans le module, avant d'entrer.*



Entrer




Présentation d'une cueillette CPU

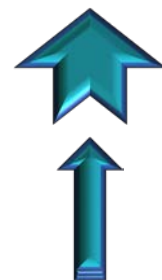

Présentation module de cueillette

Descriptif de l'interface de cueillette


Préparation du module de cueillette à la
prise de poste

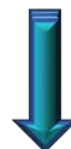

Présentation d'une cueillette CPU



03.B - Présentation module de cueillette CPU

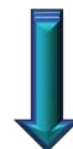


Présentation d'une cueillette CPU




A quoi sert le module ?

- Au stockage des doses unitaires de produits en boites PASS.
- A la dispensation individuelle nominative en pilulier.
- A la réintroduction des retours produits des services.
- A la sortie de boites PASS pour des demandes globales.

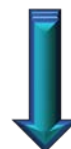

Présentation d'une cueillette CPU

Comment se présente-t-il ?

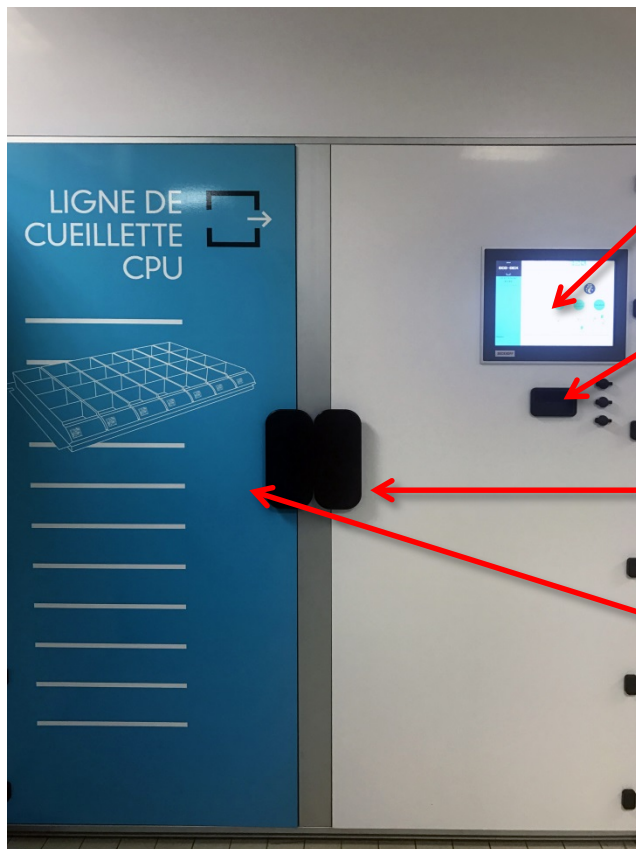


- Un écran tactile de contrôle.
- Un lecteur optique pour s'identifier et pour scanner les piluliers.
- Une porte d'accès à l'intérieur du module de cueillette CPU.
- Une porte d'accès au CPU.


Présentation d'une cueillette CPU

Comment se présente-t-il ? (suite)

- Zone CPU.

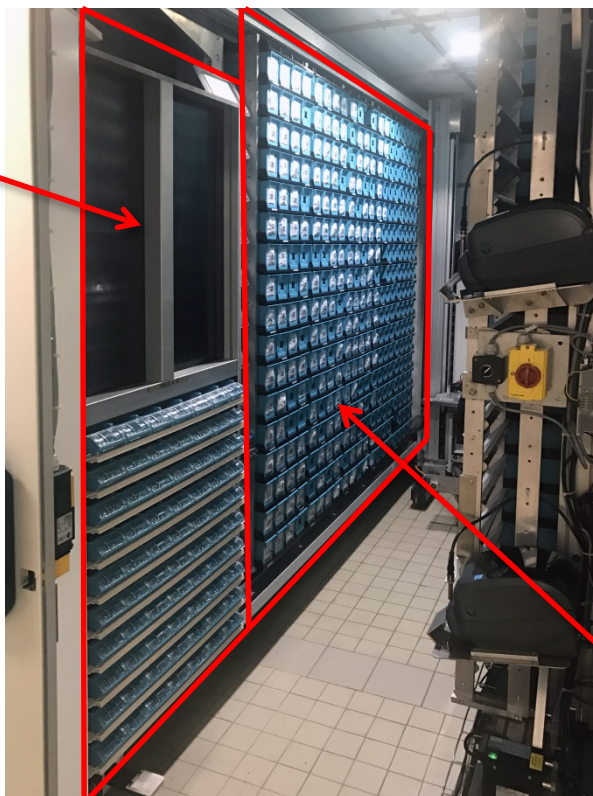


- La navette.

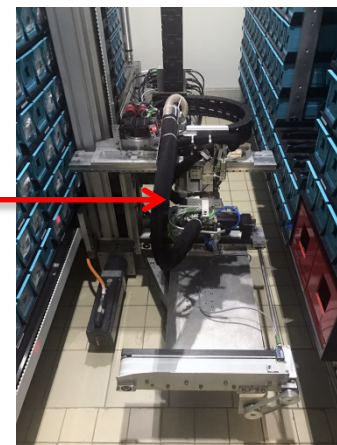

- Zone de stock.

Présentation d'une cueillette CPU

Comment se présente-t-il ? (suite)

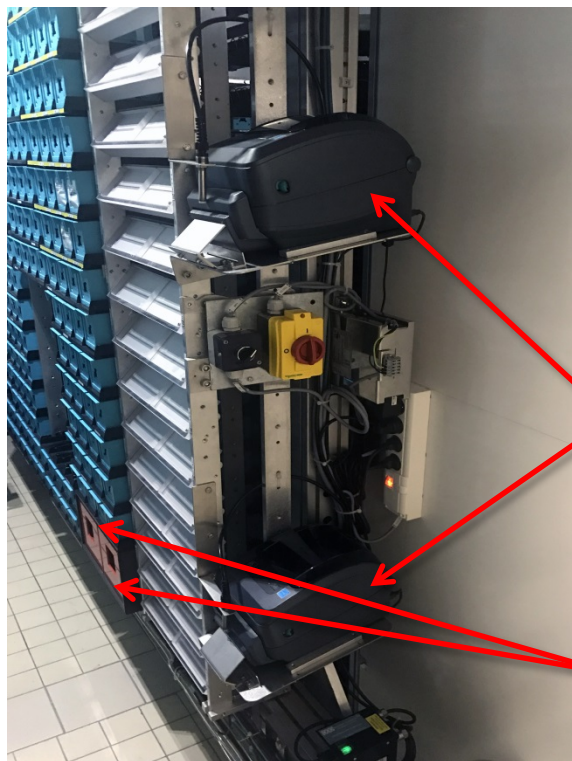

- La zone retour.
(l'emplacement peut changer suivant les modèles)
- Les imprimantes.
(les imprimantes peuvent ne pas être présentes, suivant les options)
- Les boîtes de rejet.



Présentation d'une cueillette CPU

Comment se présente-t-il ? (suite)




- Le CPU depuis l'intérieur.



- Le CPU depuis l'extérieur.

Présentation d'une cueillette CPU

Comment se présente-t-il ? (option)

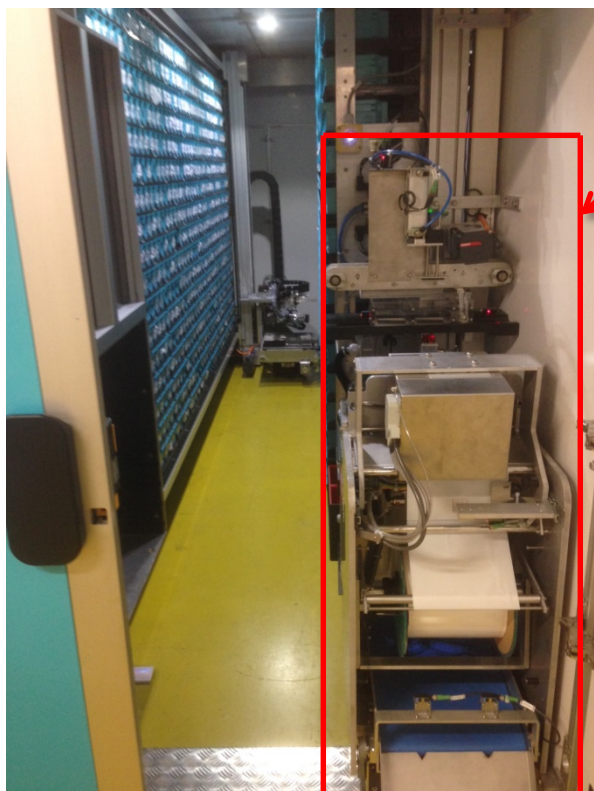

- L'option sache de regroupement dote la cueillette d'une ensacheuse.

- Sache de regroupement.



Présentation d'une cueillette CPU




Comment l'utiliser ?

L'utilisateur choisi le mode de production :

- Sorties unitaires.
- Sorties globales.
- Retours produits.
- Cycle de transfert du stock tampon vers la ligne de cueillette.


Les différentes actions sont possibles depuis l'écran tactile.

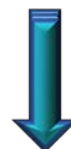

Présentation d'une cueillette CPU

Cycle de cueillette :

- L'utilisateur entre les premiers plateaux en commençant par une ouverture porte CPU.
- L'utilisateur sélectionne le ou les service(s) à lancer.
- A ce moment la navette vient chercher le peigne avec les piluliers.
- L'automate scanne les piluliers et leur attribue une ordonnance.
- La navette va chercher les produits dans le stock.
- Puis elle ramène les piluliers en fin de cueillette.

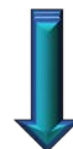

Présentation d'une cueillette CPU

Cycle de cueillette : (suite)



- L'automate demande alors à l'opérateur de s'identifier.
- L'opérateur scanne son badge ou saisit son code.
- A ce moment la porte CPU se déverrouille.
- Et l'opérateur doit récupérer ses plateaux.



Présentation d'une cueillette CPU



03.C – Descriptif de l'interface de cueillette CPU






Descriptif de l'interface de cueillette CPU


Logo entreprise

Type de machine et N° S.A.V.

Utilisateur

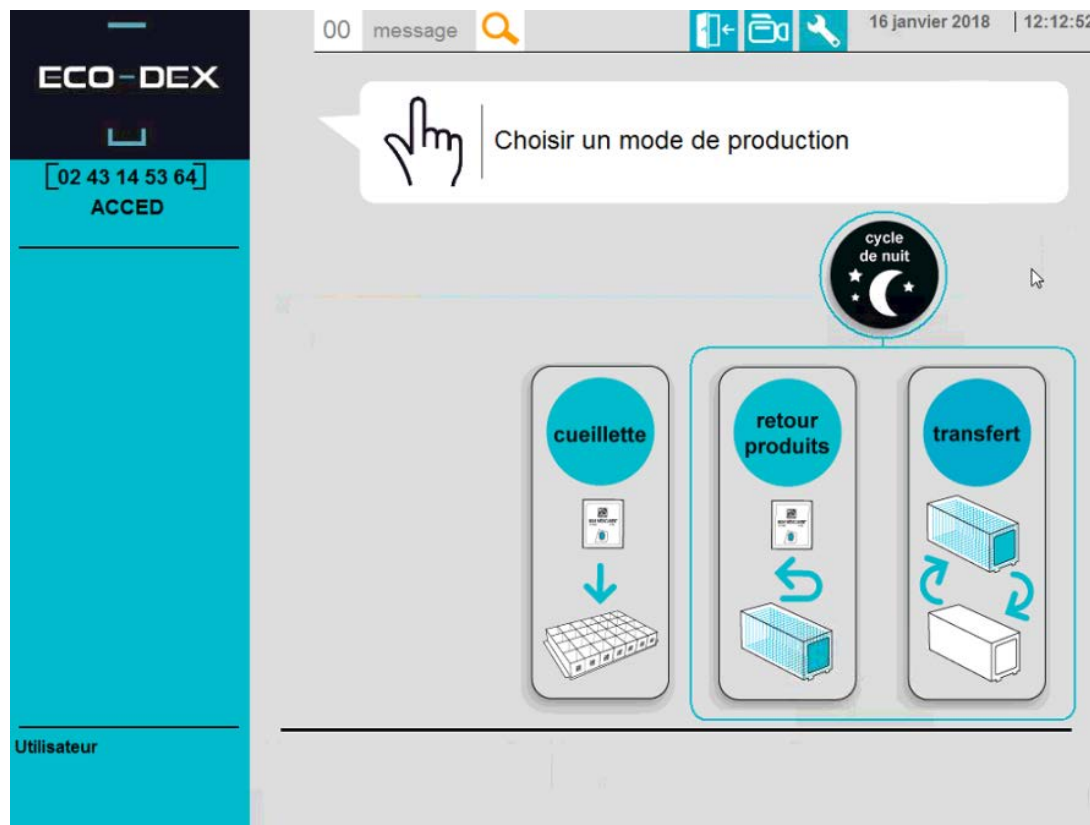

Descriptif de l'interface de cueillette CPU

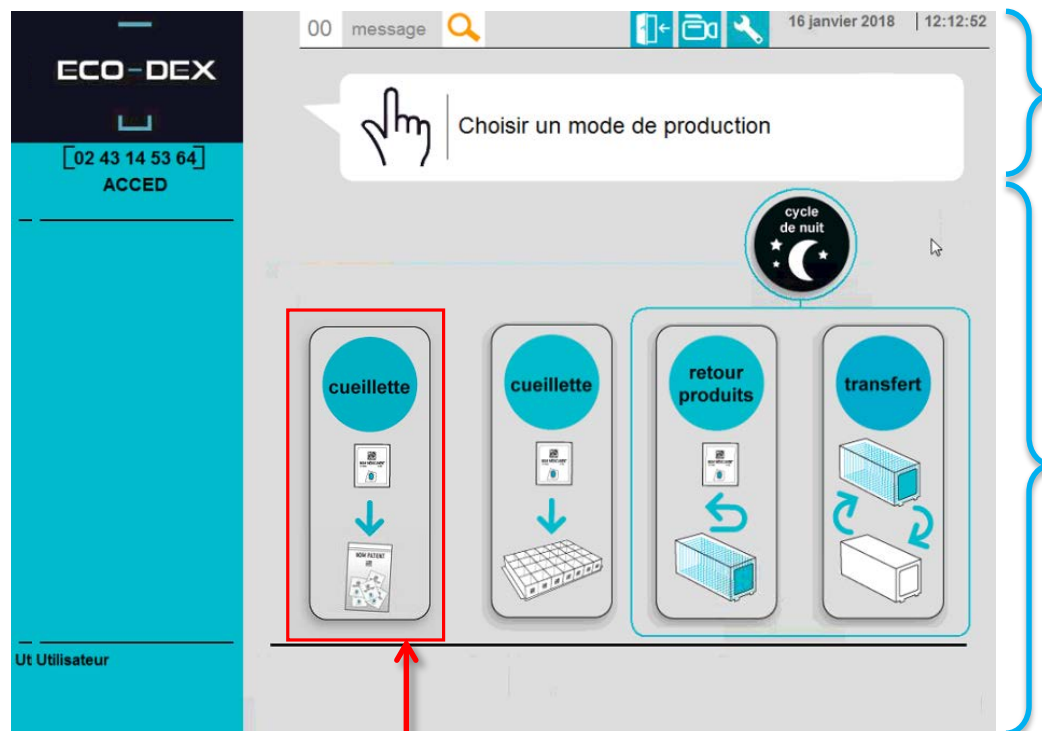


Information ou instruction à suivre sous forme de bulle


Zone de production

Option cueillette en sac de regroupement.

Descriptif de l'interface de cueillette CPU

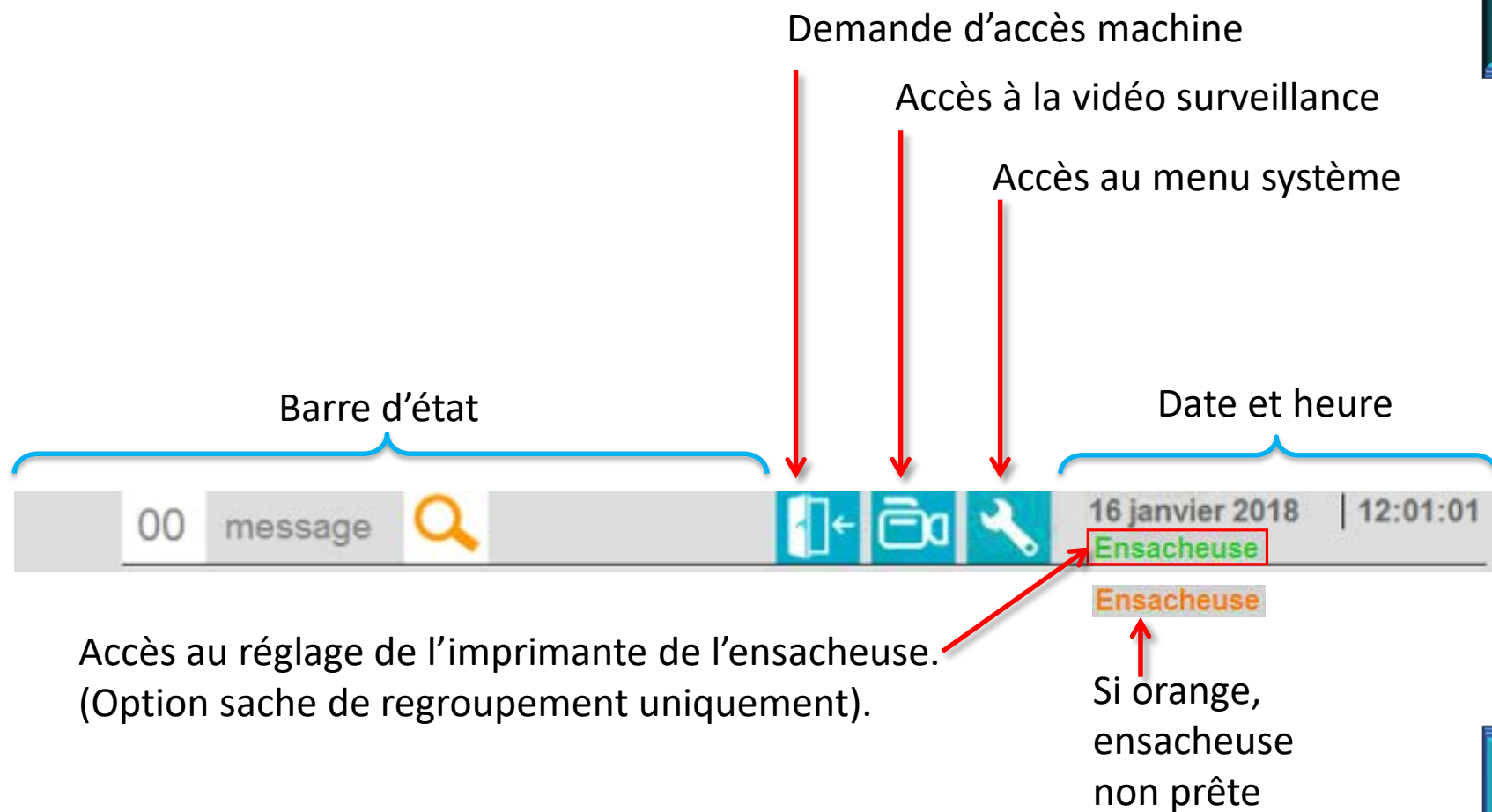


Descriptif de l'interface de cueillette CPU

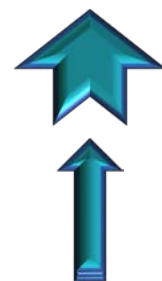


Le menu système :

- L'onglet Général.

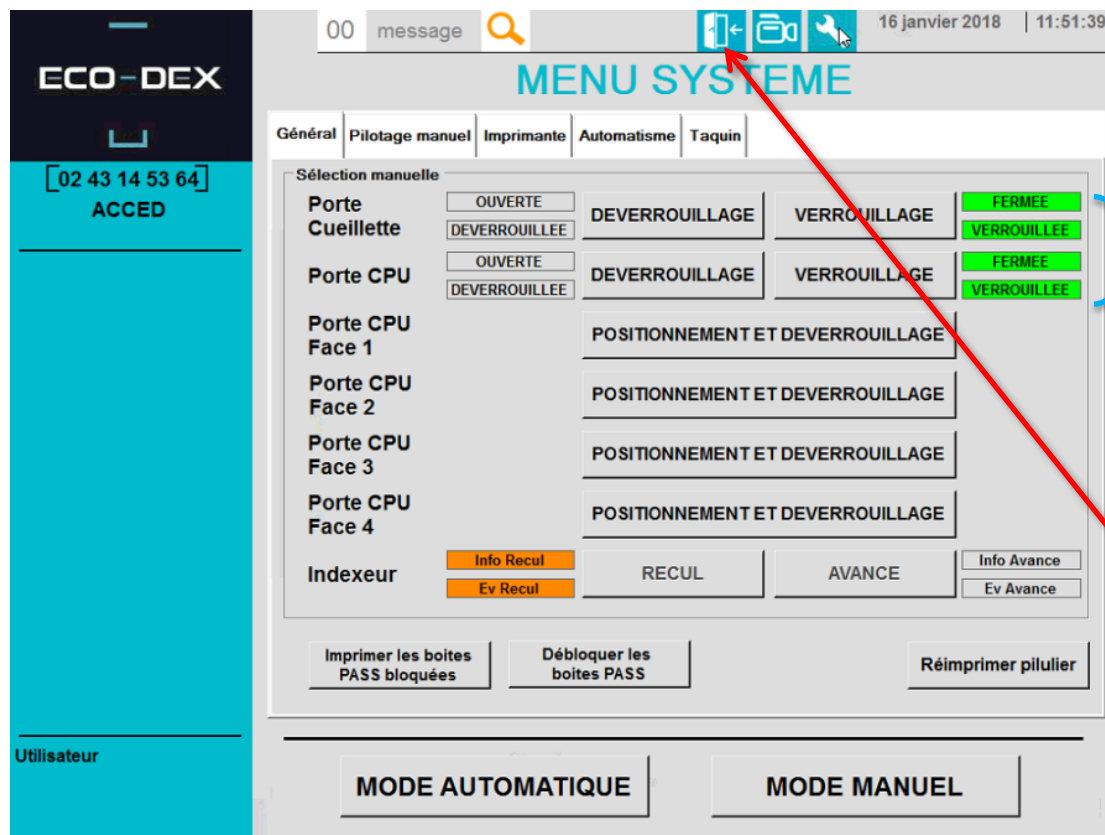


- Permet de vérifier l'état des portes cueillette et CPU et de forcer le verrouillage ou déverrouillage de l'une d'elles.

Préférer l'utilisation de la demande d'accès avant d'utiliser le forçage.

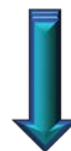


Descriptif de l'interface de cueillette CPU

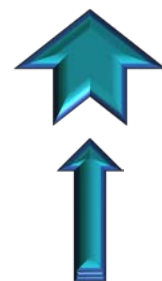


Le menu système :


- L'onglet Général.

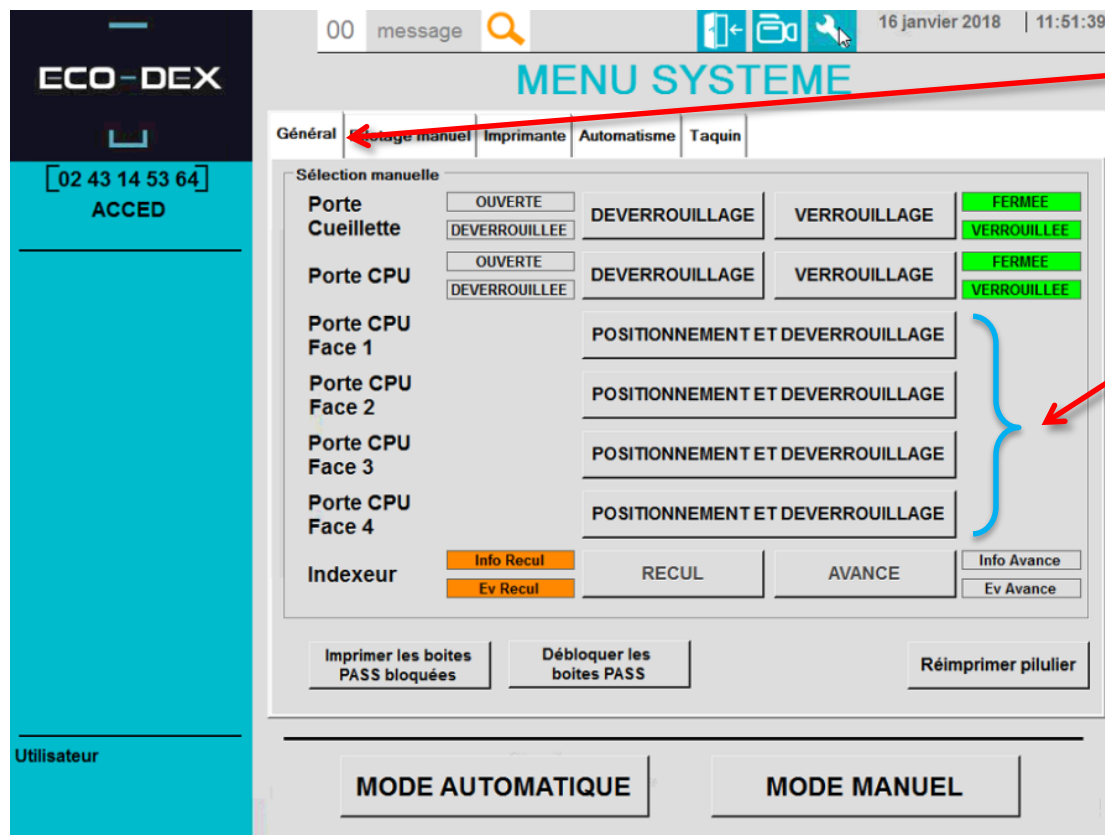

- Permet de positionner une face du carrousel CPU et de déverrouiller la porte afin d'accéder à cette face.

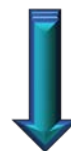


Descriptif de l'interface de cueillette CPU

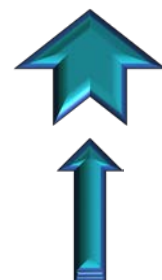


Le menu système :

- L'onglet Général.

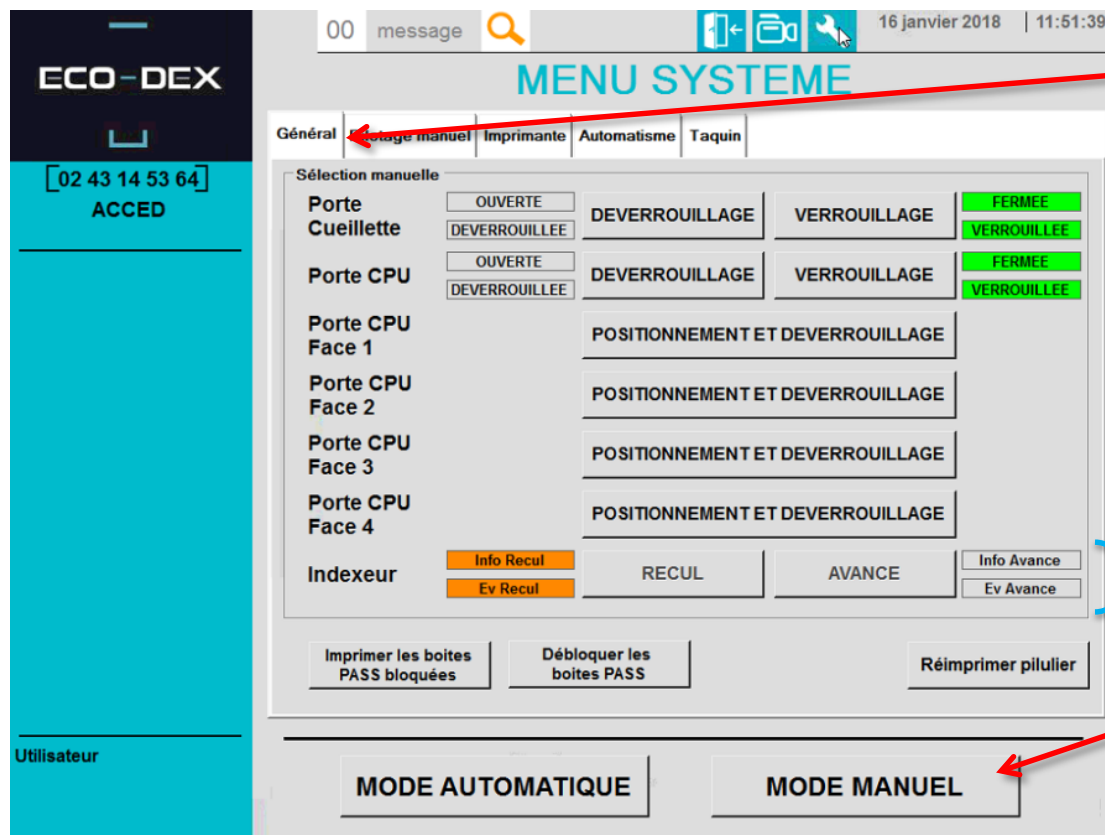


- Permet le contrôle de l'état ainsi que l'avance et recul de l'indexeur.


- Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

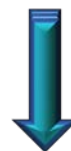

Descriptif de l'interface de cueillette CPU

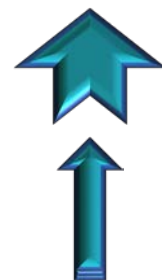


Le menu système :

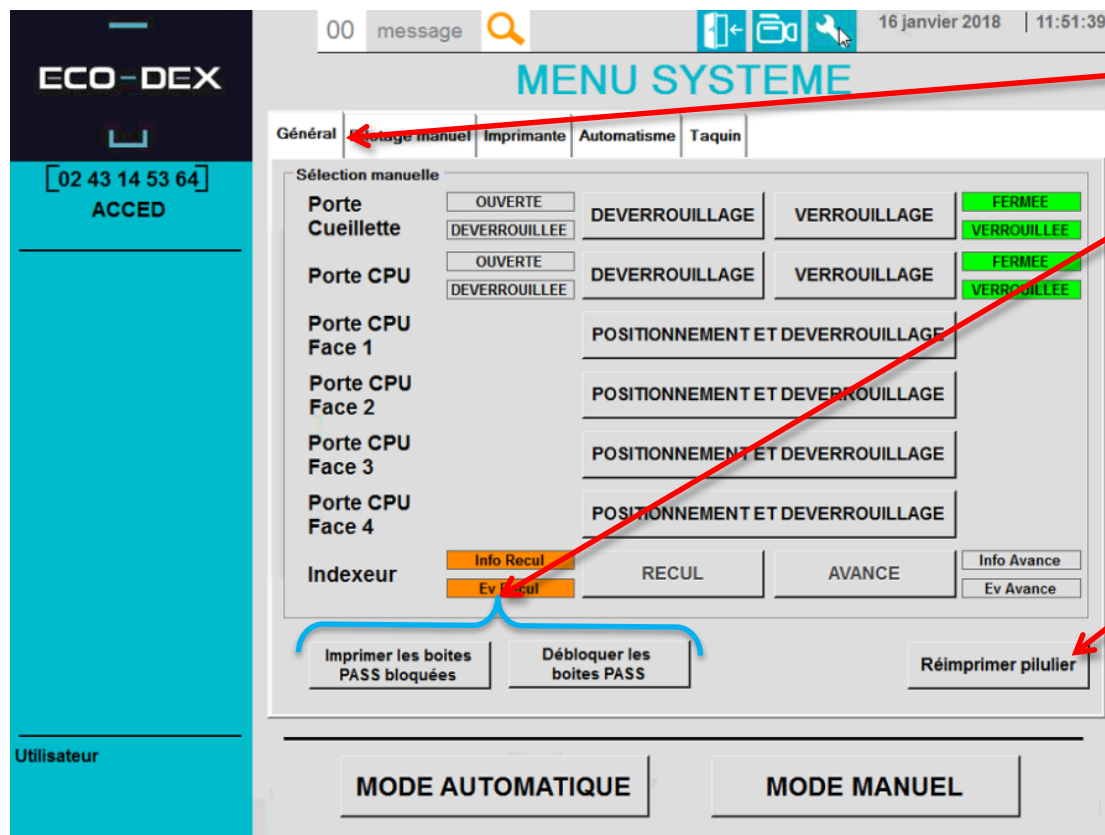


- L'onglet Général.

- Permet d'imprimer la liste des boites PASS bloquées en cueillette et de les débloquent toutes en une seul fois.

- Permet la réimpression de pilulier.

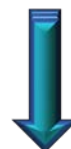

Descriptif de l'interface de cueillette CPU

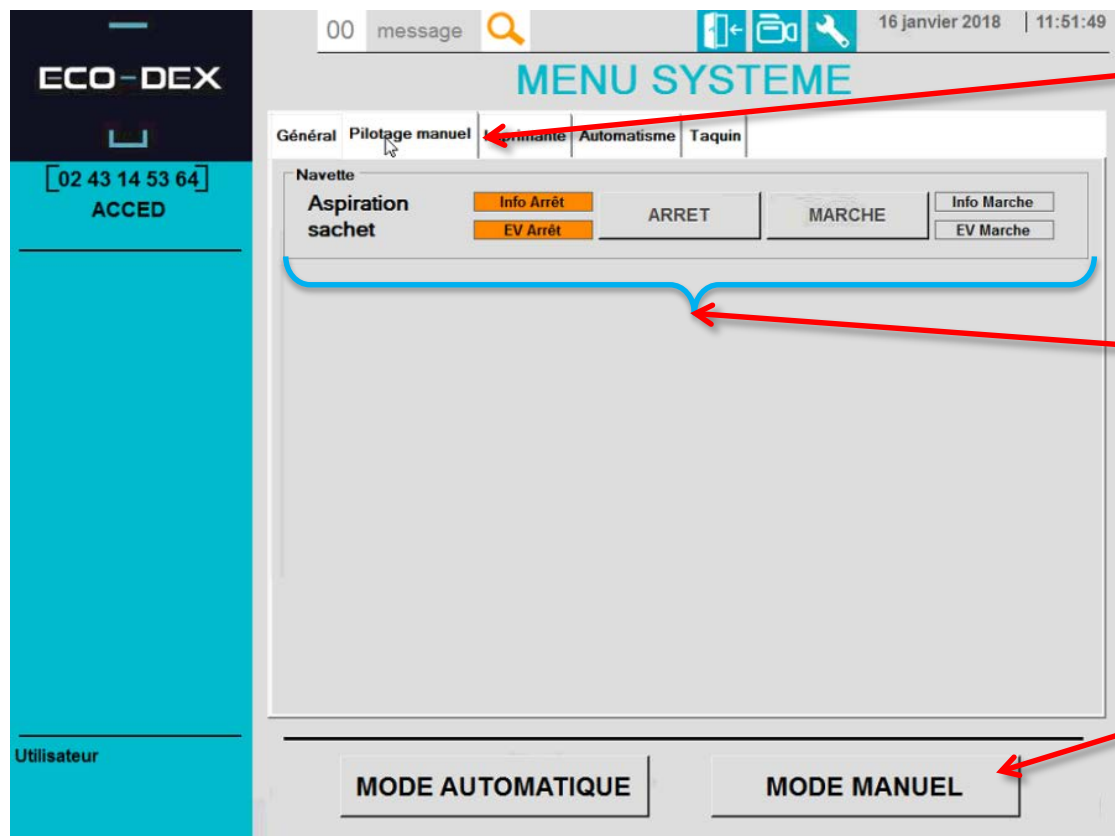


Le menu système :

- L'onglet Pilotage manuel.

- Permet de contrôler l'état ainsi que de forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration sachet.

- Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

Descriptif de l'interface de cueillette CPU

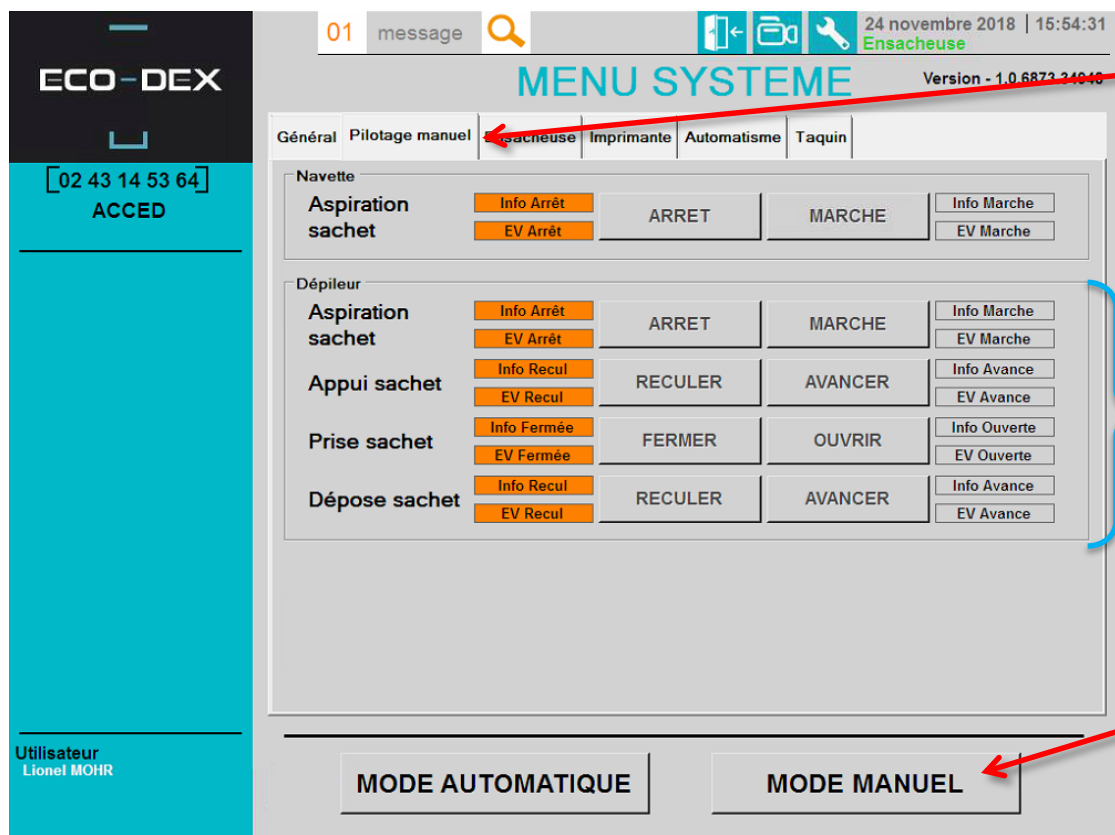

Le menu système :

- L'onglet Pilotage manuel.

⚠ Dans l'onglet Pilotage manuel, le Dépileur est disponible uniquement avec L'option sache de regroupement

- Permet de contrôler l'état du dépileur ainsi que de forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration, l'appui, la prise ou la dépose sachet.


- Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

Descriptif de l'interface de cueillette CPU



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Le menu système :


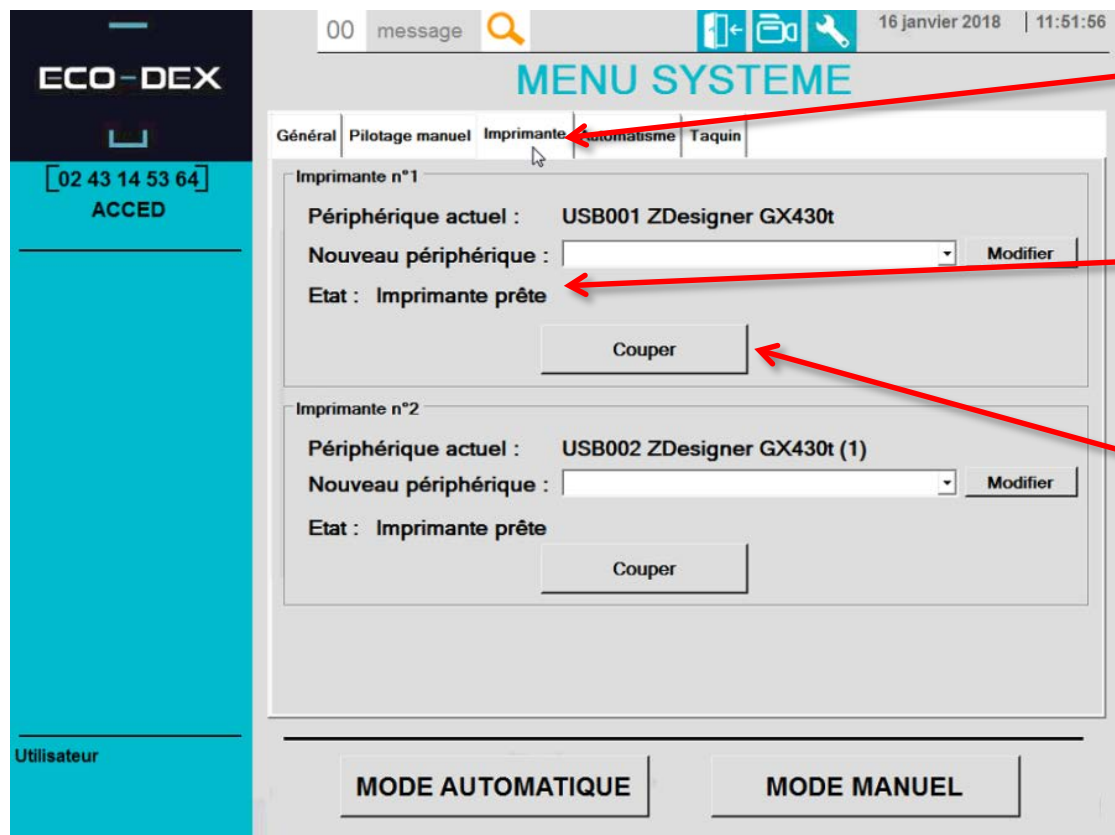


The screenshot shows the 'MENU SYSTEME' interface with the 'Imprimante' tab selected. It displays settings for two printers, 'Imprimante n°1' and 'Imprimante n°2'. Each printer section shows the current device (USB001 ZDesigner GX430t and USB002 ZDesigner GX430t (1)), a dropdown for a new device, and a 'Couper' button. The status for both is 'Imprimante prête'. At the bottom, there are buttons for 'MODE AUTOMATIQUE' and 'MODE MANUEL'.

- L'onglet Imprimante.

- Permet de contrôler l'état des imprimantes.

- Et de couper un ticket, lors de la réimpression d'un pilulier ou de l'impression d'un ticket test.

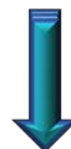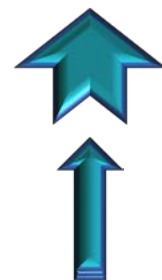



Descriptif de l'interface de cueillette CPU



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.


Le menu système :

- L'onglet Imprimante.

The screenshot shows the ECO-DEX MENU SYSTEM interface. The top bar includes the ECO-DEX logo, a message icon, and the date/time (16 janvier 2018 | 11:51:56). The main menu has tabs: Général, Pilotage manuel, Imprimante (selected), Automatisation, and Taquin. The Imprimante tab displays settings for two printers. For Imprimante n°1, the current device is USB001 ZDesigner GX430t, and the status is 'Imprimante prête'. For Imprimante n°2, the current device is USB002 ZDesigner GX430t (1), and the status is 'Imprimante prête'. Both printers have a 'Couper' button. The interface also features a 'MODE AUTOMATIQUE' and 'MODE MANUEL' button at the bottom.




La modification de périphérique est réservé au personnel technique ECO-DEX.

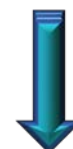




Descriptif de l'interface de cueillette CPU

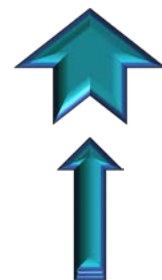

Le menu système :


- L'onglet Automatisation.

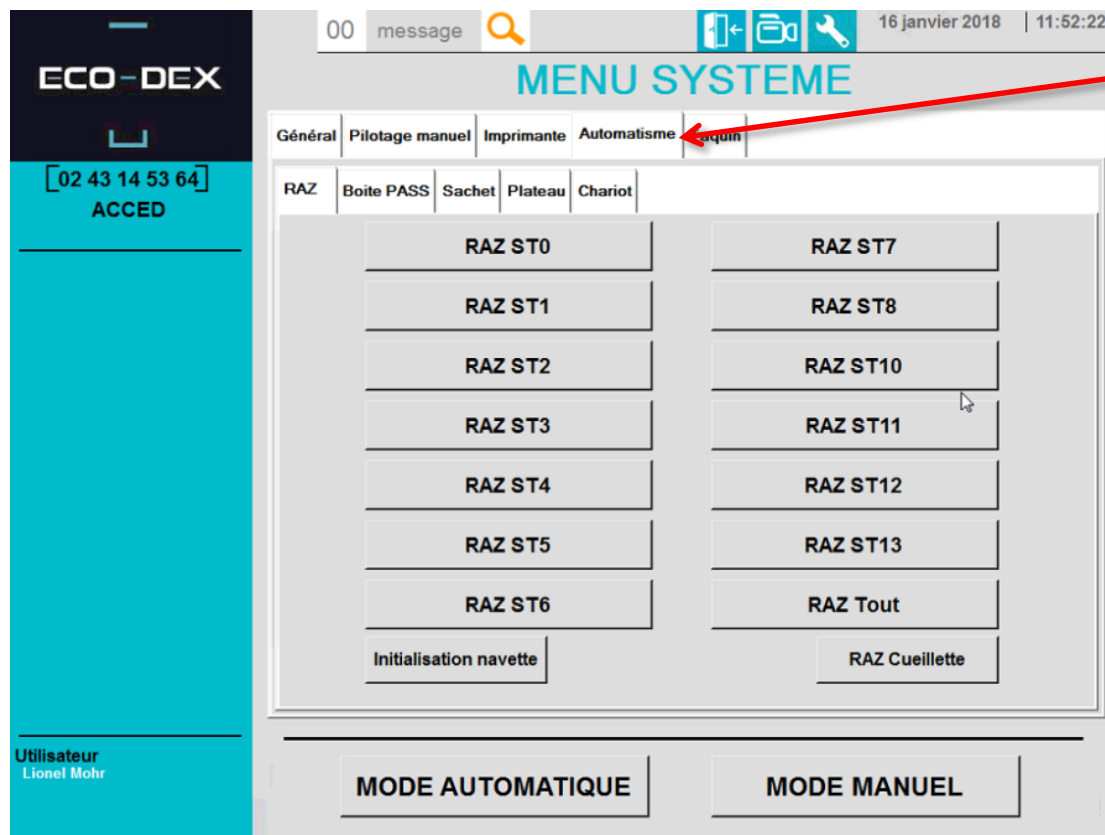

Il est réservé au personnel technique ECO-DEX.



L'accès est contrôlé par une demande d'identification.

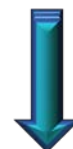


Descriptif de l'interface de cueillette CPU



Disponible uniquement dans les modules disposant de l'option sache de regroupement.

Le menu système :

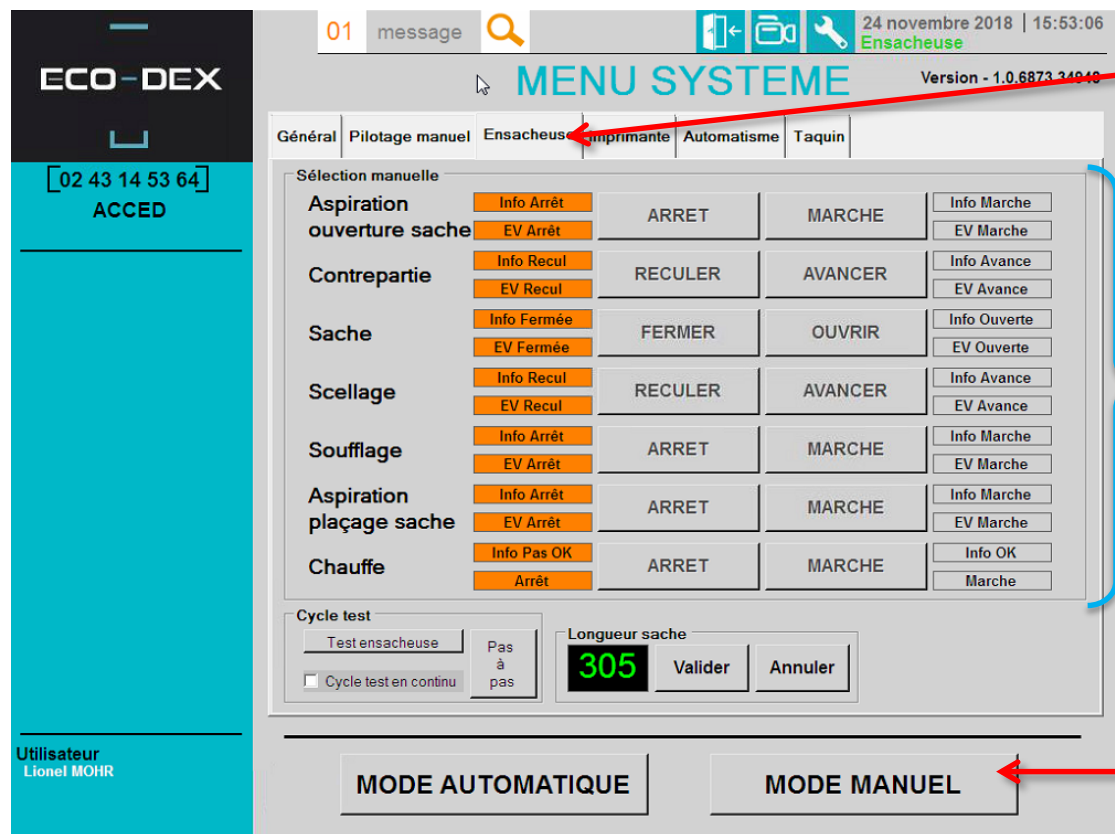

- L'onglet Ensacheuse.

- Permet de contrôler l'état de l'ensacheuse ainsi que de forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration ouverture et plaçage sachet, du soufflage et de la chauffe. De reculer ou avancer la contrepartie et le scellage ou d'ouvrir et fermer la sache.


- Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

Descriptif de l'interface de cueillette CPU



Disponible uniquement dans les modules disposant de l'option sache de regroupement.



Le menu système :

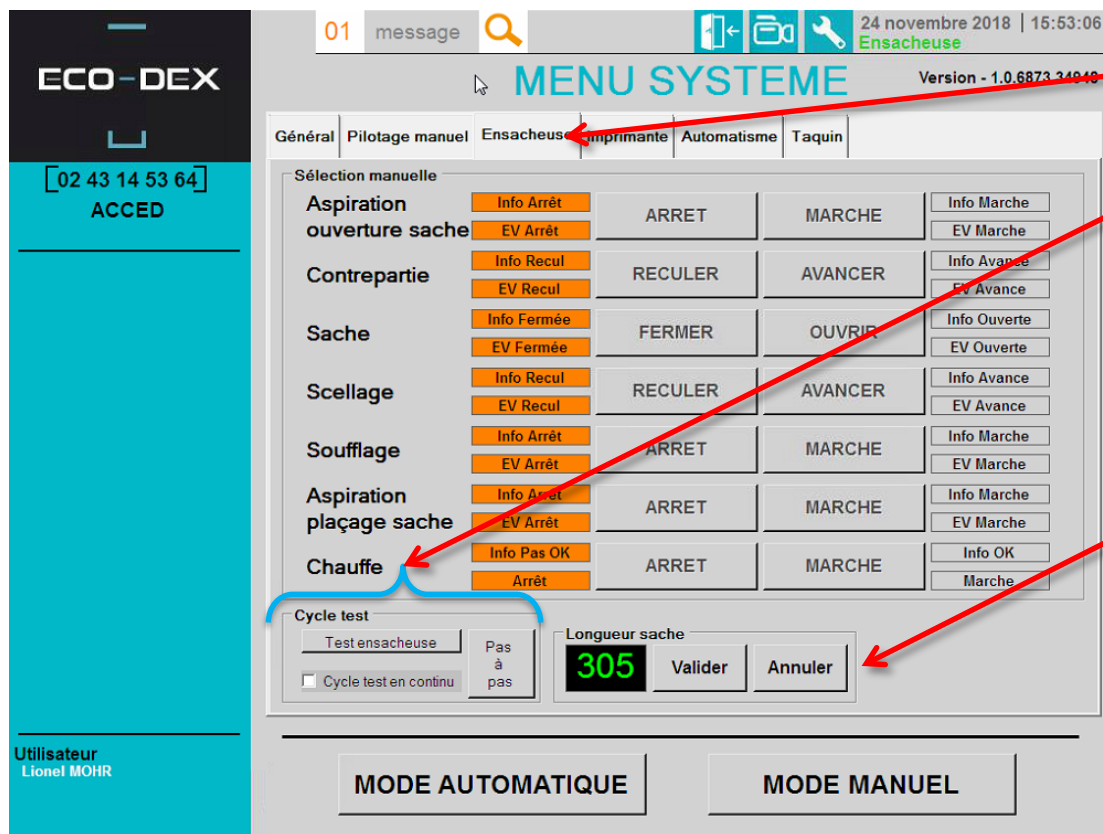

- L'onglet Ensacheuse.

- Permet de faire un test ensacheuse (cycle complet d'impression et de scellage d'une sache de regroupement).

- Permet de modifier la longueur de la sache en fonction de ça longueur réel.

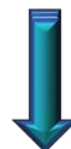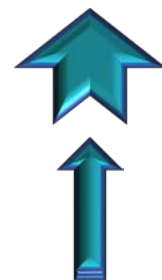

Descriptif de l'interface de cueillette CPU




Le menu système :

- L'onglet Taquin.

Cet onglet permet de gérer les emplacement à une seul boîte et les taquins.

Voir la documentation
([03.M - comprendre et créer les taquins](#))

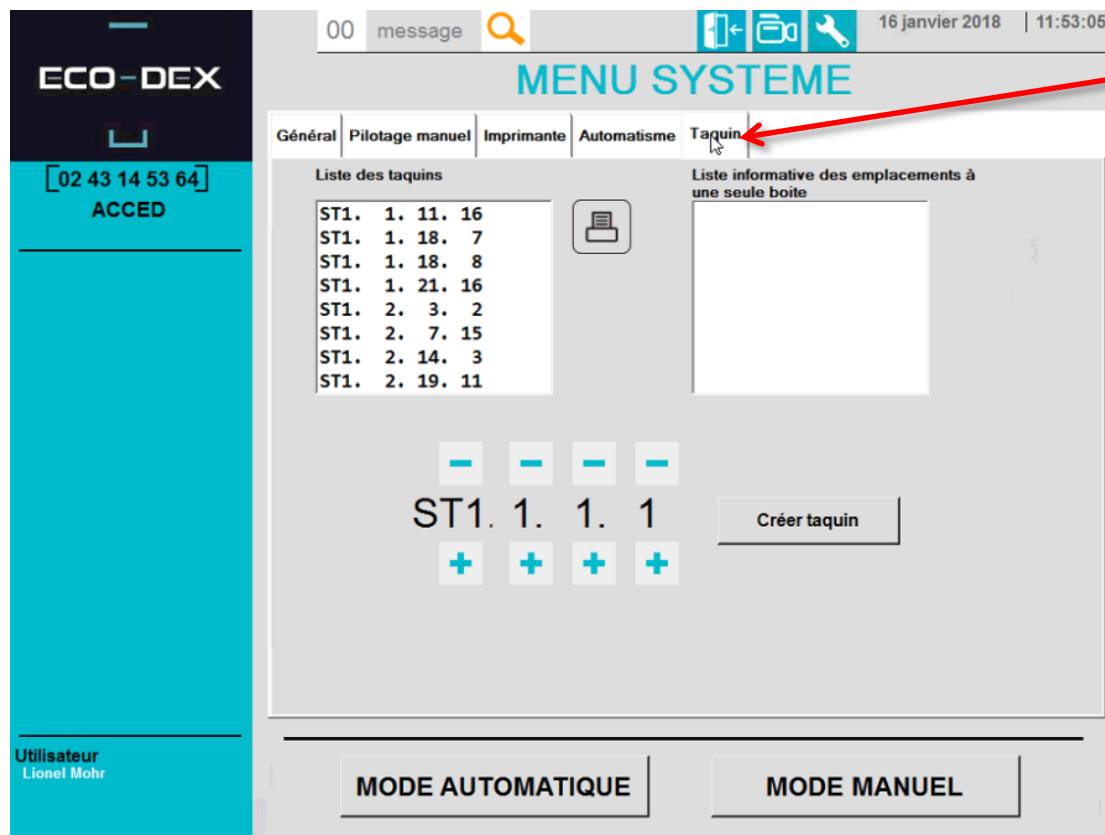

Présentation du module de cueillette CPU



03.D – Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste




Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste

Vérifier qu'il n'y a pas de message.

Qu'il n'y a rien en cours



Faire une « demande d'accès machine »

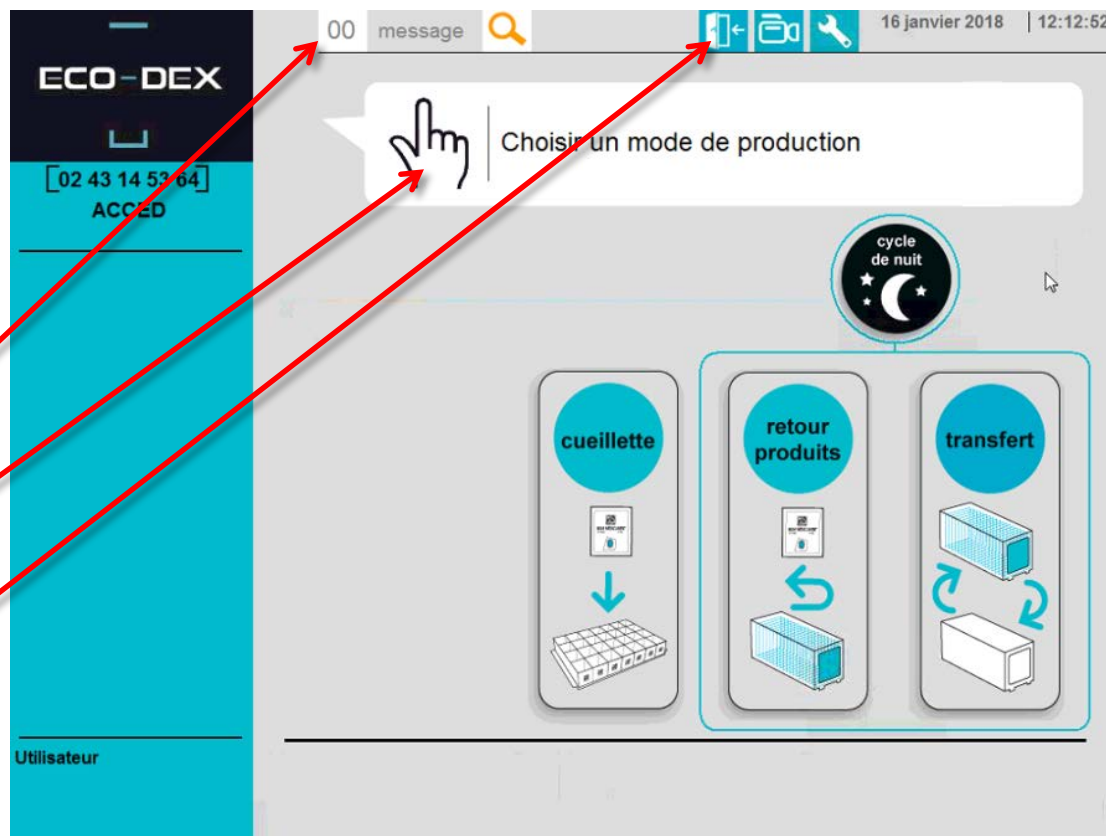

Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste

Sur cet exemple il y a un message.

Et uniquement le mode retour produits.

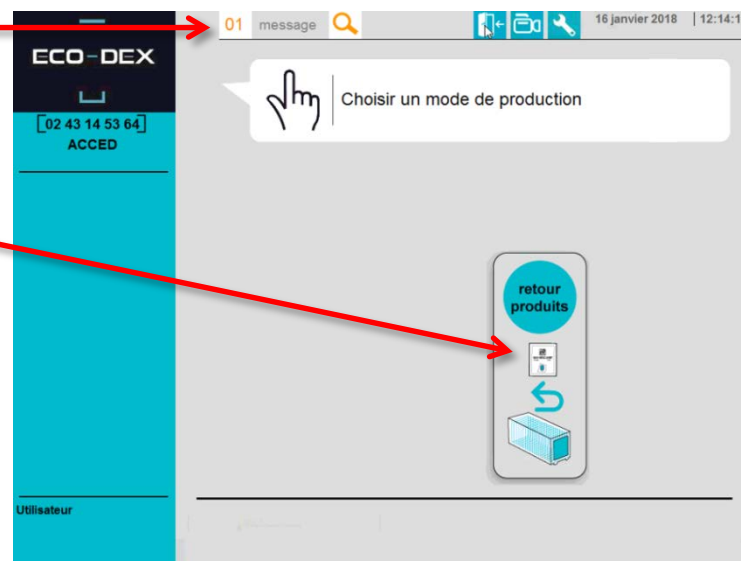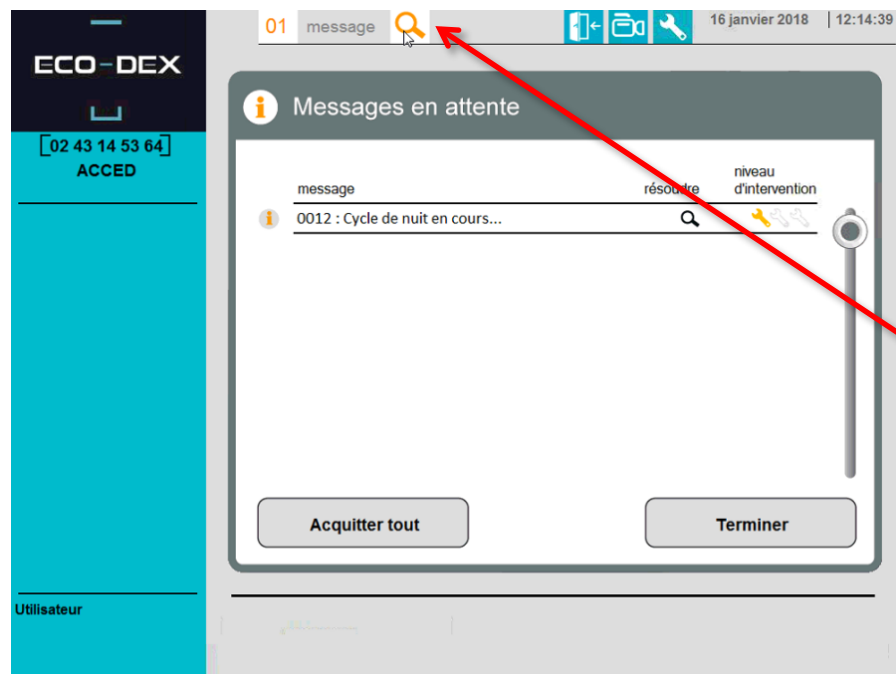


Dans les messages vous trouverez les informations sur ce qui est en cours.

Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste




Vérifier qu'il n'y a pas de
sachet au sol.

Repositionner le facing des
boîtes PASS.

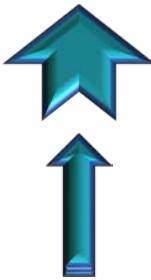

Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste


Vérifier le bon placement sachet en facing de chaque boîte PASS

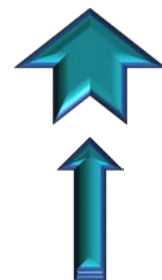


Mauvais placement sachet



Bon placement sachet

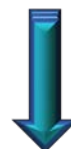

Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste

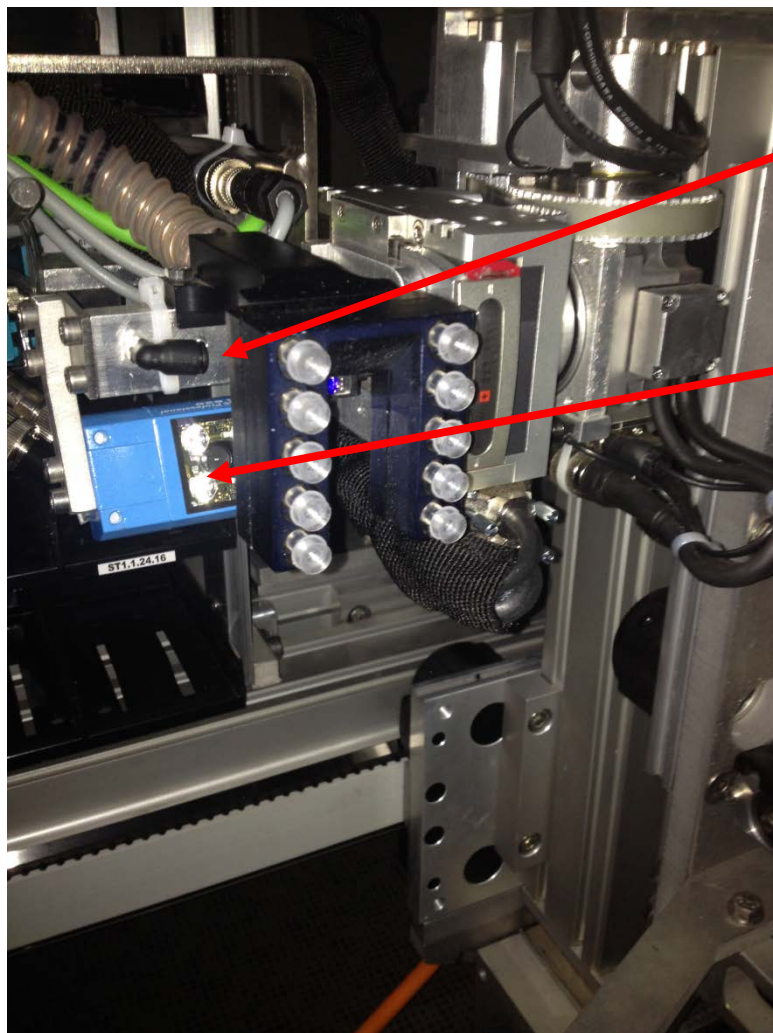

Nettoyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux, le capteur fibre optique. (sur la barre grise)


Nettoyage de la vitre du lecteur optique.

Possibilité d'utiliser de l'alcool mais pas de solvant.




Attention de ne pas rayer le verre, ne pas utiliser d'objet abrasif.

Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste


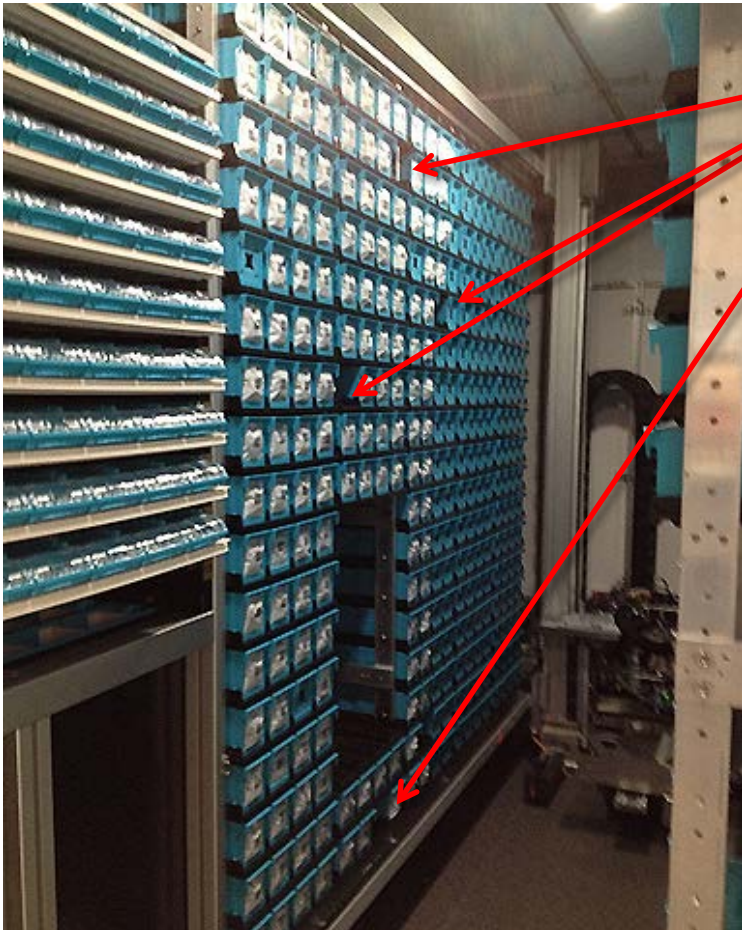


Vérifier les taquins
(emplacements vide qui permettent
les interventions de boîtes PASS).

Voir la documentation ([03.M -
comprendre et créer les taquins](#))

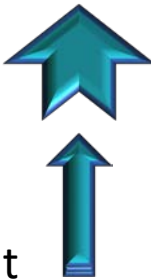

Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste

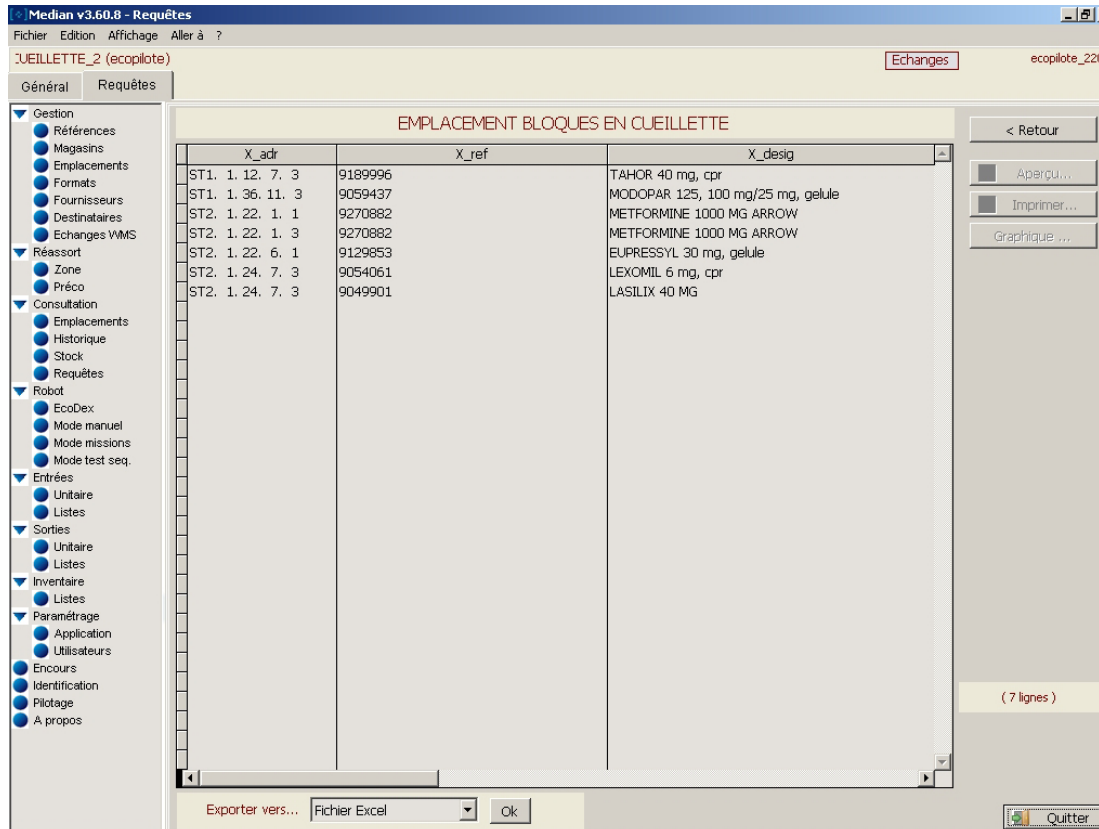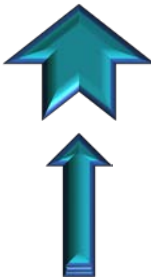


Vérifier les emplacements bloqués en cueillette.

Voir la documentation
([03.N - Comprendre et débloquent les boîtes PASS bloquées](#))



Préparation du module de cueillette CPU à la prise de poste

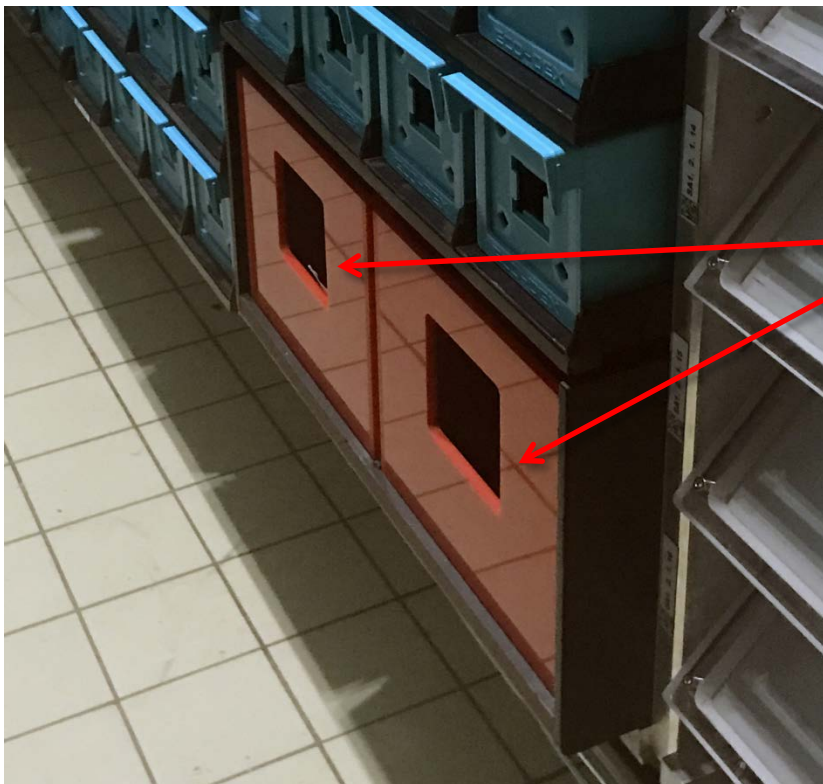

Vérifier et vider les boites poubelles.

Voir la documentation [\(03.0
Gestion des boites rejet\)](#)



Fonctionnement module de cueillette CPU

Cycle Cueillette en DN* et validation

*DN = Dispensation nominative.



Cycle cueillette en saché de regroupement

Cycle cueillette en sortie globale et validation


Cycle de retour produits

Cycle de transfert

Cycle de nuit

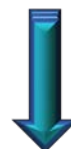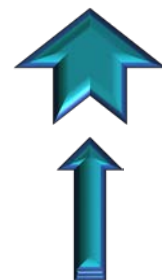


Fonctionnement du module de cueillette


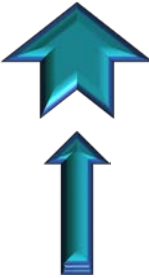


03.E – Cycle Cueillette en DN* et validation


*DN = Dispensation nominative

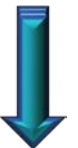



Cycle Cueillette en DN et validation

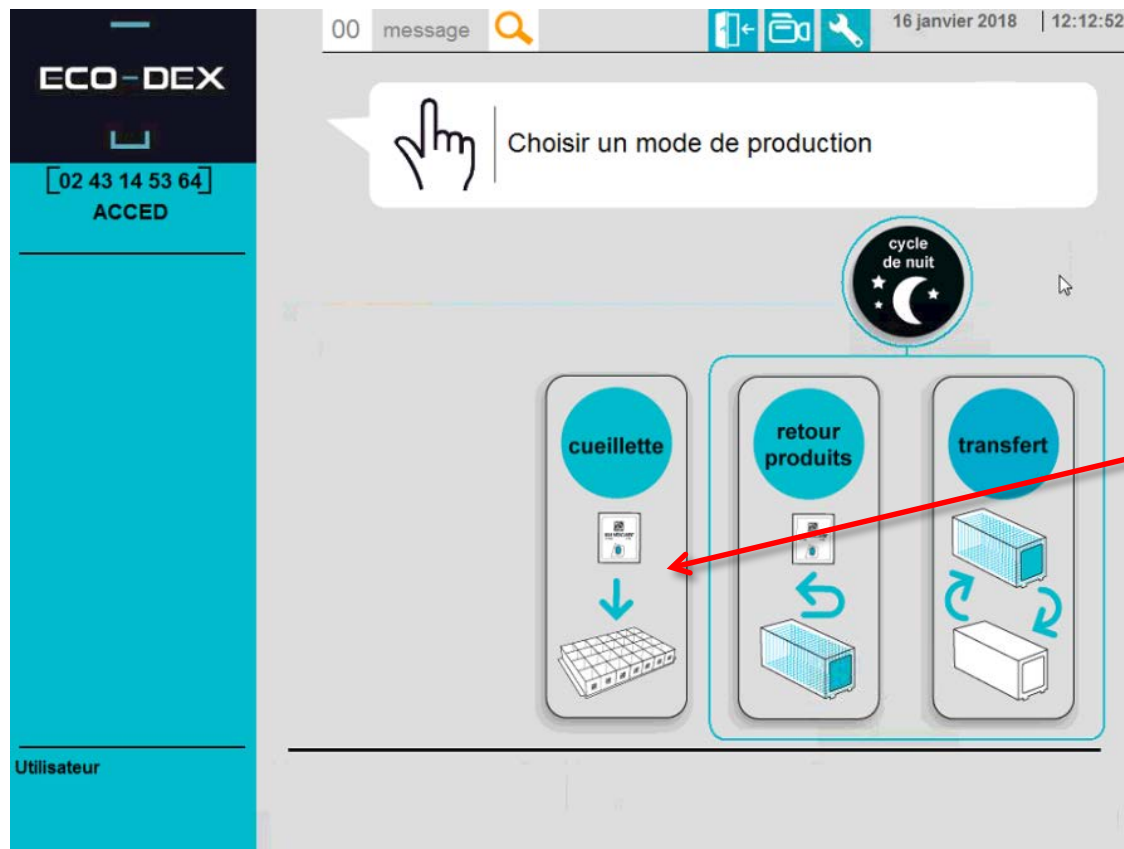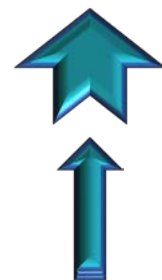


Aller dans le menu cueillette.

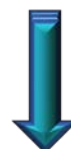



Cycle Cueillette en DN et validation

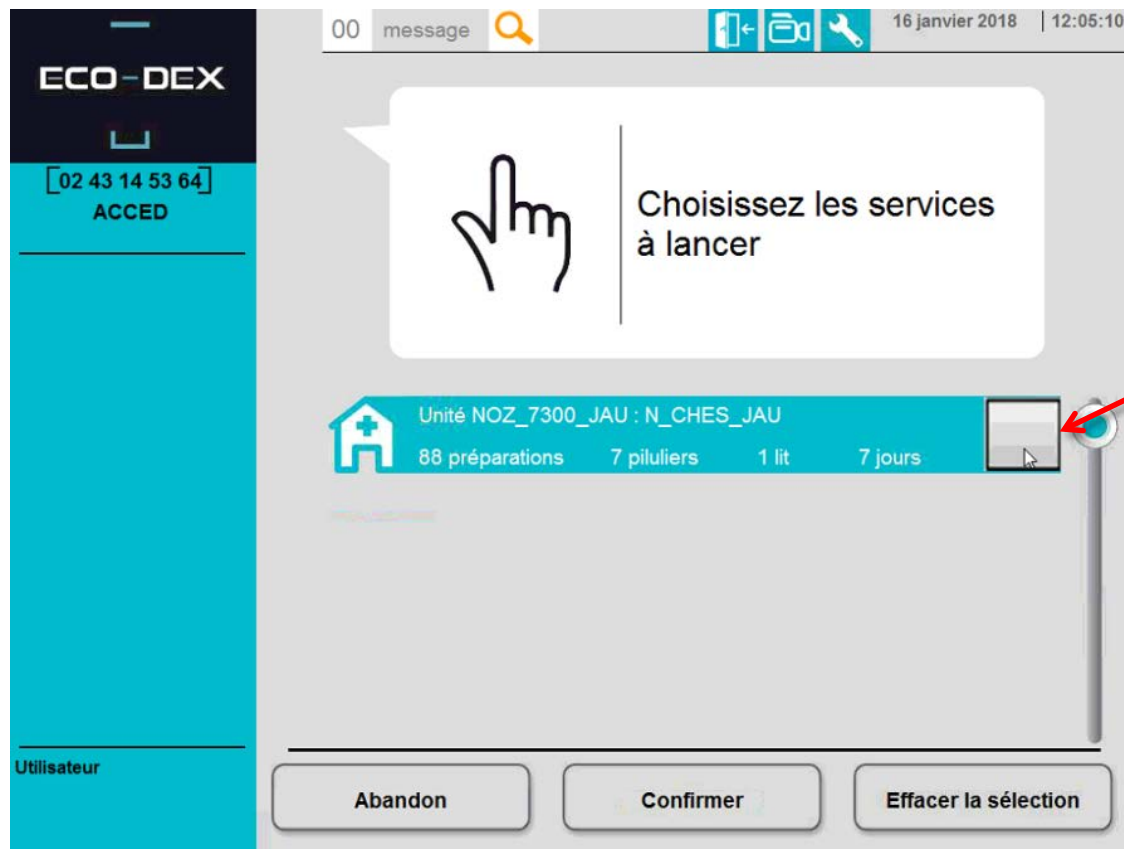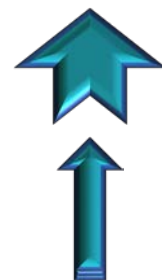

Pour lancer une
**Dispensation
Nominative**, il suffit
d'appuyer sur le
service à traiter.

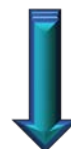

Cycle Cueillette en DN et validation

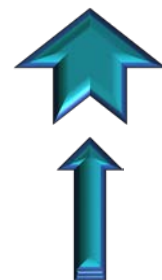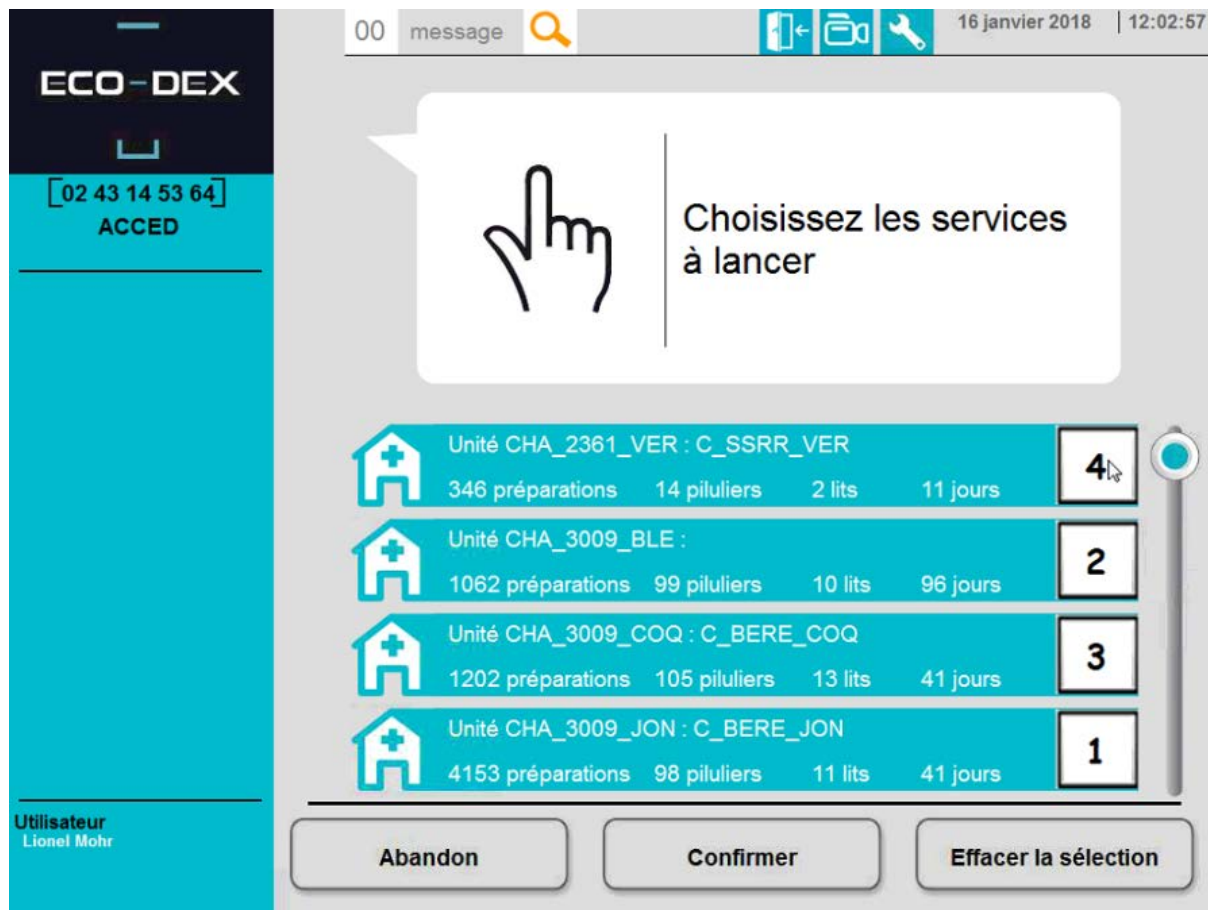00 message

16 janvier 2018 | 12:02:57

ECO-DEX

[02 43 14 53 64]
ACCED

Choisissez les services à lancer


Unité CHA_2361_VER : C_SSRR_VER	346 préparations	14 piluliers	2 lits	11 jours	4
Unité CHA_3009_BLE :	1062 préparations	99 piluliers	10 lits	96 jours	2
Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	1202 préparations	105 piluliers	13 lits	41 jours	3
Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	4153 préparations	98 piluliers	11 lits	41 jours	1

Utilisateur
Lionel Mohr

Abandon Confirmer Effacer la sélection

Cette écran montre la notion de sélection de services.

La numérotation fait l'ordre de cueillette.

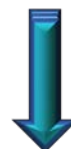

Cycle Cueillette en DN et validation



00 message

16 janvier 2018 | 12:02:57

ECO-DEX

[02 43 14 53 64]
ACCED

Choisissez les services à lancer

Unité CHA_2361_VER : C_SSRR_VER	346 préparations	14 piluliers	2 lits	11 jours	4
Unité CHA_3009_BLE :	1062 préparations	99 piluliers	10 lits	95 jours	2
Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	1202 préparations	105 piluliers	13 lits	41 jours	3
Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	4153 préparations	98 piluliers	11 lits	41 jours	1

Utilisateur
Lionel Mohr

Abandon Confirmer Effacer la sélection


Confirmer

La confirmation lance la cueillette.

Effacer la sélection

En cas d'erreur sur l'ordre de lancement des services.



Cycle Cueillette en DN et validation

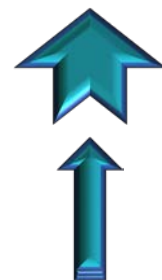

Après confirmation, la cueillette sera faite dans l'ordre de sélection.



Cycle Cueillette en DN et validation

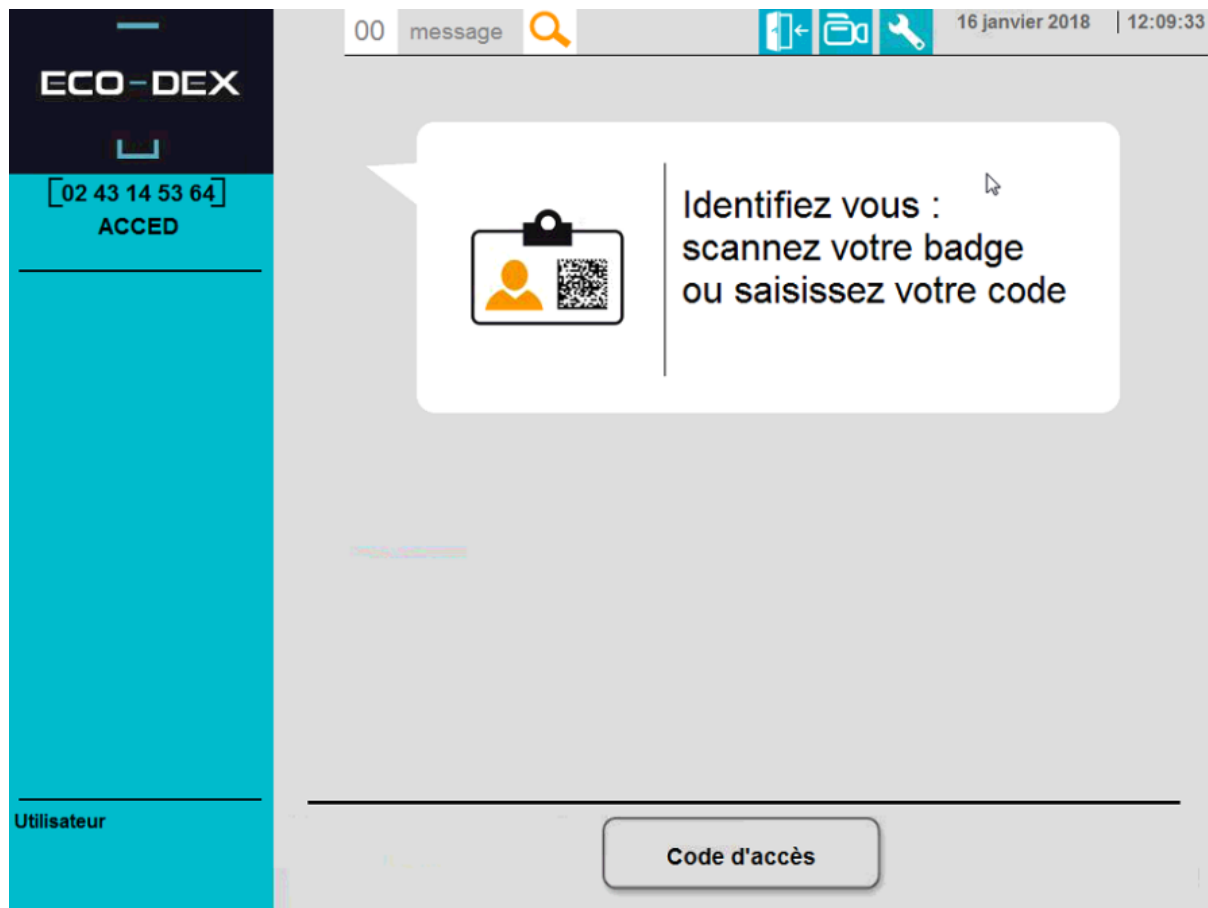
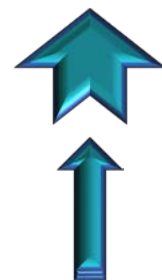


Une demande d'identification vous est automatiquement proposé en fin de cueillette afin de récupérer les préparations.






Cycle Cueillette en DN et validation

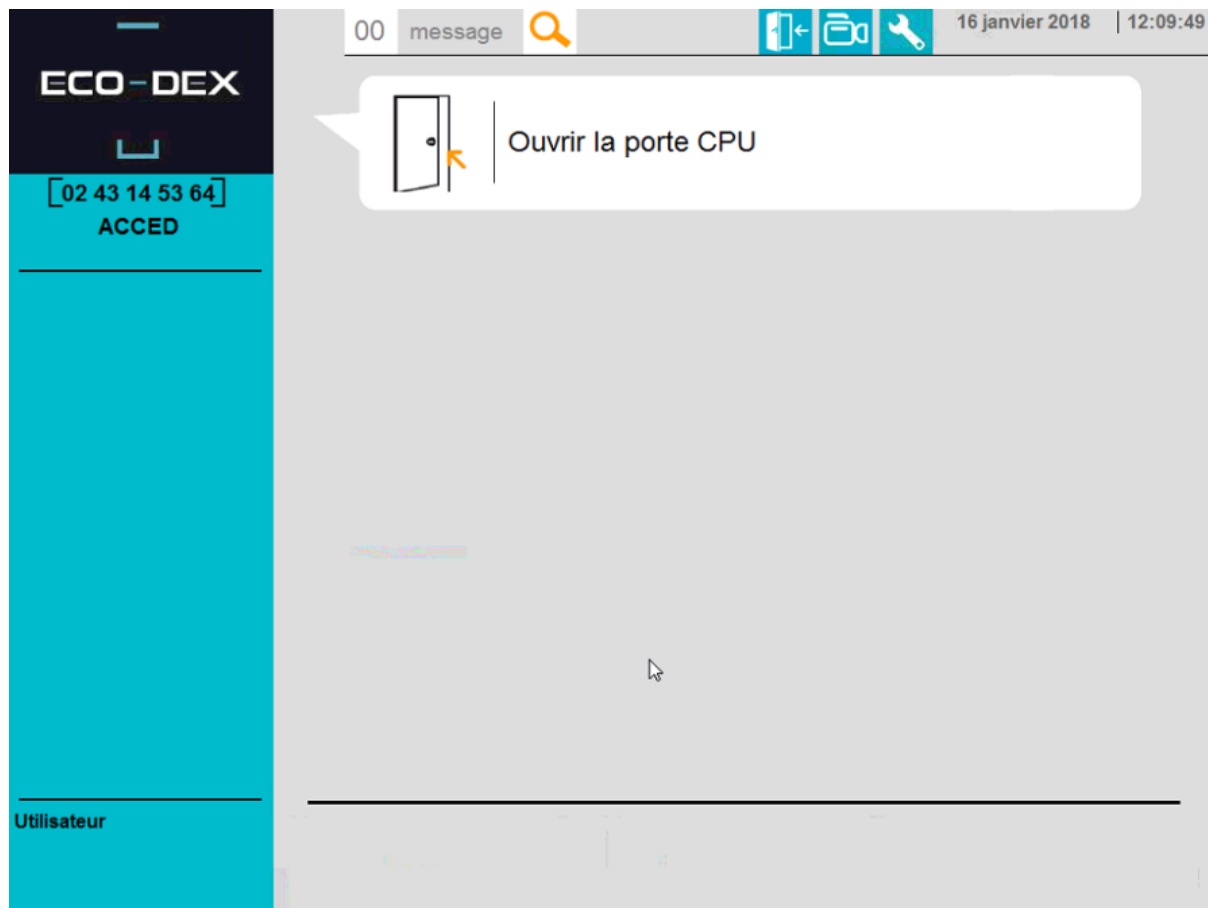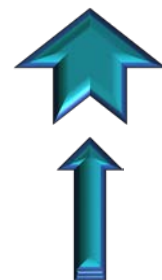

La porte CPU est déverrouillée a ce moment.





Cycle Cueillette en DN et validation

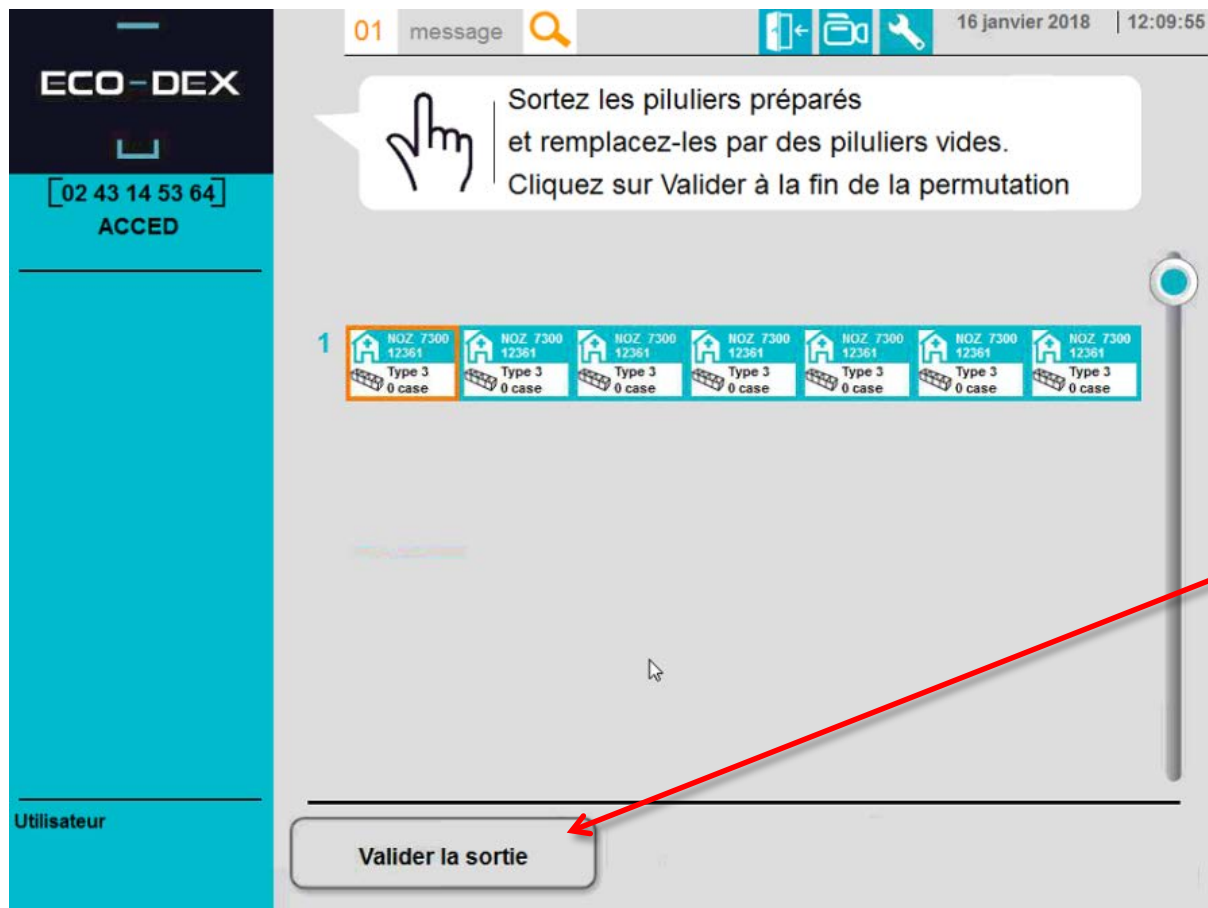

Vous pouvez récupérer et remplacer les piluliers préparés par des piluliers vides.

Pour continuer cliquer sur « Valider la sortie ».


Cycle Cueillette en DN et validation

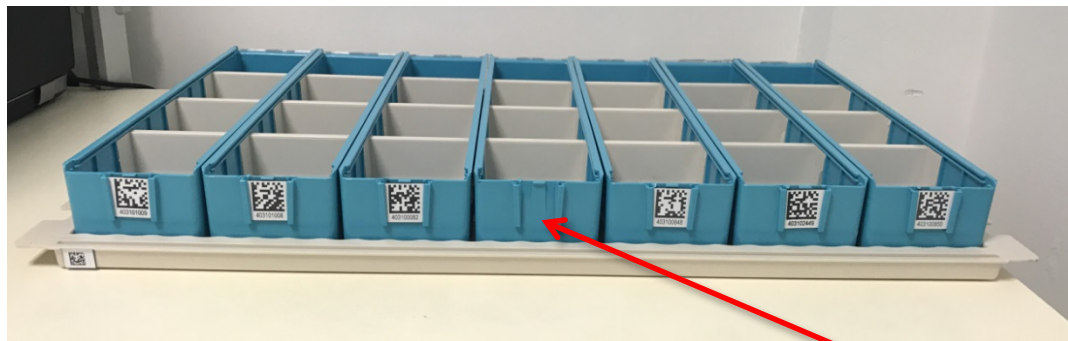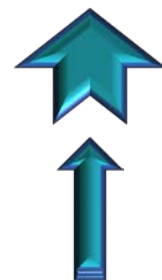

Attention à bien vérifier la présence des data-matrix sur les piluliers et les plateaux.



Data-matrix absents.

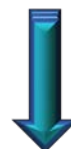


Cycle Cueillette en DN et validation





Faire également
attention au sens de
réintroduction des
plateaux.

Dans cet exemple deux
plateaux sont à
l'envers.

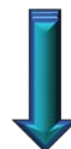



Cycle Cueillette en DN et validation

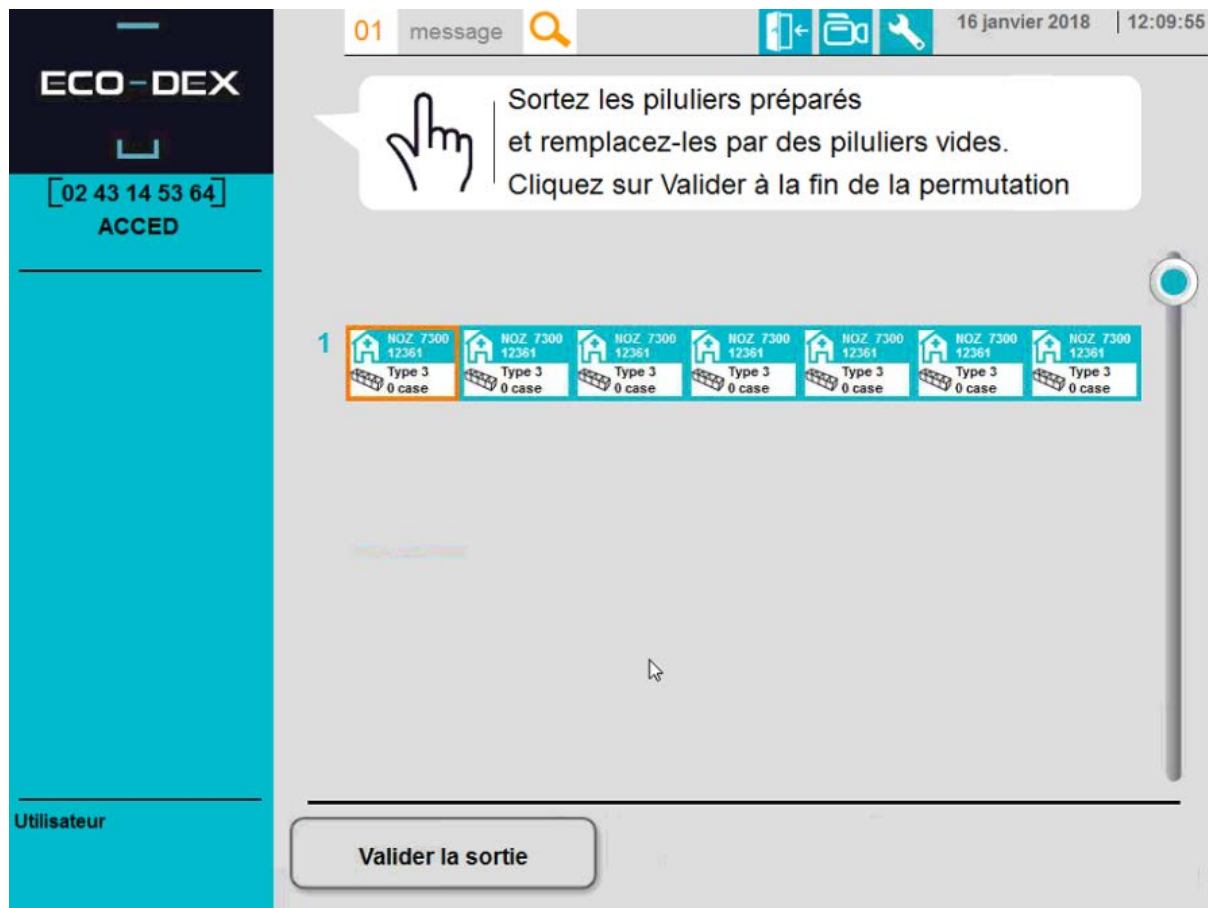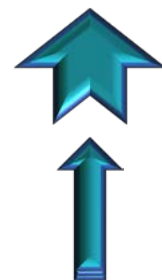

Vous pouvez également contrôler la dispensation d'un pilulier en cliquant dessus.



Cycle Cueillette en DN et validation

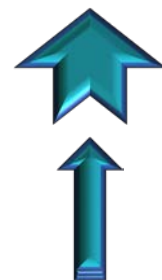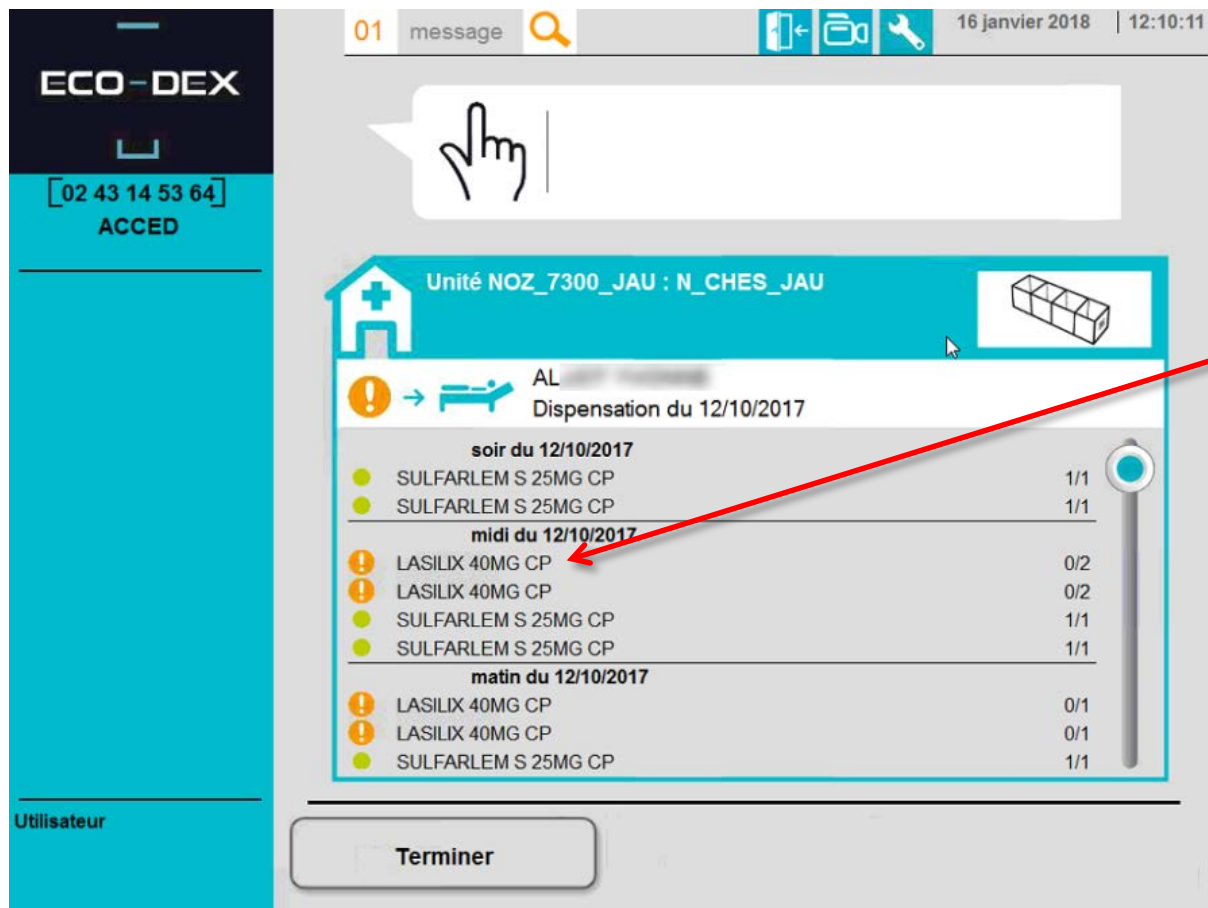01 message

16 janvier 2018 | 12:10:11

ECO-DEX

[02 43 14 53 64]
ACCED

Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU

AL
Dispensation du 12/10/2017

soir du 12/10/2017

SULFARLEM S 25MG CP	1/1
SULFARLEM S 25MG CP	1/1

midi du 12/10/2017

! LASILIX 40MG CP	0/2
! LASILIX 40MG CP	0/2
SULFARLEM S 25MG CP	1/1
SULFARLEM S 25MG CP	1/1

matin du 12/10/2017

! LASILIX 40MG CP	0/1
! LASILIX 40MG CP	0/1
SULFARLEM S 25MG CP	1/1



Utilisateur

Terminer

Les produits avec un point d'exclamation !, représentent des compléments à faire manuellement car non dispensés automatiquement.




Cycle Cueillette en DN et validation

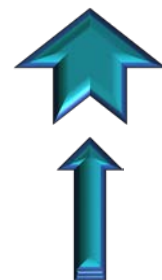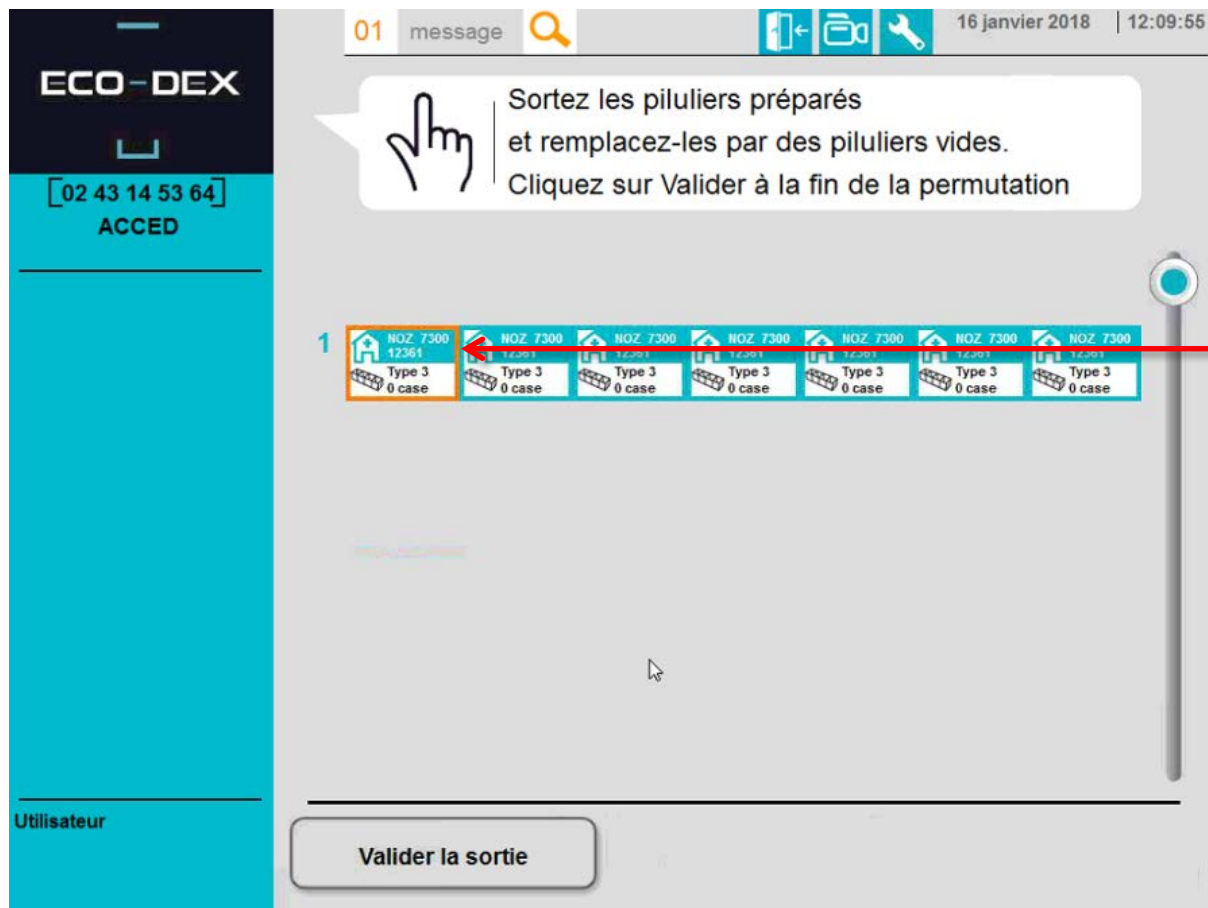The screenshot shows the ECO-DEX interface. At the top, there is a header with the ECO-DEX logo and a status bar displaying '01 message', a search icon, and navigation icons. The date and time are '16 janvier 2018' and '12:09:55'. Below the header, a message box contains the text: 'Sortez les piluliers préparés et remplacez-les par des piluliers vides. Cliquez sur Valider à la fin de la permutation'. Below the message, there is a list of pill containers. The first container is highlighted in orange and labeled '1'. The other containers are labeled 'NOZ 7300 12361 Type 3 0 case'. At the bottom, there is a button labeled 'Valider la sortie'.

Les piluliers en orange, sont à contrôler.

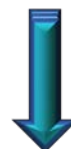

Cycle Cueillette en DN et validation



ECO-DEX

[02 43 14 53 64]

ACCED

01 message

16 janvier 2018 | 12:10:35

Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU

AL

Dispensation du 10/10/2017

! →

AL

Dispensation du 10/10/2017

midi du 10/10/2017

● DIFFU K 600MG GEL

● DIFFU K 600MG GEL

● LASILIX 40MG CP

● LASILIX 40MG CP

● SULFARLEM S 25MG CP

● SULFARLEM S 25MG CP

1/1

1/1

0/2

0/2

1/1

1/1

matin du 10/10/2017

● LASILIX 40MG CP

● LASILIX 40MG CP

● SULFARLEM S 25MG CP

● SULFARLEM S 25MG CP

0/1

0/1

1/1

1/1

Utilisateur

Terminer


Dans cette exemple, ce pilulier présente une suspicion de double doses dans la case du matin.

Conducteur Module de Cueillette CPU
Fonctionnement du module de cueillette CPU

DDF03E-181210

58



Fonctionnement du module de cueillette

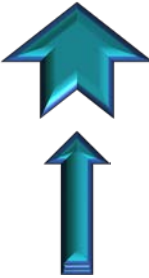


03.F – Cycle cueillette en sache de regroupement





Cycle cueillette en saché de regroupement

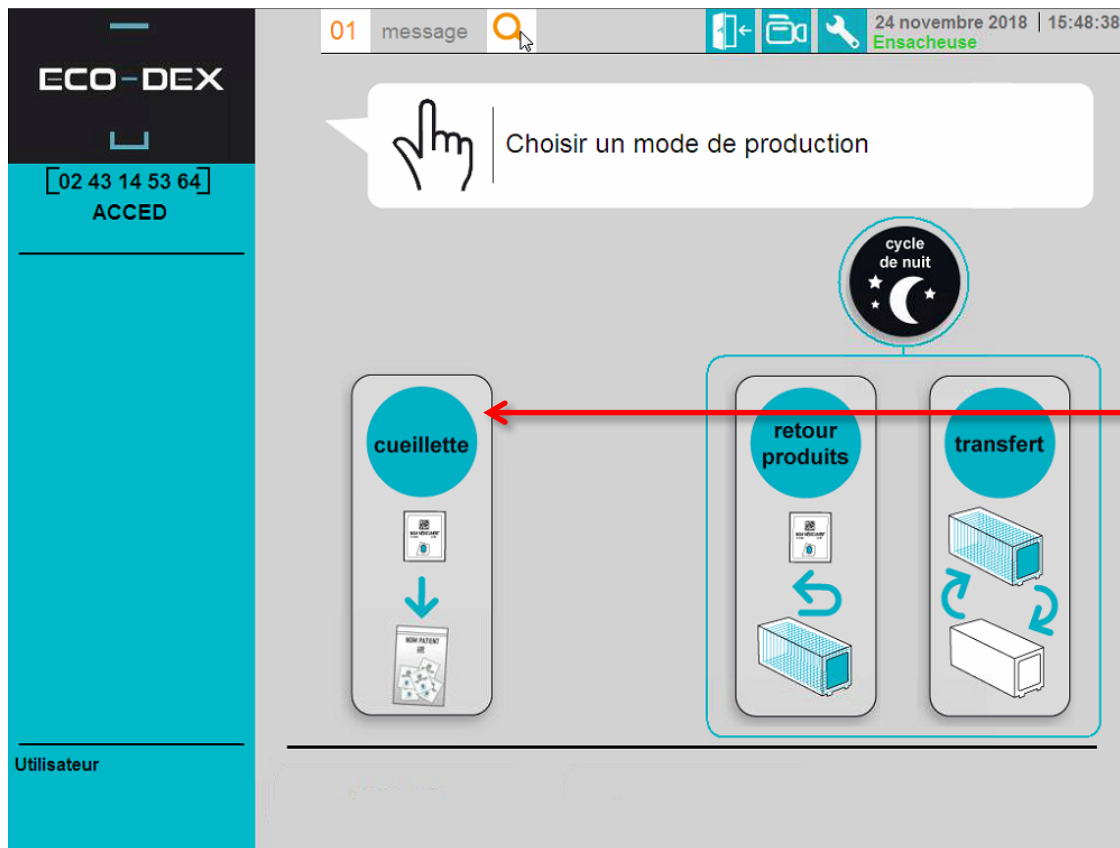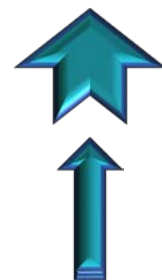


Aller dans le menu cueillette en saché de regroupement.

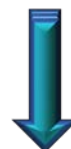


Cycle cueillette en saché de regroupement

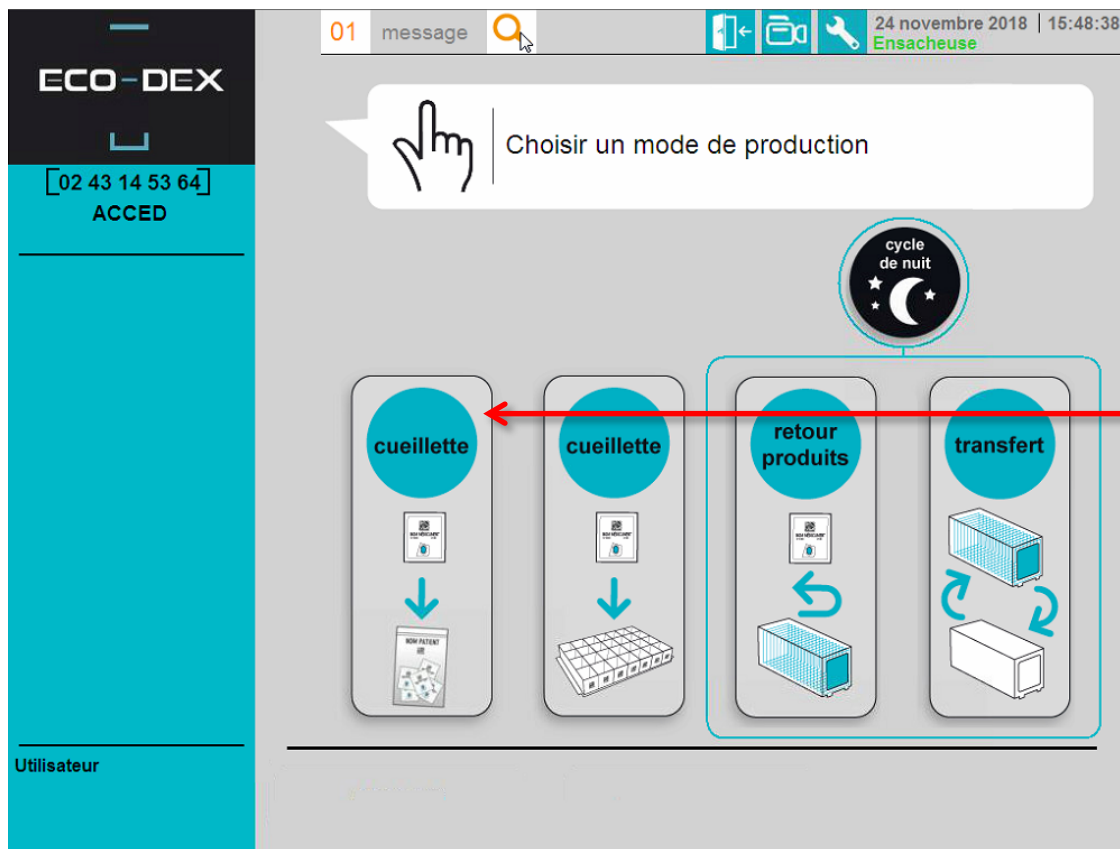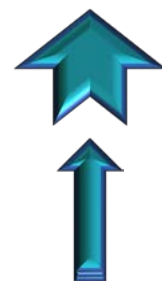

Le menu peut se présenter comme ceci suivant les options.

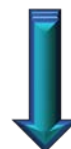


Cycle cueillette en saché de regroupement

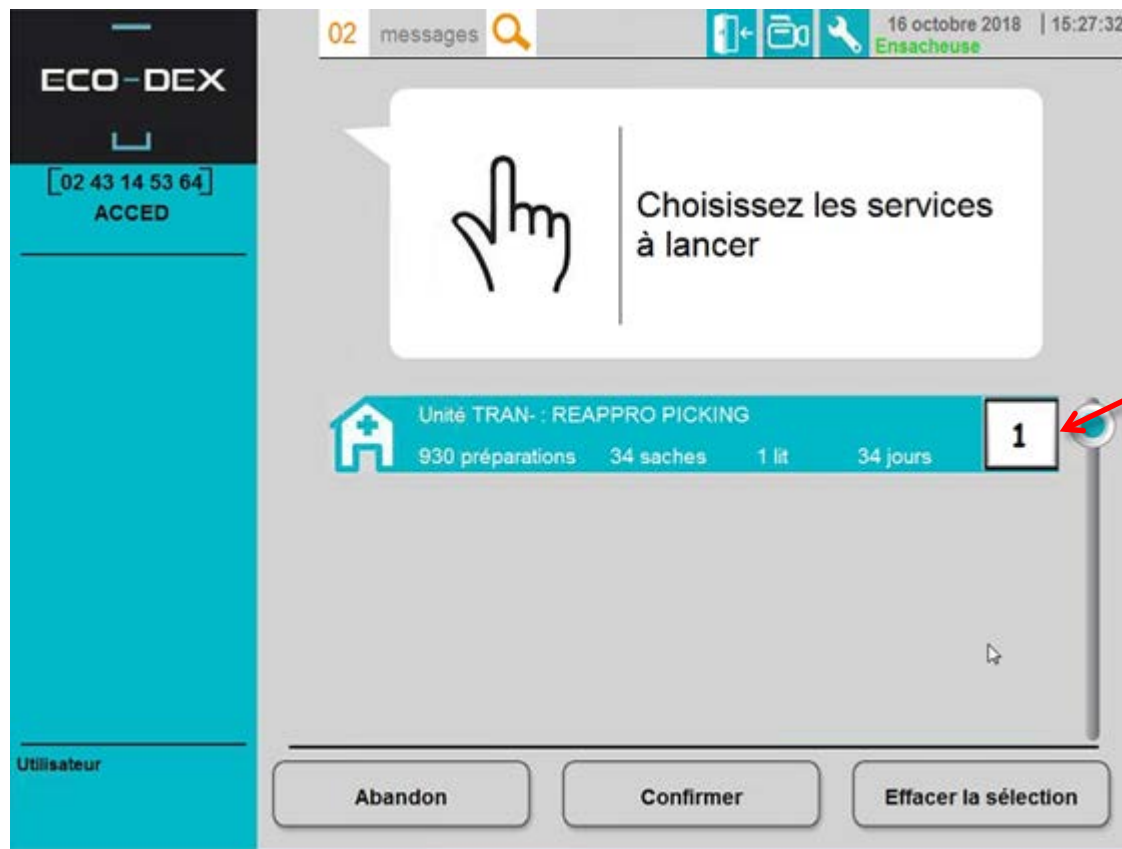

Pour lancer une **cueillette en saché de regroupement**, il suffit d'appuyer sur le service à traiter.

Cycle cueillette en saché de regroupement

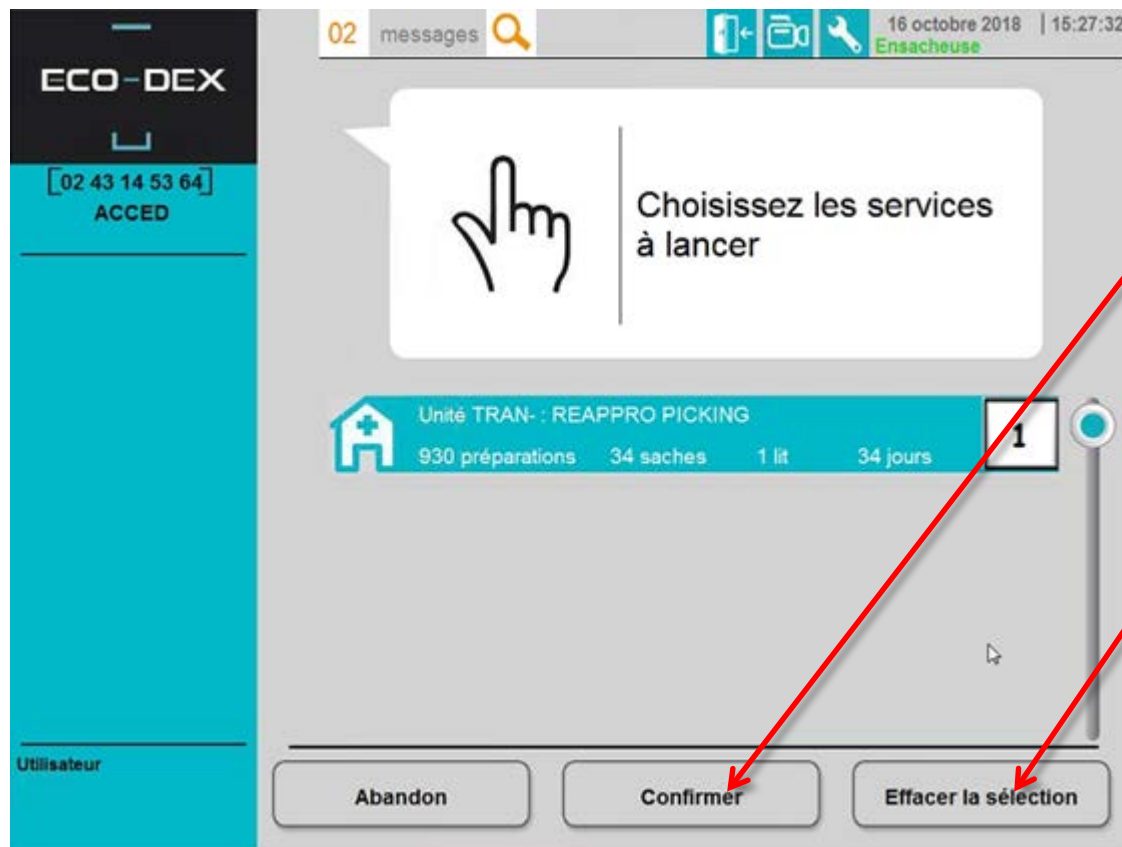

Confirmer



La confirmation lance la cueillette.

Effacer la sélection


En cas d'erreur sur l'ordre de lancement des services.



Cycle cueillette en saché de regroupement

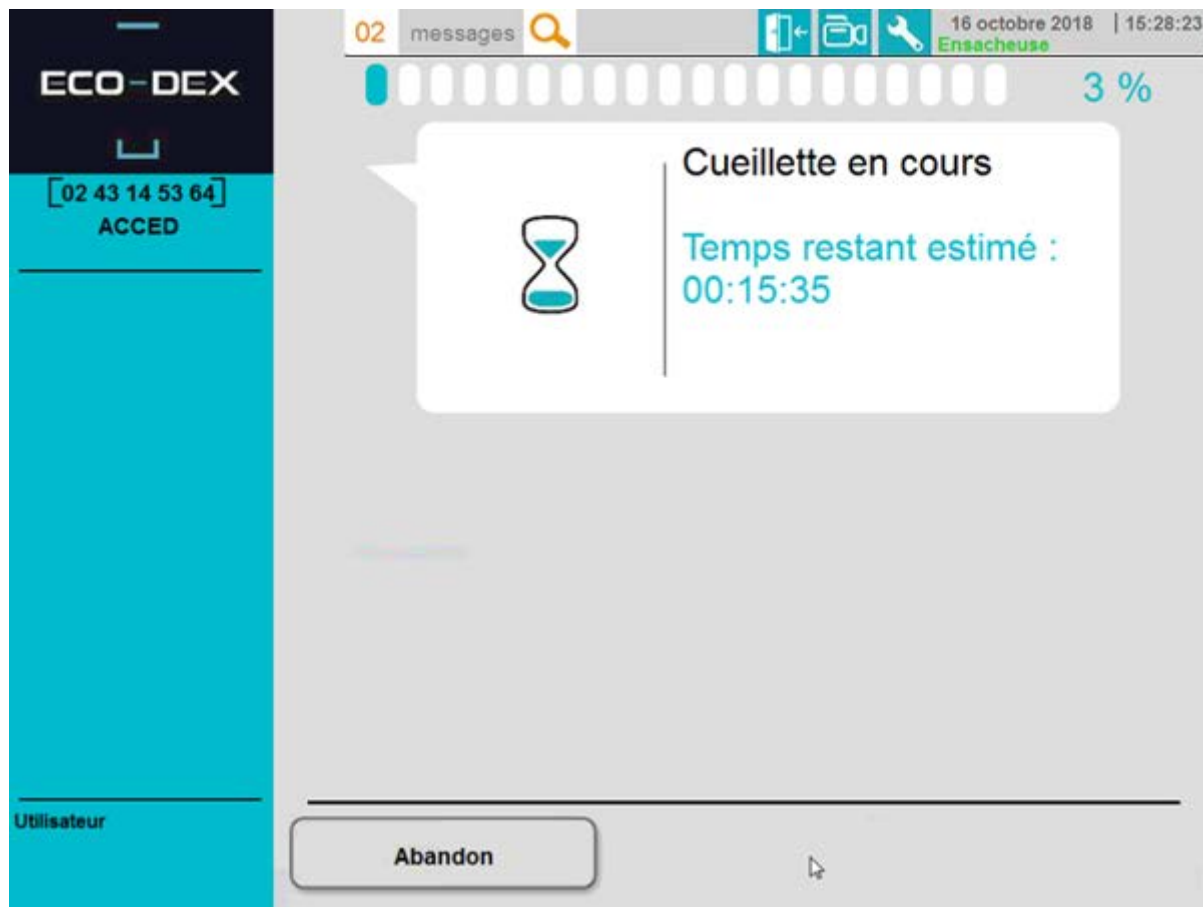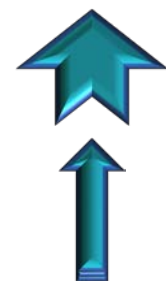

Après confirmation, la cueillette sera faite dans l'ordre de sélection.

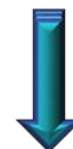

Cycle cueillette en sachet de regroupement




- Chaque sachet contient la dispensation pour un seul patient et celle-ci est imprimée directement sur la sachet de regroupement.





Fonctionnement du module de cueillette



03.G – Cycle cueillette en sortie globale et validation

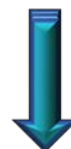

Cycle cueillette en sortie globale et validation

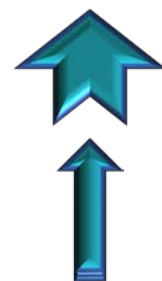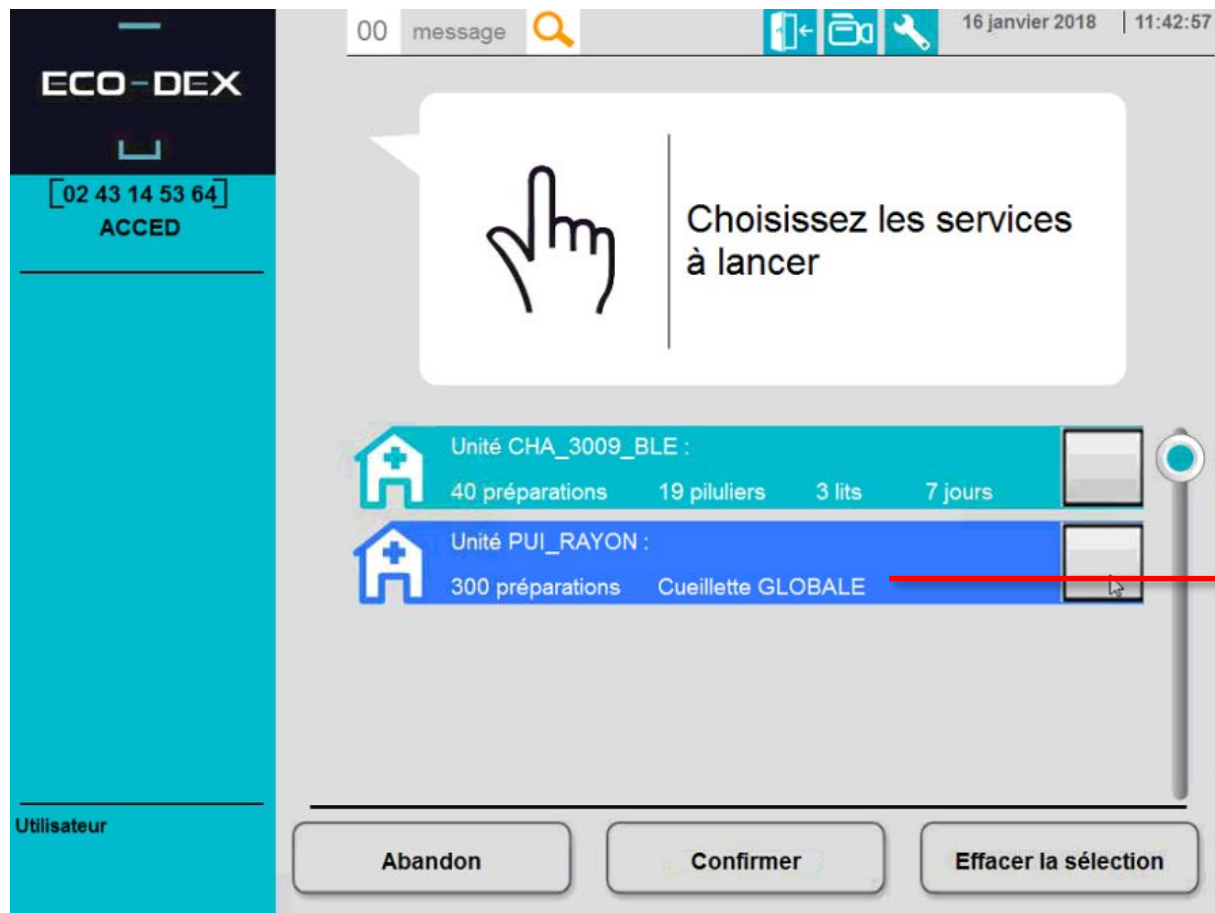The screenshot shows the ECO-DEX interface. At the top, there's a header with 'ECO-DEX' and a status bar with '00 message', a search icon, and icons for a phone, a camera, and a wrench. The date and time are '16 janvier 2018' and '11:42:57'. Below the header, there's a large white box with a hand icon and the text 'Choisissez les services à lancer'. Below this, there are two rows of service selection. The first row is for 'Unité CHA_3009_BLE' with '40 préparations', '19 piluliers', '3 lits', and '7 jours'. The second row is for 'Unité PUI_RAYON' with '300 préparations' and 'Cueillette GLOBALE'. A red arrow points from the 'Cueillette GLOBALE' text to a blue button labeled 'Cueillette GLOBALE'. At the bottom, there are three buttons: 'Abandon', 'Confirmer', and 'Effacer la sélection'. The left sidebar shows 'ECO-DEX' and a phone number '[02 43 14 53 64]' with 'ACCED' below it. The bottom left corner says 'Utilisateur'.

Les sorties globales se présentent de la même façon que les cueillettes normales.

A ceci prêt :

Cueillette GLOBALE




Cycle cueillette en sortie globale et validation



Avant de lancer une cueillette globale il faut comme pour une cueillette normale :

- Vérifier le facing des boites PASS
- Vérifier les emplacements bloqués
- Vérifier les taquins

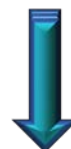


Cycle cueillette en sortie globale et validation




Il est surtout important de mettre des boites PASS vides à l'emplacement dit de retour produits.

En effet ces boites seront utilisées pour les sorties globales.

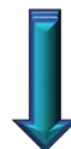


Cycle cueillette en sortie globale et validation

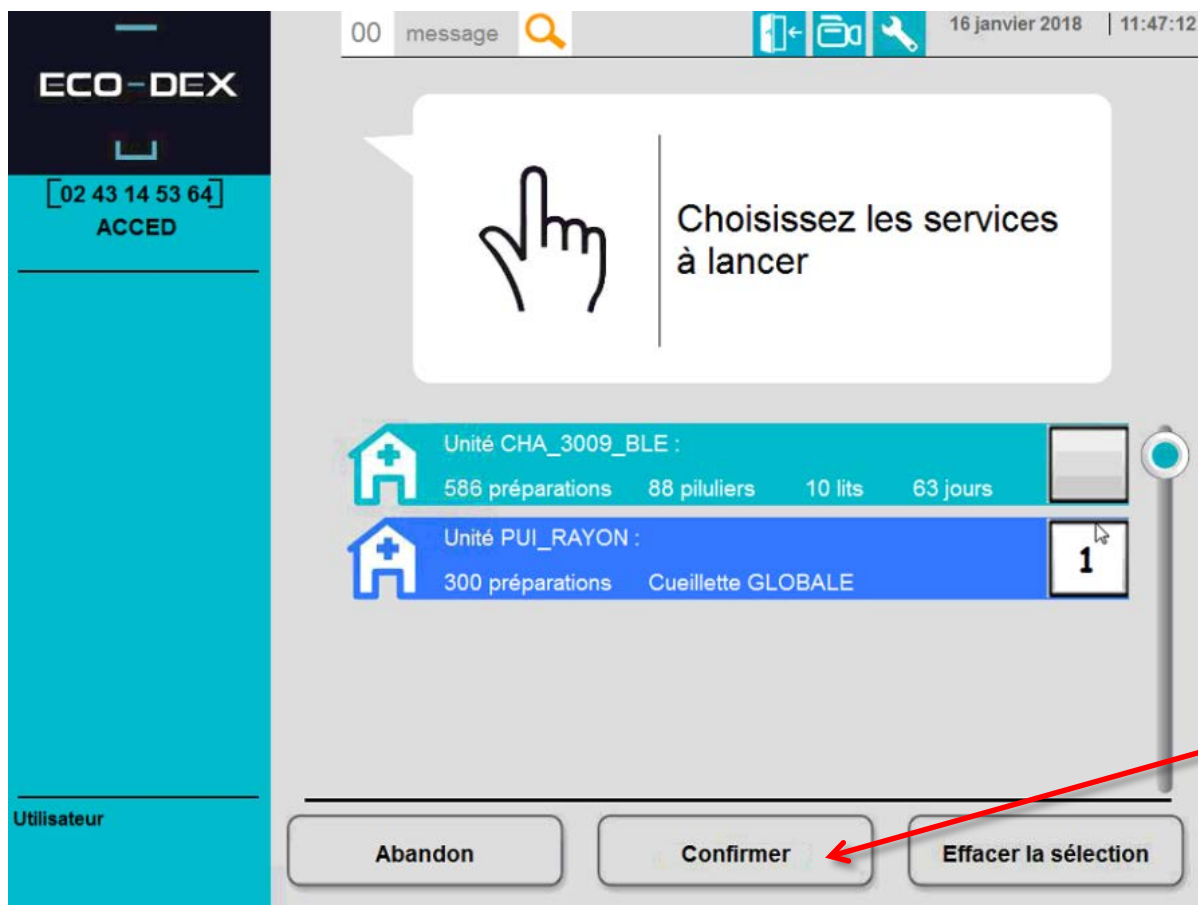

Après avoir placé les boîtes PASS vides :


- Fermer la porte.
- Appuyer sur la ligne de la sortie globale à effectuer.
- Puis cliquer sur « Confirmer ».

Cycle cueillette en sortie globale et validation

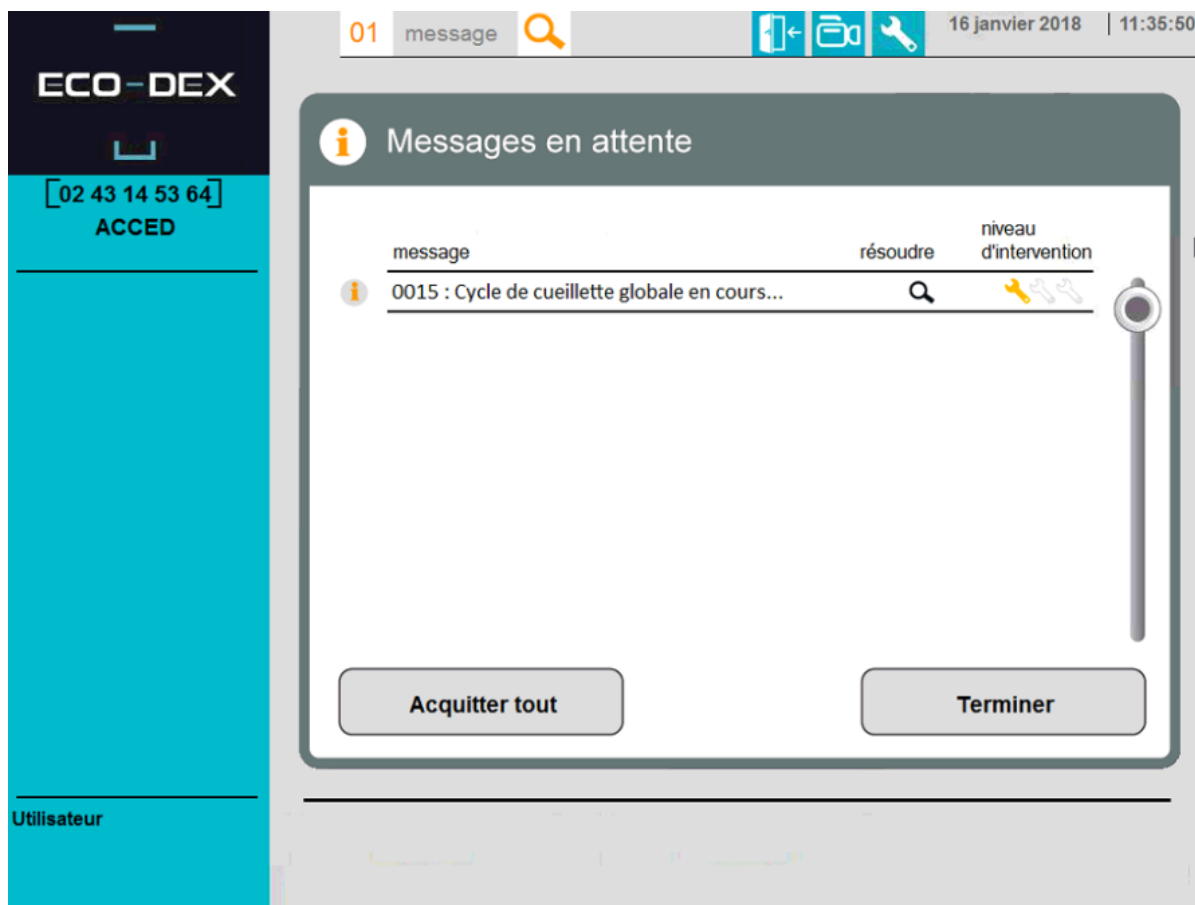

Pendant une sortie globale, le message suivant est inscrit dans le menu message.


Cycle cueillette en sortie globale et validation

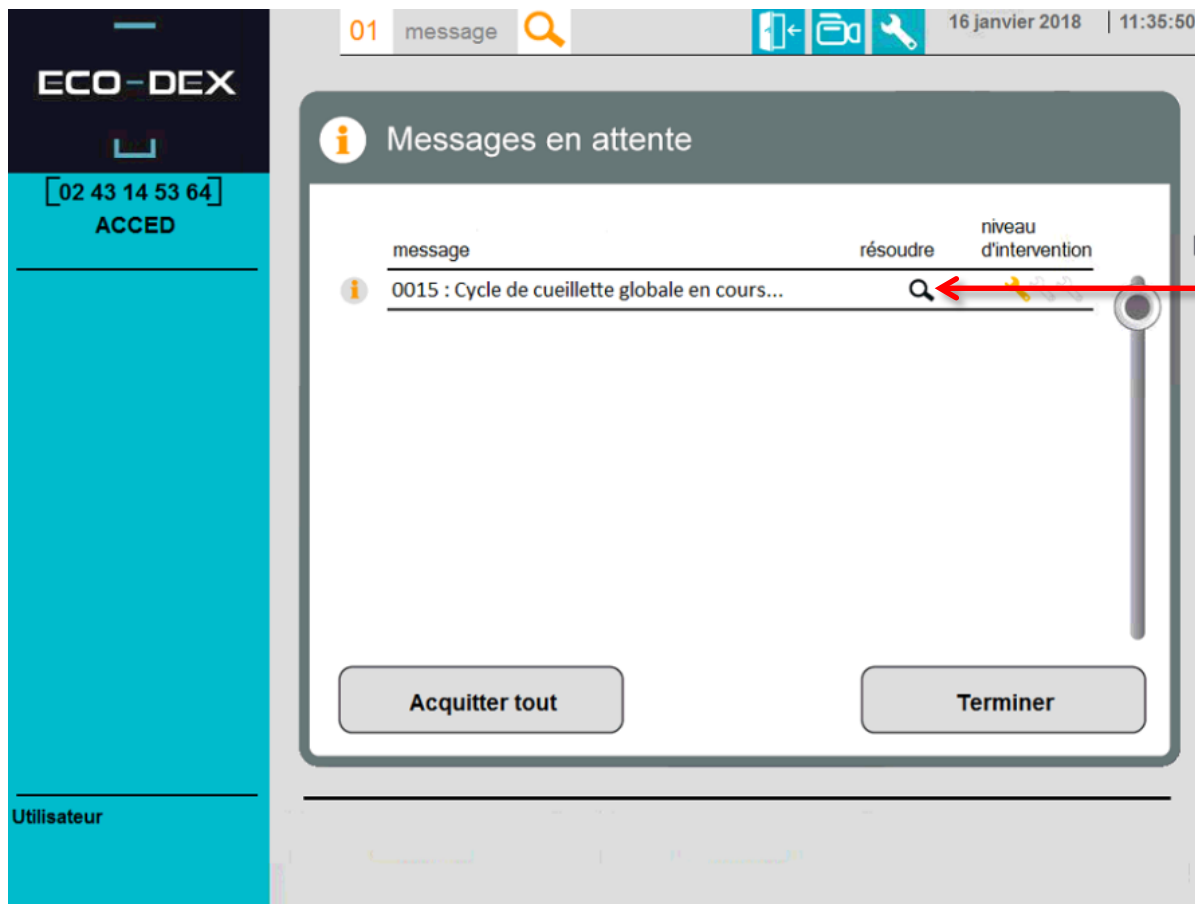

Cliquer sur la loupe, pour afficher le message et sur abandon dans celui-ci pour arrêter la sortie globale.

Abandon

Cycle cueillette en sortie globale et validation

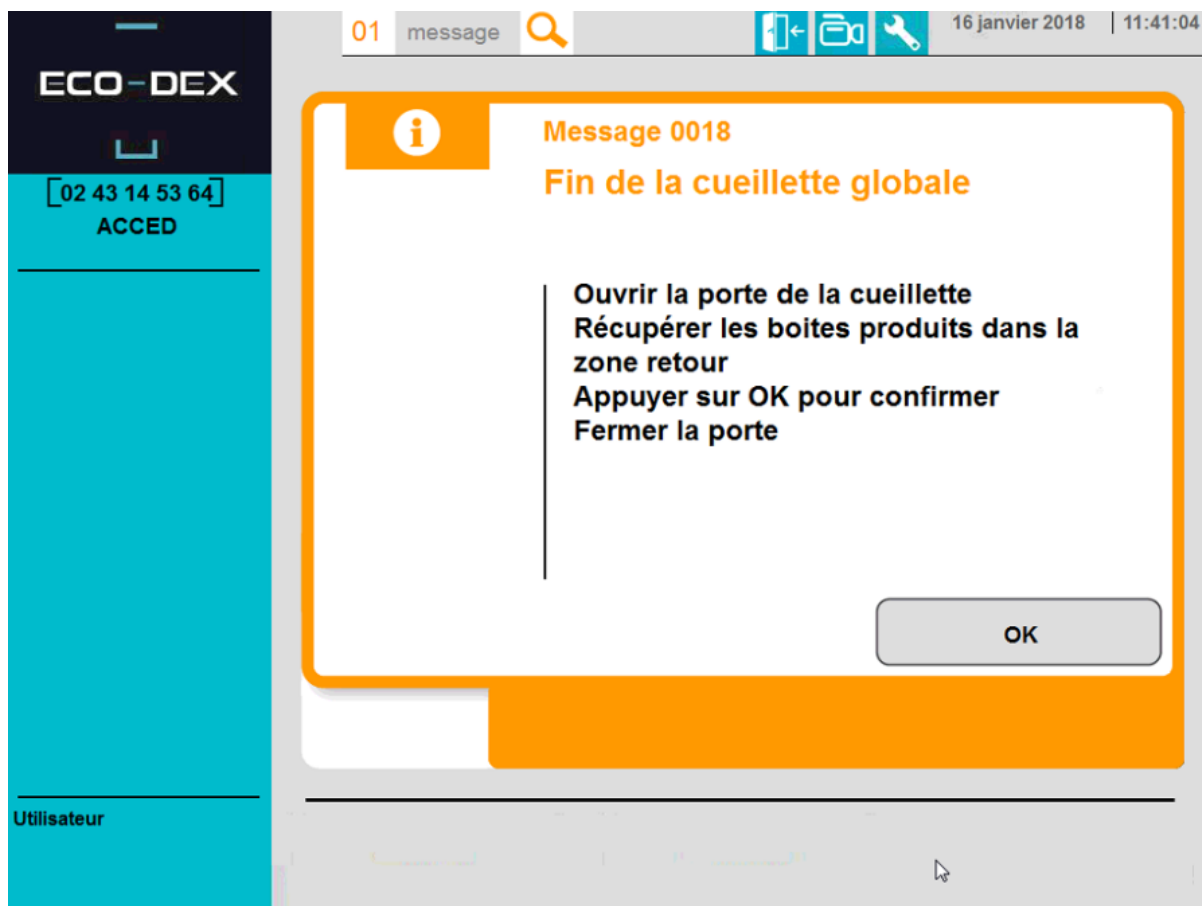

En fin de cueillette globale. Ce message vous invite à récupérer les boîtes produits dans la zone retour.

Confirmer la récupération des boîtes en appuyant sur OK.



Cycle cueillette en sortie globale et validation



The screenshot shows the ECO-DEX interface. At the top, there's a header with 'ECO-DEX' and a status bar with '00 message', a search icon, and navigation icons. Below the header, a teal bar displays '[02 43 14 53 64] ACCED'. The main area features a large white box with a hand icon and the text 'Choisissez les services à lancer'. Below this, a list of units is shown, each with a house icon, a name, and a selection box:

Unité	Préparations	Piluliers	Lits	Jours	Sélection
Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	1202	105	13	41	3
Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	4153	98	11	41	1
Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU	88	7	1	7	5
Unité PUI_RAYON : Cueillette GLOBALE	300				6


At the bottom, there are three buttons: 'Abandon', 'Confirmer', and 'Effacer la sélection'. The user 'Lionel Mohr' is logged in.

Remarque :

Lors d'une sélection multiple la sortie globale sera toujours faite en dernier.




Fonctionnement du module de cueillette

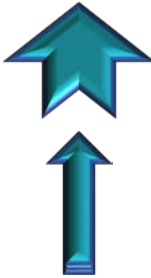

03.G – Cycle de retour produits




Cycle de retour produits

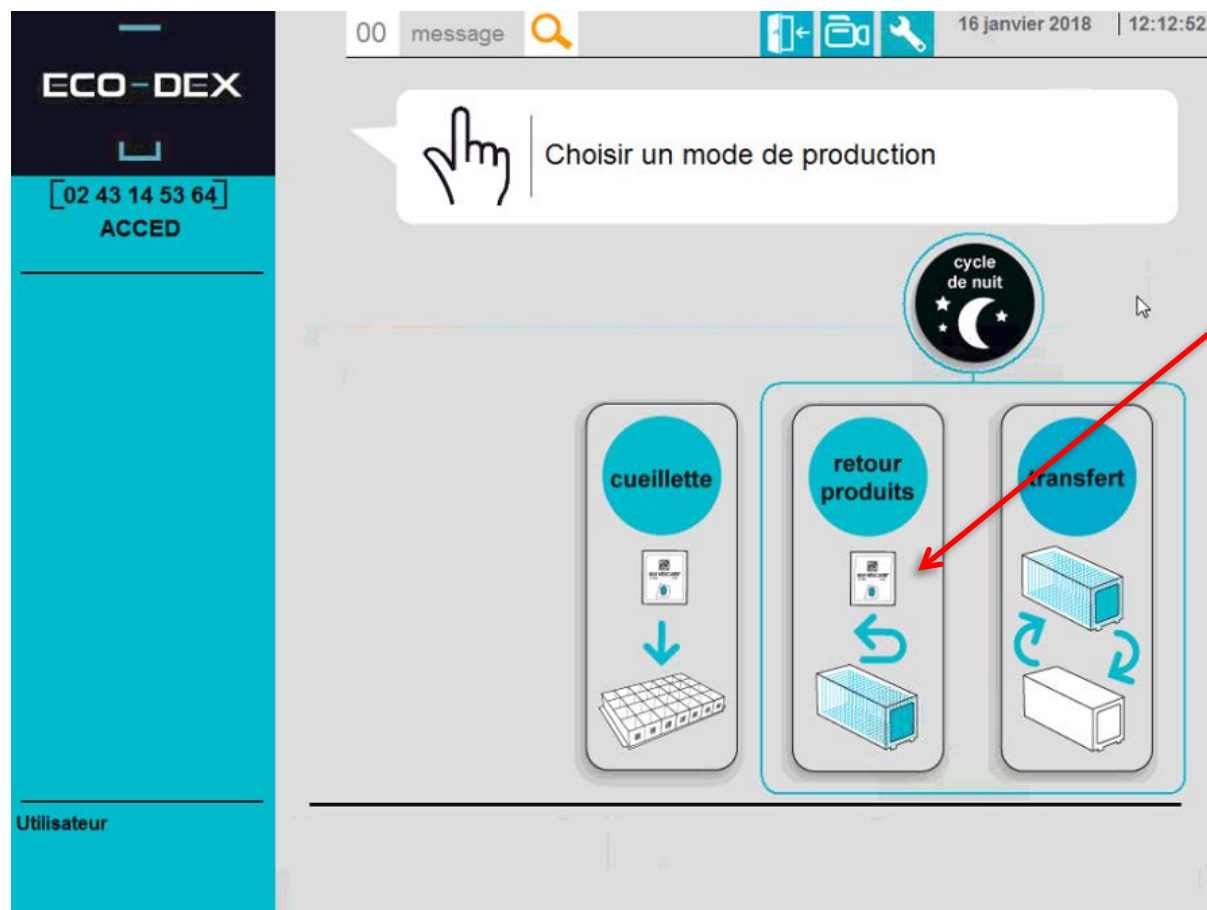

Appuyer sur « retour produits », pour lancer un rangement automatique des produits que l'on souhaite réintroduire dans l'automate.

Cycle de retour produits

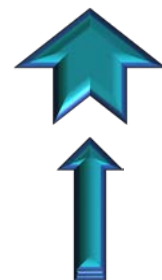


00 message

31 janvier 2018 | 16:25:25

ECO-DEX


[02 43 14 53 64]
ACCED

Identifiez vous :
scannez votre badge
ou saisissez votre code

Utilisateur

Abandon Code d'accès


S'identifier à l'aide du badge ou avec votre « code d'accès ».

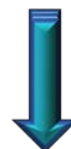

Cycle de retour produits



Cette fenêtre peut ne pas être active suivant vos paramètres Médian.

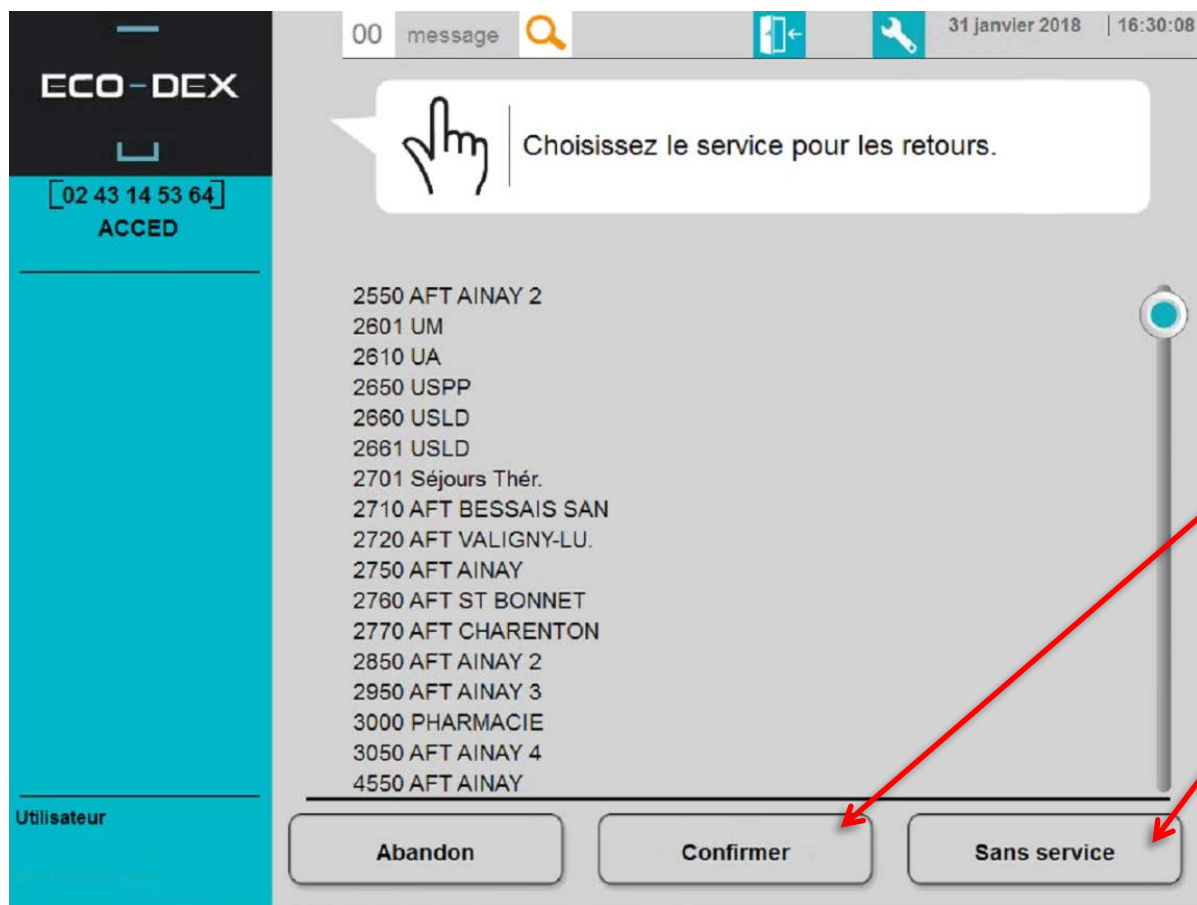

00 message 31 janvier 2018 | 16:30:08

Choisissez le service pour les retours.

- 2550 AFT AINAY 2
- 2601 UM
- 2610 UA
- 2650 USPP
- 2660 USLD
- 2661 USLD
- 2701 Séjours Thér.
- 2710 AFT BESSAIS SAN
- 2720 AFT VALIGNY-LU.
- 2750 AFT AINAY
- 2760 AFT ST BONNET
- 2770 AFT CHARENTON
- 2850 AFT AINAY 2
- 2950 AFT AINAY 3
- 3000 PHARMACIE
- 3050 AFT AINAY 4
- 4550 AFT AINAY



Abandon Confirmer Sans service

Sélectionner dans la liste le service assigné au retour produits, puis confirmer en appuyant sur le bouton.


Appuyer sur sans service pour une affectation automatique au stock.





Cycle de retour produits

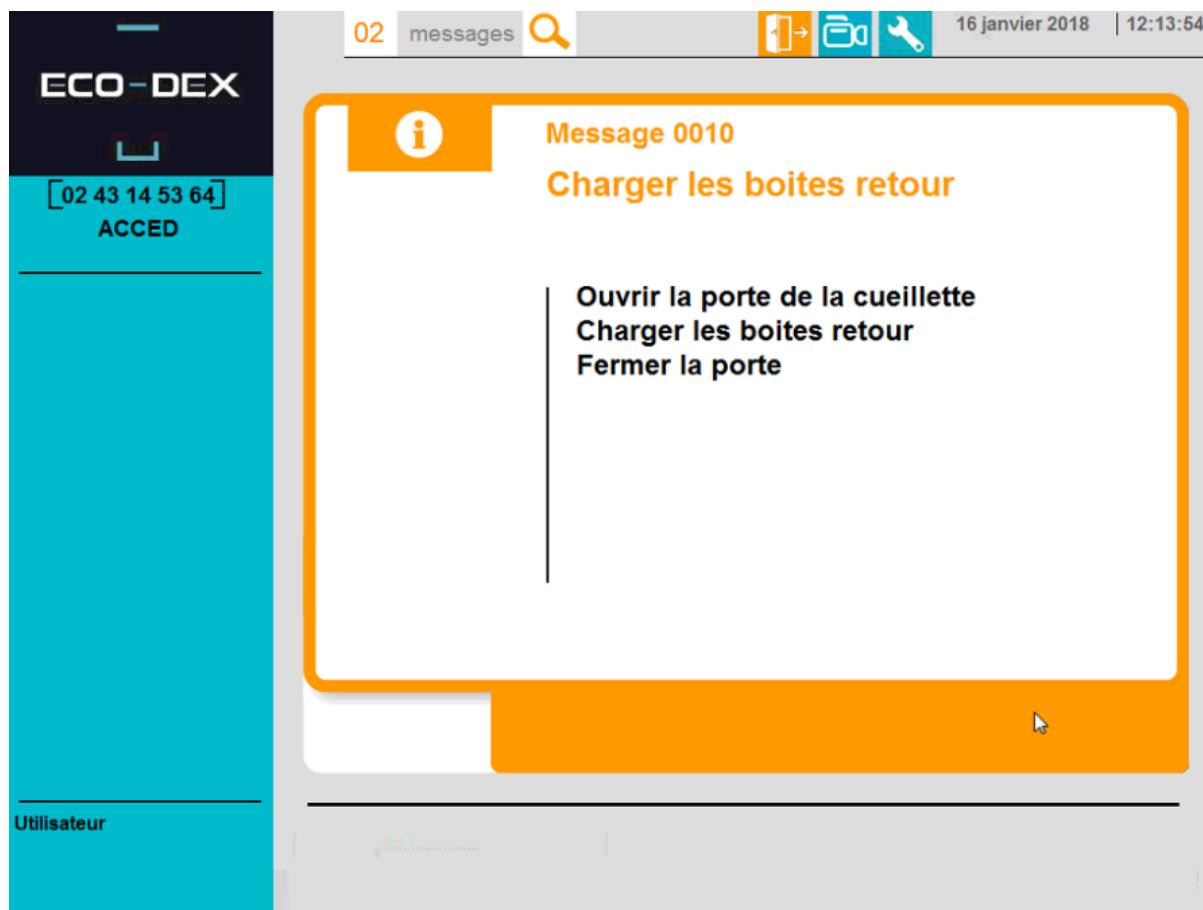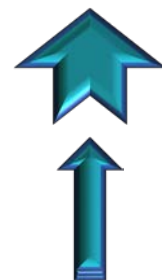

L'automate déverrouille la porte et propose de charger les boites PASS.

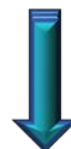

Cycle de retour produits

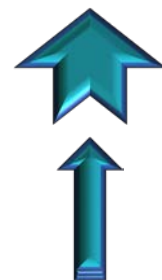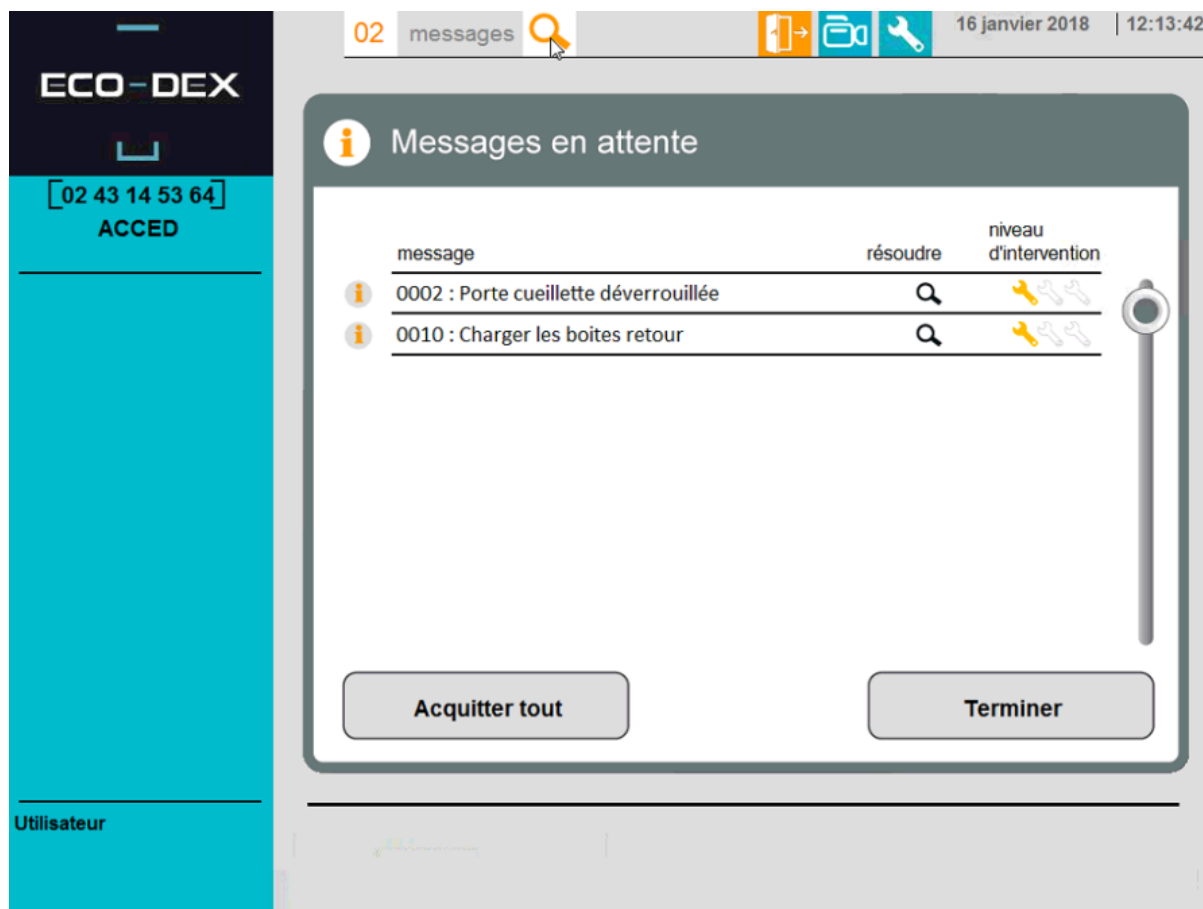



The screenshot shows the ECO-DEX interface with a sidebar on the left containing the logo and a user ID [02 43 14 53 64] with the status ACCED. The main area displays a 'Messages en attente' (Messages in progress) window. At the top of this window, there is a status bar with '02 messages' and a magnifying glass icon. Below this, a table lists the messages:

message	résoudre	niveau d'intervention
0002 : Porte cueillette déverrouillée		  
0010 : Charger les boîtes retour		  

At the bottom of the messages window, there are two buttons: 'Acquitter tout' (Acknowledge all) and 'Terminer' (End).



L'automate déverrouille la porte et propose de charger les boîtes PASS.

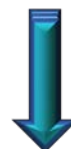


Cycle de retour produits



Il faut positionner les boites PASS de retour produits, préalablement chargées de doses unitaires, dans la zone appropriée.

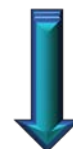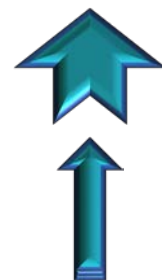


Cycle de retour produits

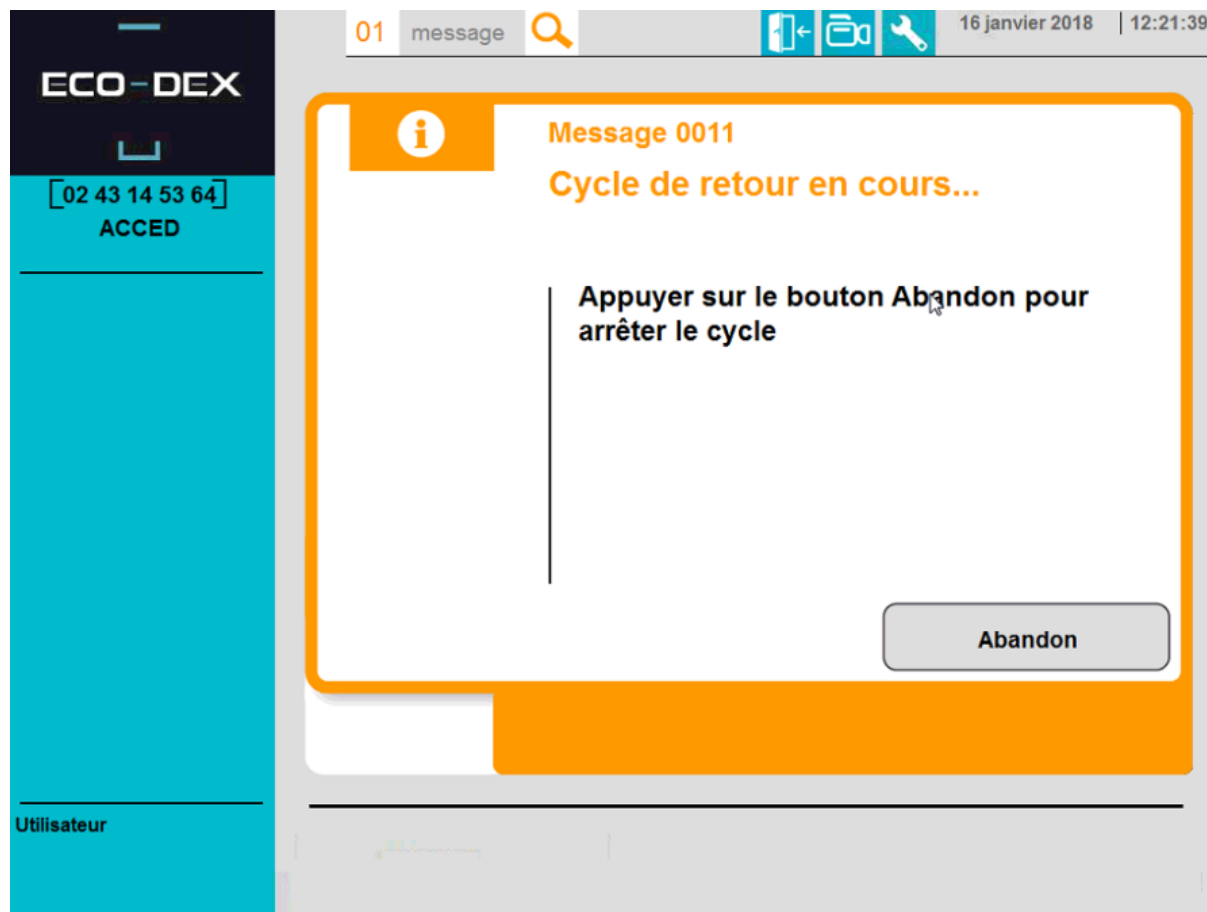

Le message suivant est alors affiché dans le menu message.


Cycle de retour produits

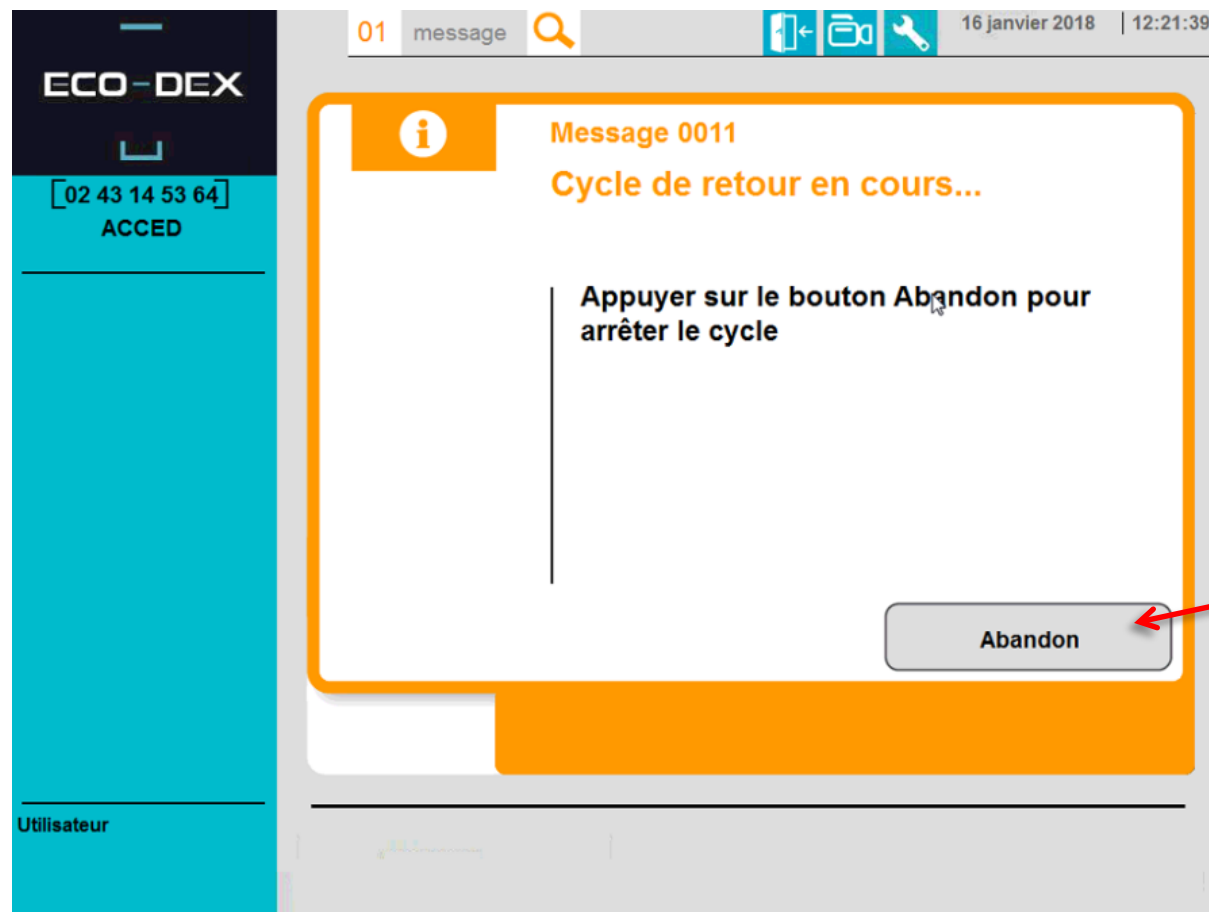


Il est possible à tout moment d'interrompre les retours, en appuyant sur « Abandon ».




Fonctionnement du module de cueillette

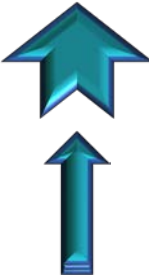


03.H – Cycle de transfert

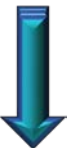


Cycle de transfert

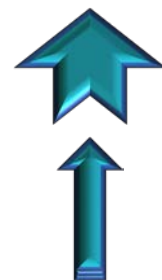

Le cycle de transfert ou réassort, permet de transférer les boîtes PASS contenant des doses unitaires, depuis les modules de coupe vers le ou les module(s) de cueillette.

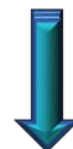

Cycle de transfert

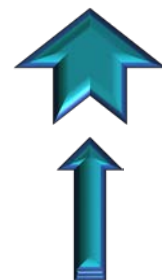


Avant de commencer :


Certaines vérifications sont à effectuer pour lancer un cycle de transfert :

- Vérifier les taquins (voir DDF03H). (facultatif)
- Vérifier que le(s) module(s) de coupe sont disponibles (rien en cours).
- Vérifier le facing des boites PASS des modules de coupe.

Si le “cycle de transfert” concerne la ligne de cueillette 200, il faut bien vérifier qu’il n’y a rien en cours sur les deux.

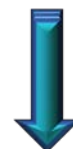



Cycle de transfert

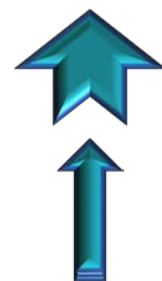



Avant de commencer pour les ACCED à plusieurs modules de coupe :

Il faut également vérifier que les différents modules de coupe sont bien associés aux cueillettes.

Pour cela appuyer sur "Magasins", dans Gestion.

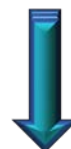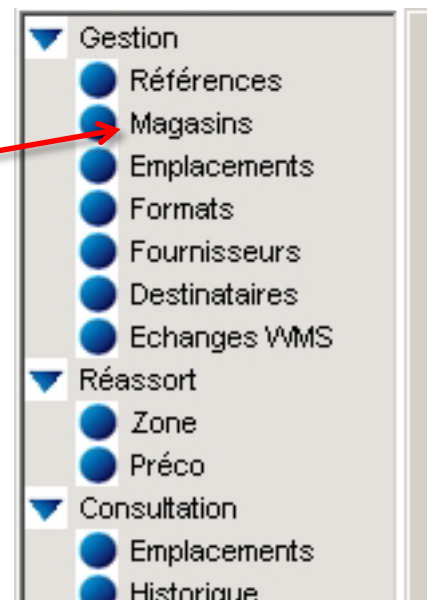

Cycle de transfert

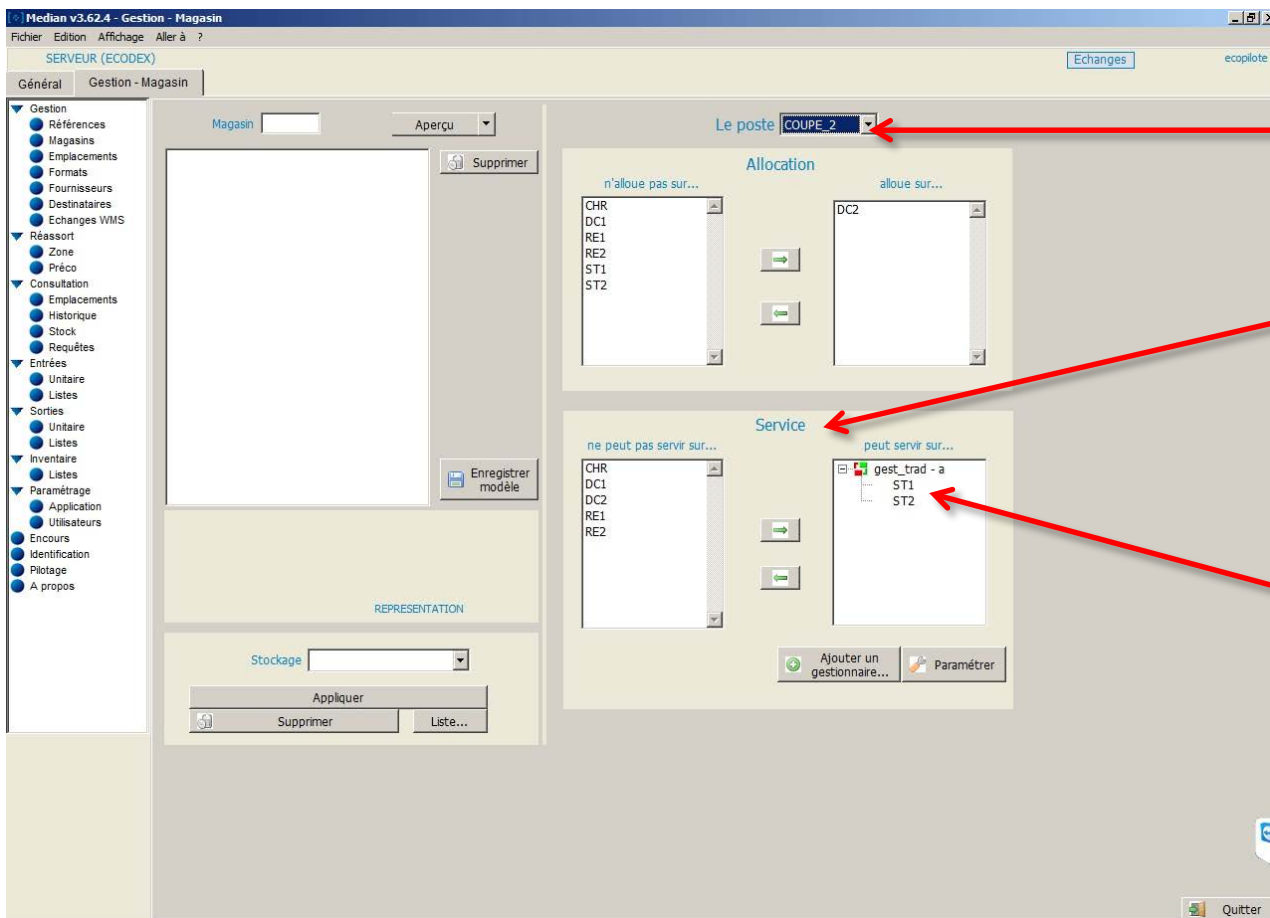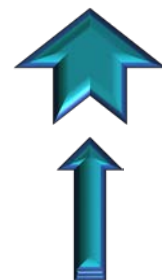


Choisir le module de coupe dans **le poste**.

Vérifier dans **"Service"**.


Que le module de coupe **"peut servir sur ..."**.

Cueillette 100 = ST1
Cueillette 200 = ST2


L'enregistrement est automatique.

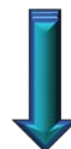



Cycle de transfert

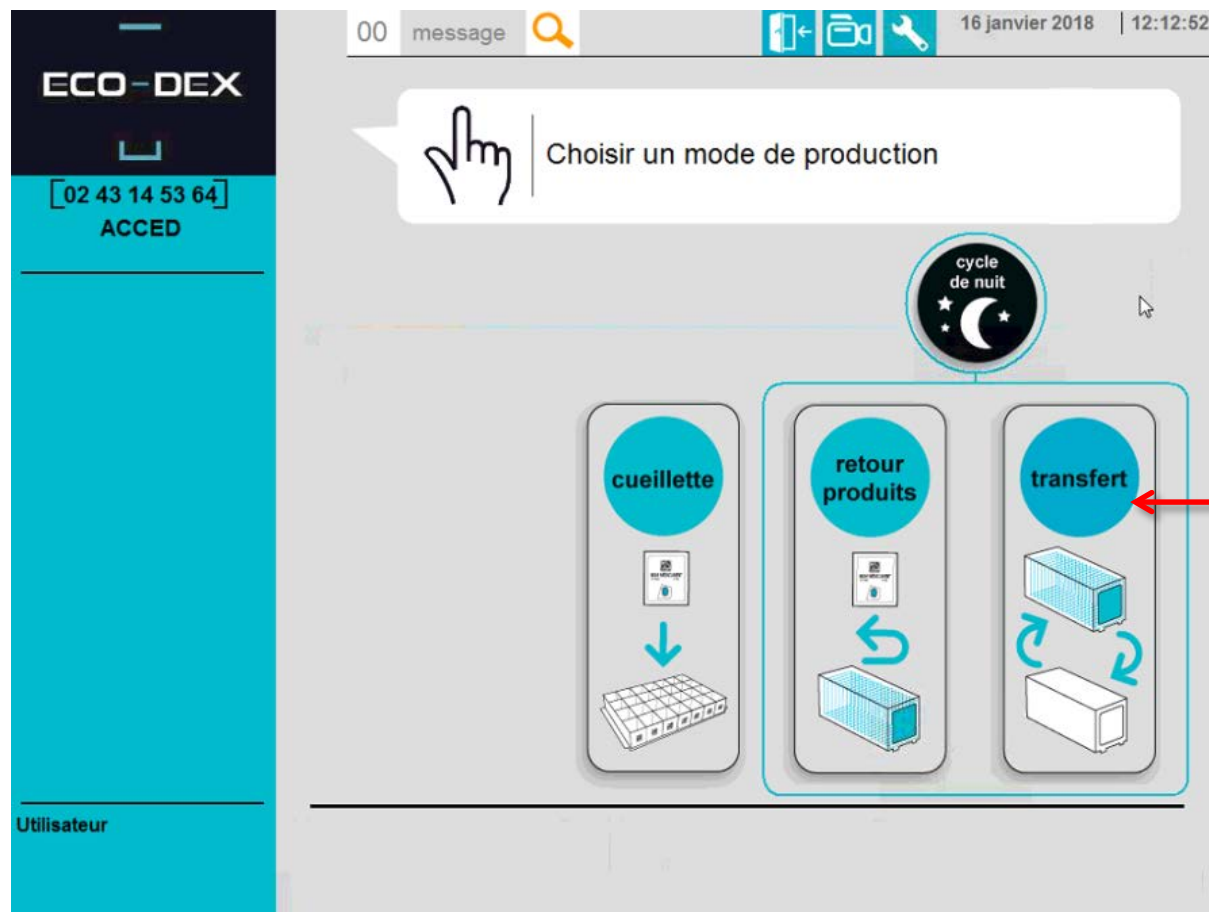


Le lancement du cycle de transfert se fait depuis le bouton « transfert »

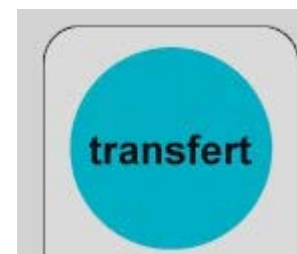


Cycle de transfert

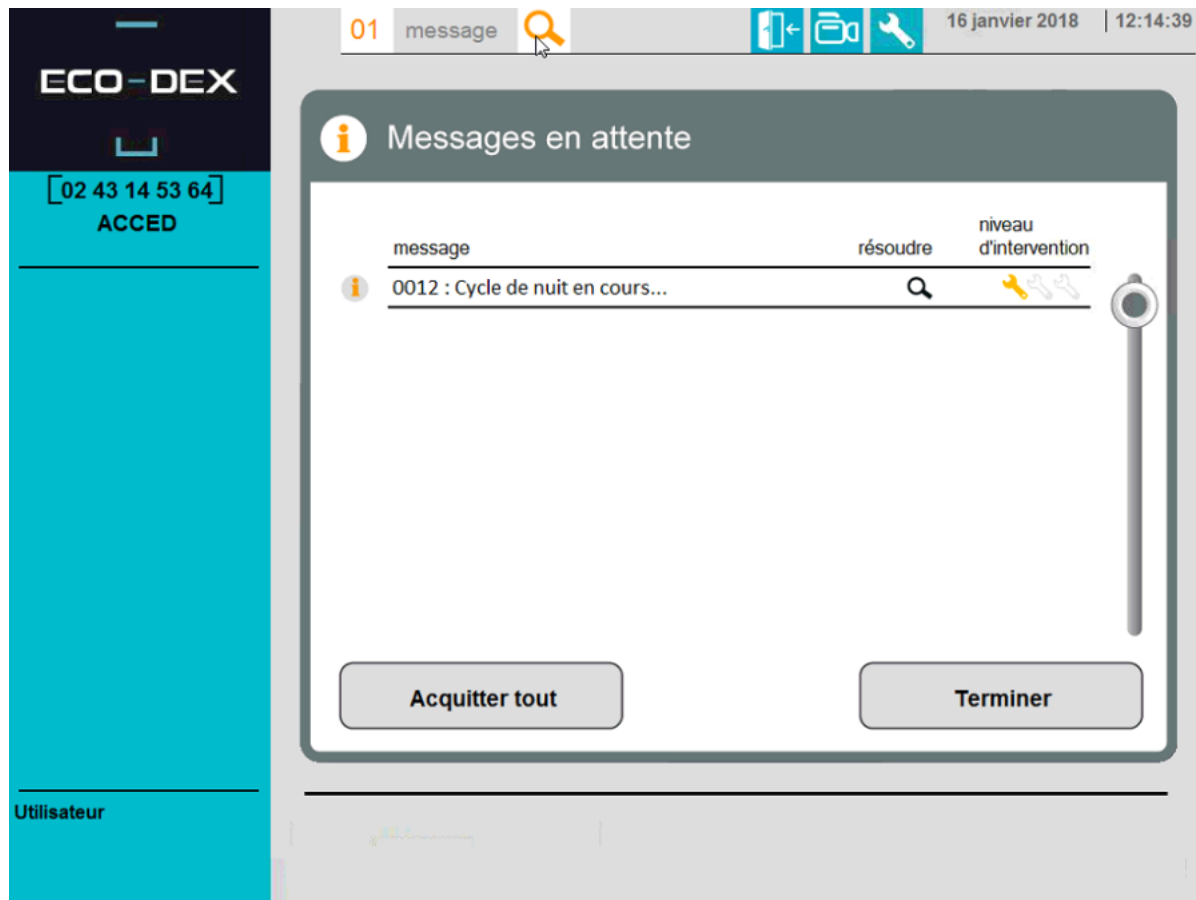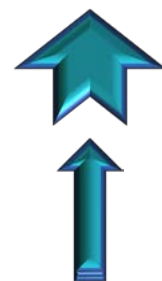

Sur les écrans des modules de coupe, le message suivant apparaît.

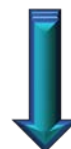

Cycle de transfert

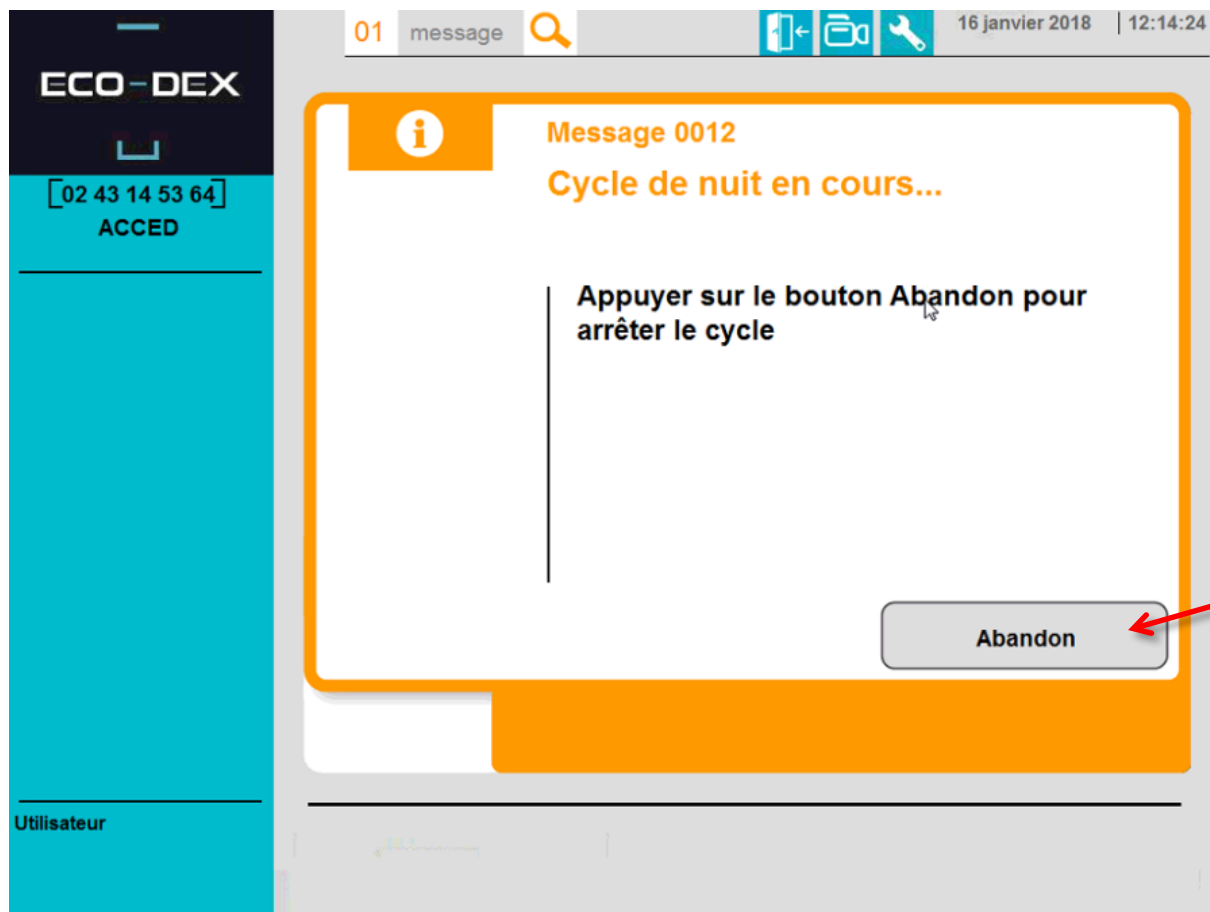


Pour annuler ou arrêter le cycle de transfert, il suffit d'ouvrir le message et d'appuyer sur « Abandon ».




Fonctionnement du module de cueillette



03.1 – Cycle de nuit

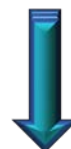

Cycle de nuit

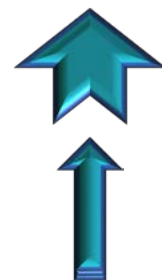

Le cycle de nuit, permet de transférer les boites PASS contenant des doses unitaires, depuis les modules de coupe vers le ou les module(s) de cueillette.

Un enchainement de cycle peut alors avoir lieu, suivant votre programmation.


Ordre de programmation :

Appuyer sur cycle de nuit -> choix du ou des service(s) à cueillir -> choix du service de retour produits -> validation. Et lancement d'un cycle de coupe.


Ordre du cycle de nuit :

Cueillette du ou des service(s) -> transfert coupe(s) vers cueillette(s) -> retours produits.

Le cycle de coupe sera alors lancé en même temps que le retours produits.

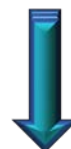


Cycle de nuit

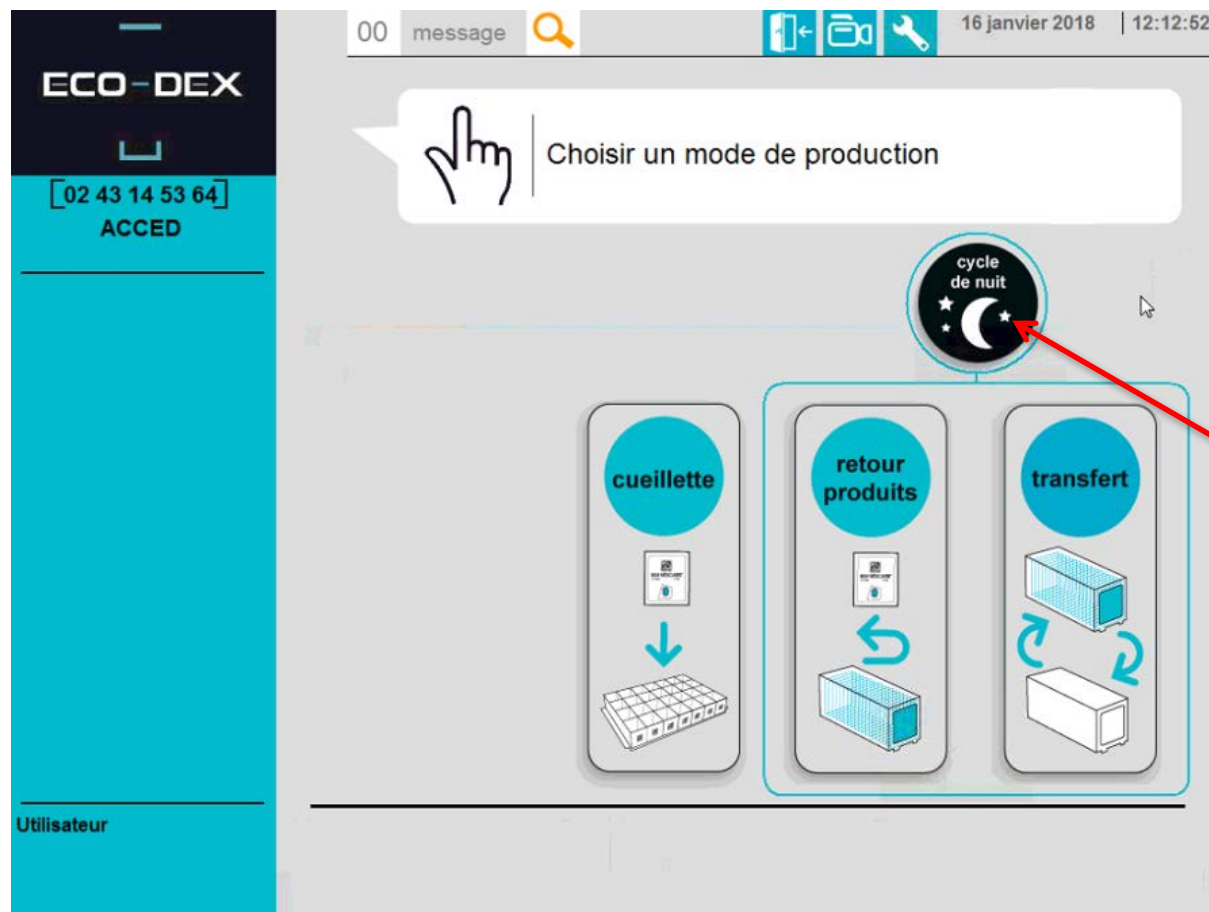

Le lancement du cycle de nuit se fait depuis le bouton « cycle de nuit »



Cycle de nuit

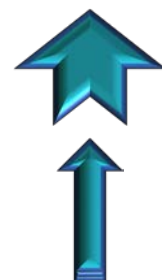

ECO-DEX

[02 43 14 53 64]

ACCED

00 message

16 janvier 2018 | 12:02:57



Choisissez les services à lancer

Unité CHA_2361_VER : C_SSRR_VER	346 préparations	14 piluliers	2 lits	11 jours	4
Unité CHA_3009_BLE :	1062 préparations	99 piluliers	10 lits	96 jours	2
Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	1202 préparations	105 piluliers	13 lits	41 jours	3
Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	4153 préparations	98 piluliers	11 lits	41 jours	1


Abandon

Confirmer

Effacer la sélection

Utilisateur
Lionel Mohr


Sélectionner l'ordre des services à lancer, puis confirmer.

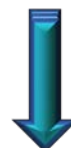

Cycle de nuit



Cette fenêtre peut ne pas être active suivant vos paramètres Médian.

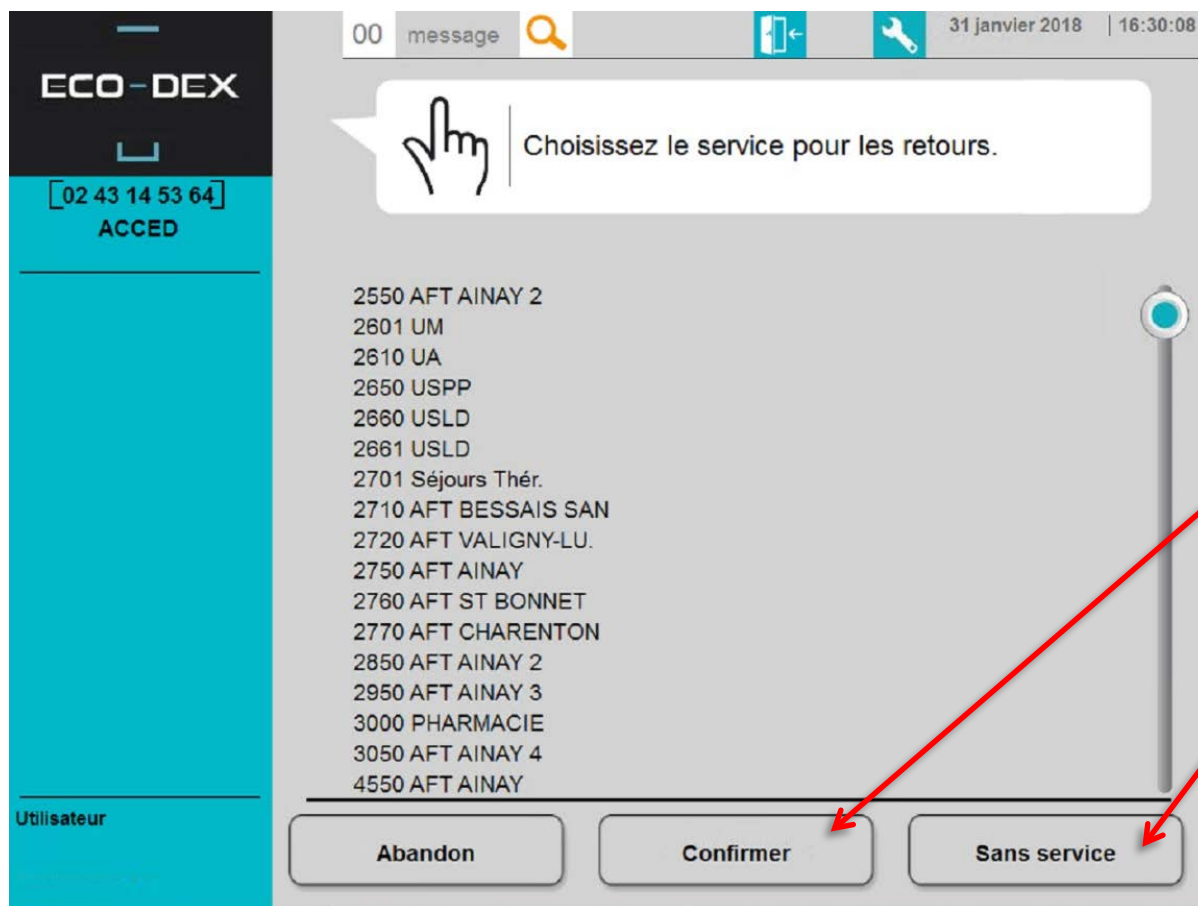

00 message

31 janvier 2018 | 16:30:08

Choisissez le service pour les retours.

- 2550 AFT AINAY 2
- 2601 UM
- 2610 UA
- 2650 USPP
- 2660 USLD
- 2661 USLD
- 2701 Séjours Thér.
- 2710 AFT BESSAIS SAN
- 2720 AFT VALIGNY-LU.
- 2750 AFT AINAY
- 2760 AFT ST BONNET
- 2770 AFT CHARENTON
- 2850 AFT AINAY 2
- 2950 AFT AINAY 3
- 3000 PHARMACIE
- 3050 AFT AINAY 4
- 4550 AFT AINAY



Abandon Confirmer Sans service

Sélectionner dans la liste le service assigné au retour produits, puis confirmer en appuyant sur le bouton.


Appuyer sur sans service pour une affectation automatique au stock.




Cycle de retour produits

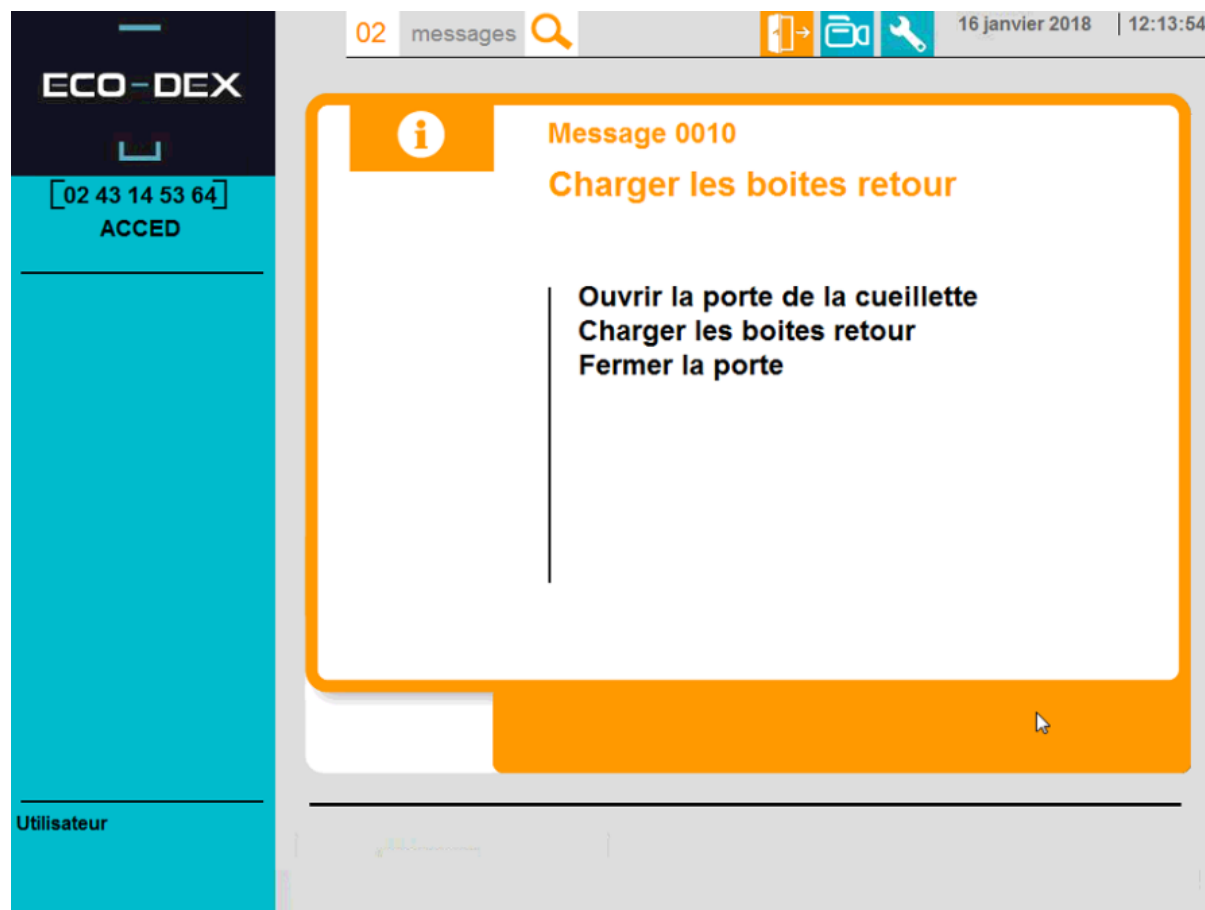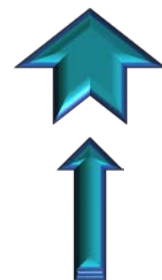

L'automate déverrouille la porte et propose de charger les boites PASS.

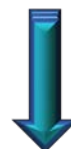


Cycle de nuit

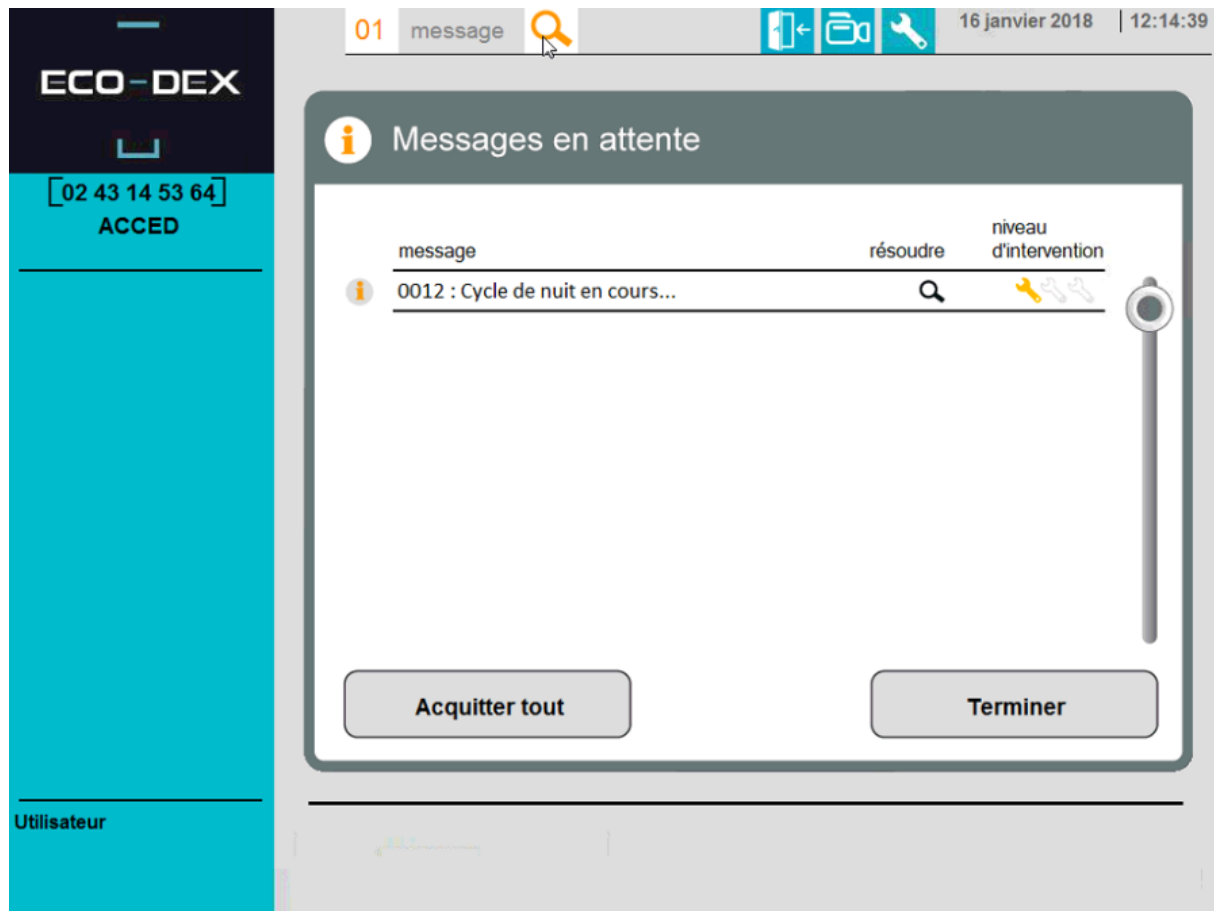

Sur les écrans des modules de cueillette, le message suivant apparaît.


Cycle de nuit

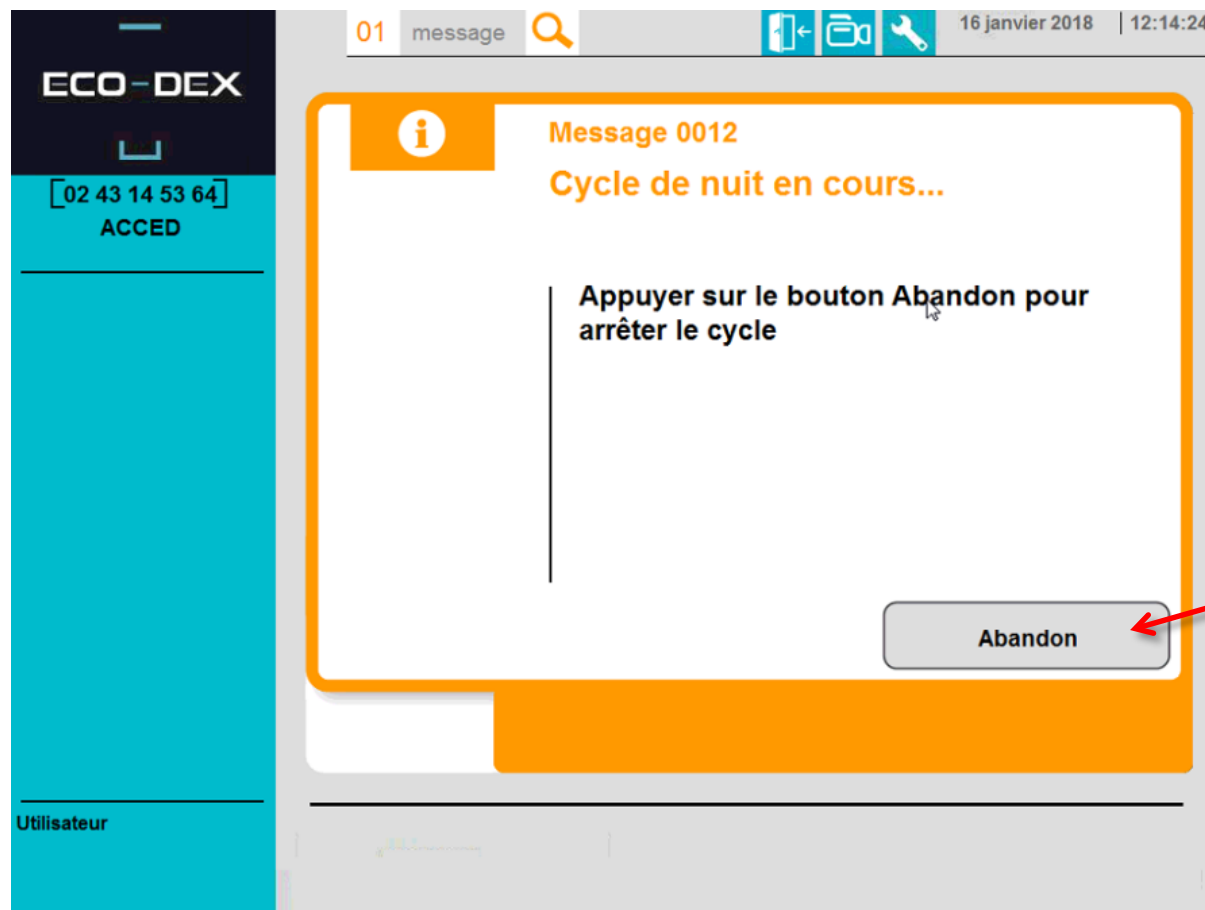

Pour annuler ou arrêter le cycle de nuit, il suffit d'ouvrir le message et d'appuyer sur « Abandon ».



Changement consommable du module de cueillette

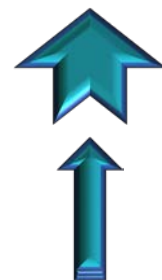

03.J – Ticket imprimante



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.



Ticket imprimante

soir	jeu 20/07
AMISULPRIDE 400MG COMPRIME (SOLIAN)	2 / 2
CNO BOISSON LACTEE HPHC SS LACTOSE (FRESUBIN 2 KCAL FIBRES)	0 / 1
DIVALPROATE SODIUM 500MG COMPRIME (DEPAKOTE)	2 / 2
FLUINDIONE 20MG COMPRIME (PREVISCAN)	0,75 /
LAXATIF OSMOTIQ LACTULOSE STICK	0 / 1
BUV 10G (DUPHALAC)	
SOLIFENACINE 5MG COMPRIME (VESICARE)	1 / 1
TRIHENYPHENIDYLE L.P. 5MG GELULE (PARKINANE RD 5)	1 / 1
coucher	
ZOPICLONE COMPRIME 7.5MG (IMOVANE)	1 / 1

2601 - UM

Né(e) le : XXXXXXXXXX

ordonnance : 44427 20/07/2017

ipp : XXXXXXXXXX

pilulier : 403100249

Le ticket imprimante sert après la validation du pilulier à son identification.

On y retrouve :

- les informations patient :
 - nom
 - IPP
 - le service
 - la chambre
- l'identification du pilulier
- Le contenu du pilulier
- Et le complément (**en gras**)
- Ainsi que la(les) date(s) de dispensation(s).

(Les informations présentes sur le ticket sont en fonction de chaque site).

- Un code barre peut être afficher si besoin.



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Ticket imprimante


Les imprimantes sont situées dans le module de cueillette, sur le début du stock de droite à l'entrée.



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Ticket imprimante

Votre imprimante

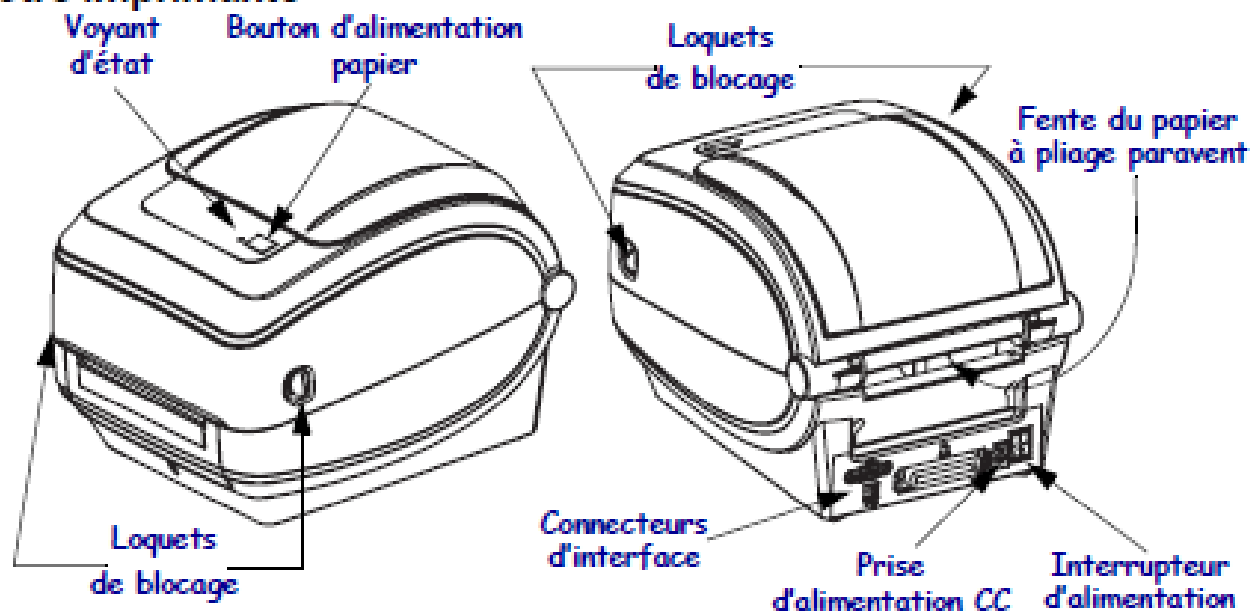

Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Ticket imprimante



Ouverture de l'imprimante

Vous devez ouvrir l'imprimante pour accéder au compartiment de papier. Tirez les loquets de blocage dans votre direction et levez le couvercle. Assurez-vous qu'aucun composant ne s'est détaché ou n'est endommagé dans le compartiment de papier.



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.


Ticket imprimante

Préparation du papier

Le rouleau de papier doit toujours être chargé dans l'imprimante de la même manière, qu'il soit enroulé vers l'intérieur ou l'extérieur.


- Retirez la longueur extérieure de papier. En effet, pendant son transport, sa manipulation ou son stockage, le rouleau peut avoir accumulé de la saleté ou de la poussière.

En retirant la longueur extérieure de papier, vous évitez d'entraîner de la matière adhésive ou du papier sale entre la tête d'impression et le contre-rouleau.

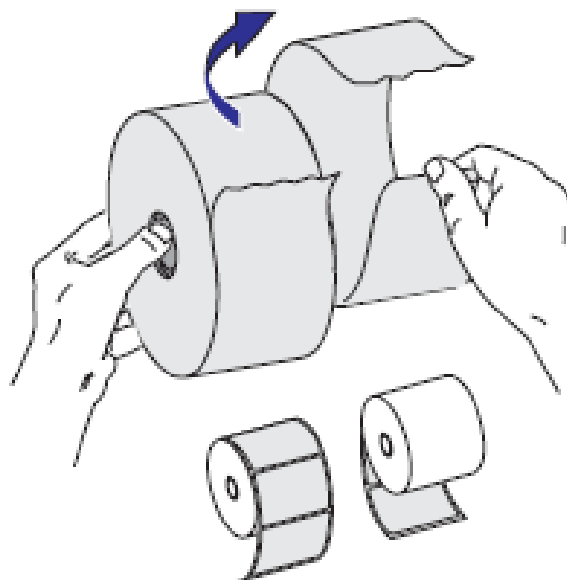

Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Ticket imprimante

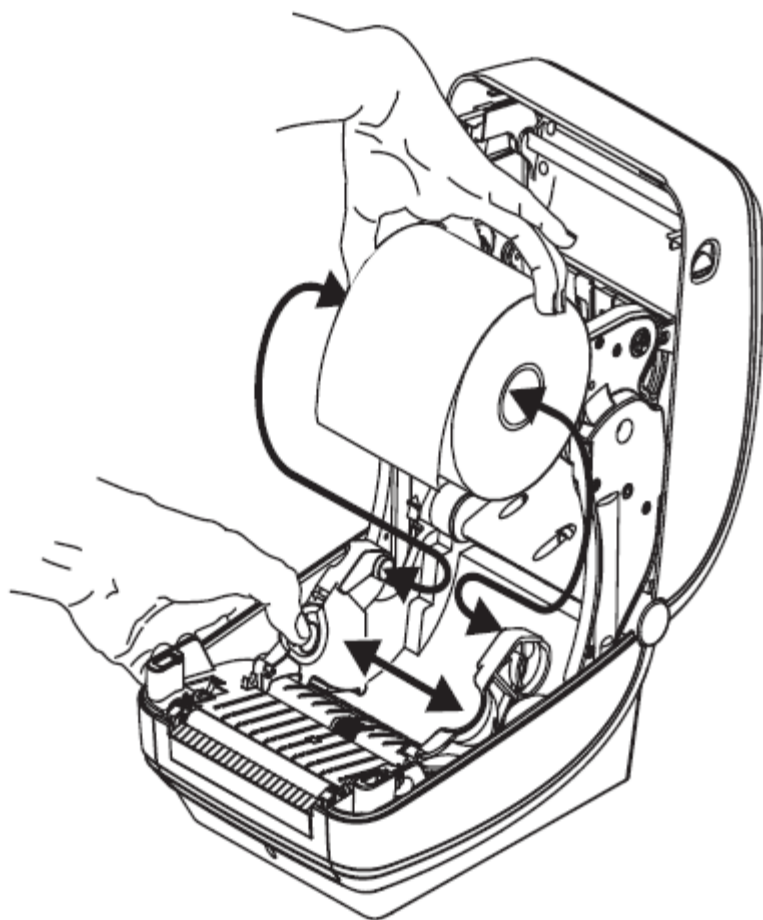

Placement du rouleau dans le compartiment papier

- Ouvrez les supports des rouleaux.
- Tirez sur les guides de papier avec votre main libre pour les ouvrir, puis placez le rouleau de papier sur les supports et relâchez les guides.
- Orientez le rouleau de papier de telle sorte que sa surface imprimable soit dirigée vers le haut lorsqu'elle passe sur le contre-rouleau (d'entraînement).






Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Ticket imprimante

Tirez sur le papier pour en dérouler une longueur à l'avant de l'imprimante. Assurez-vous que le rouleau tourne librement.

Le rouleau ne doit pas être posé au fond du compartiment papier.

Assurez-vous que la surface imprimable du papier est orientée vers le haut.

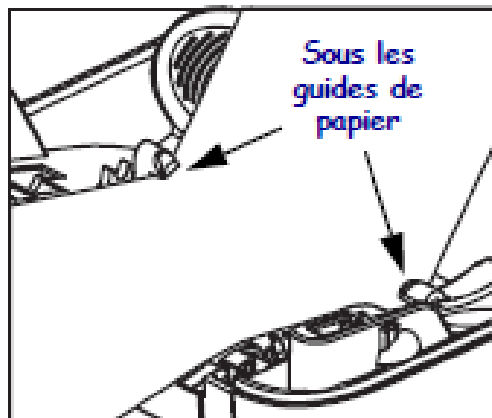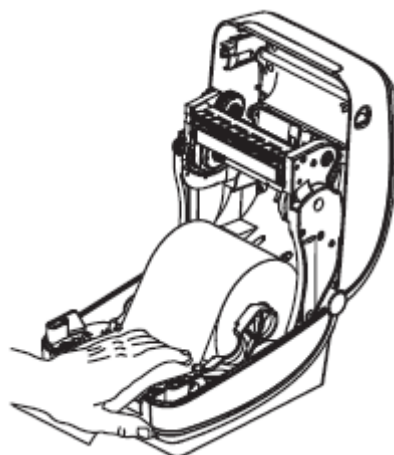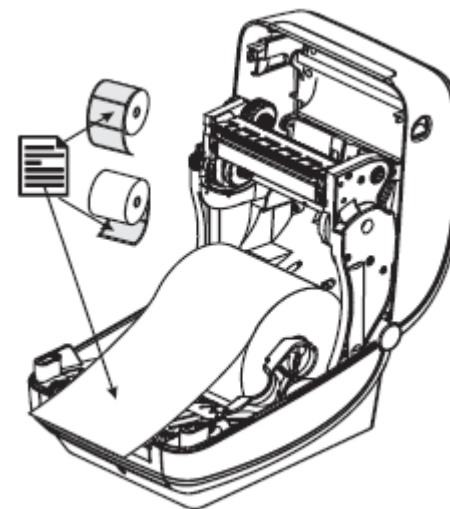


Poussez le papier sous les deux guides de papier.




Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Ticket imprimante

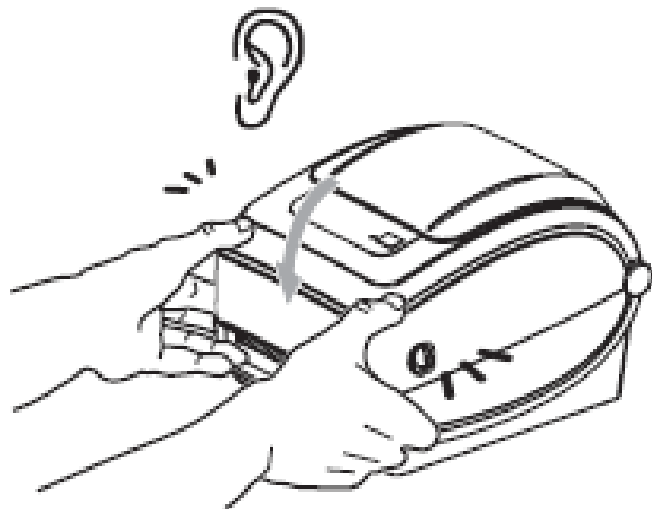

Appuyez pour fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Appuyez sur le bouton d'alimentation papier pour faire sortir un premier ticket.

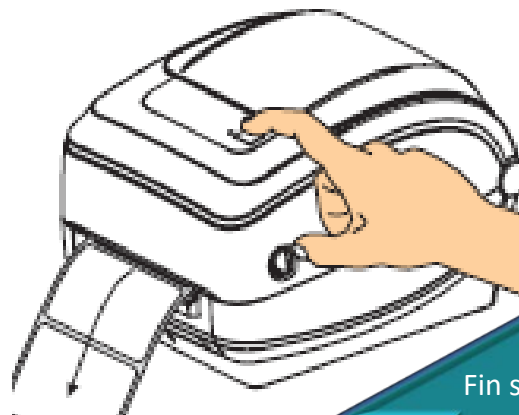


Fin sous-Module
Retour
sommaire



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

Entretien du module de cueillette

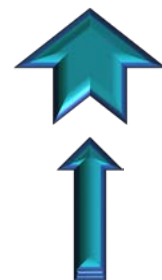


03.K – Entretien du module



Entretien du module

Avant d'entrer dans le module de cueillette toujours faire :



- Une demande d'accès machine.

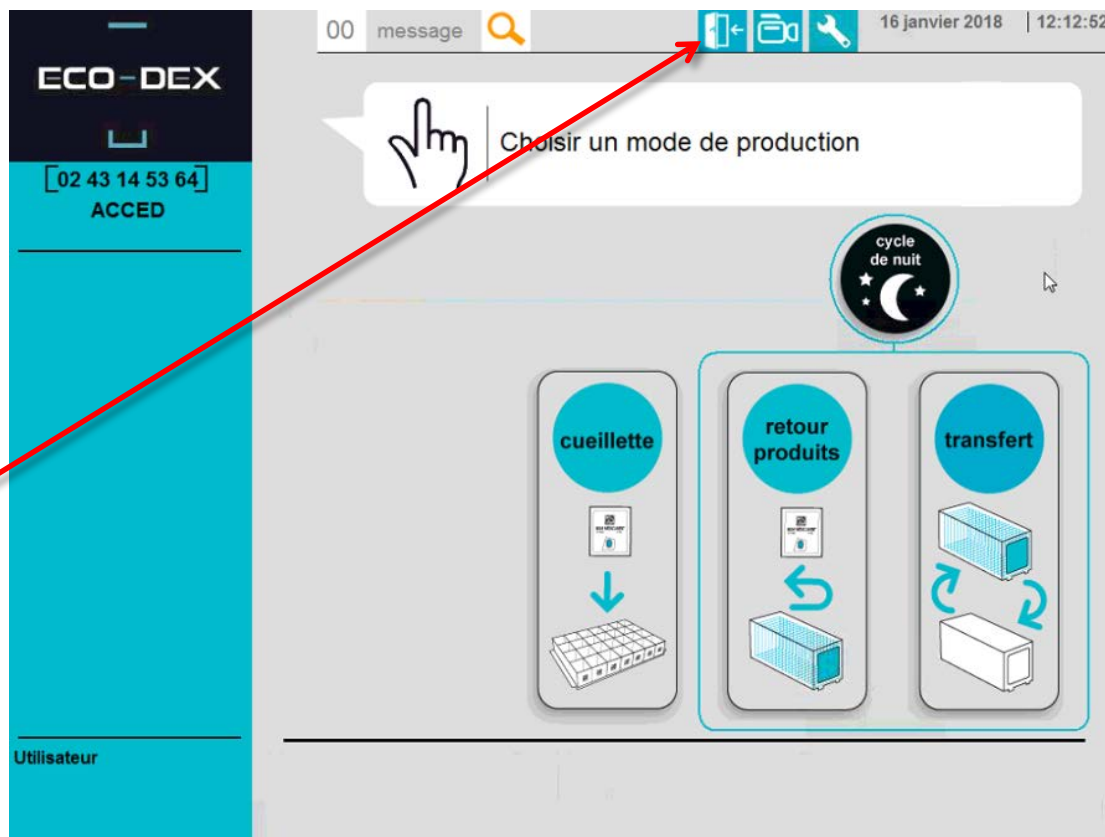

Entretien du module

Nettoyage quotidien (Voir [03.D - Préparation du module de cueillette à la prise de poste](#))

- Vider les boites poubelle.

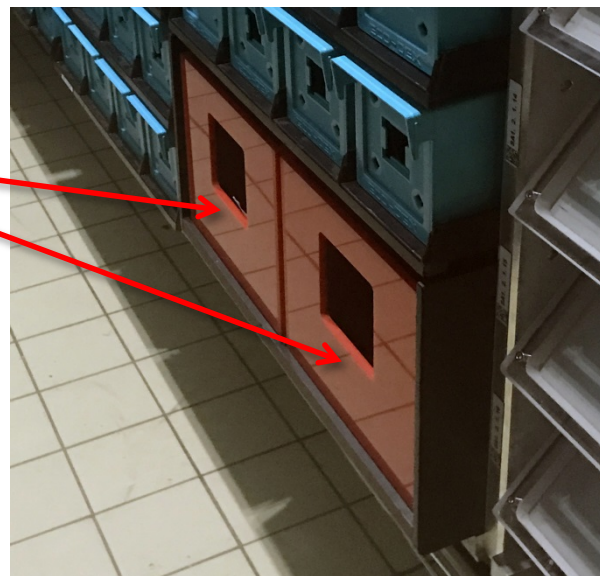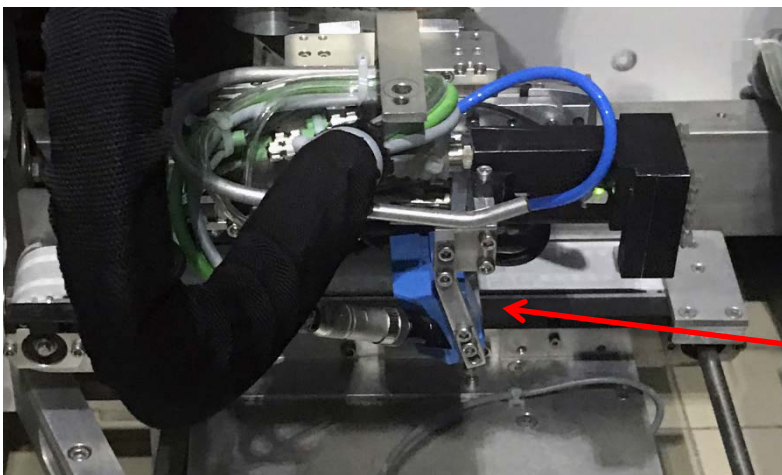

Nettoyer la vitre du lecteur optique.

Entretien du module

Nettoyage hebdomadaire

- Aspirer ou balayer l'allée centrale. (Aspirateur à filtre à particule fine sinon balai statique)



Entretien du module


Nettoyage mensuel




Vérifier l'état du rail de l'axe X1 (axe linéaire qui déplace la navette de l'entrée vers le fond de la cueillette).

Retirer les sachets éventuels.


Nettoyer le rail avec un chiffon non pelucheux.

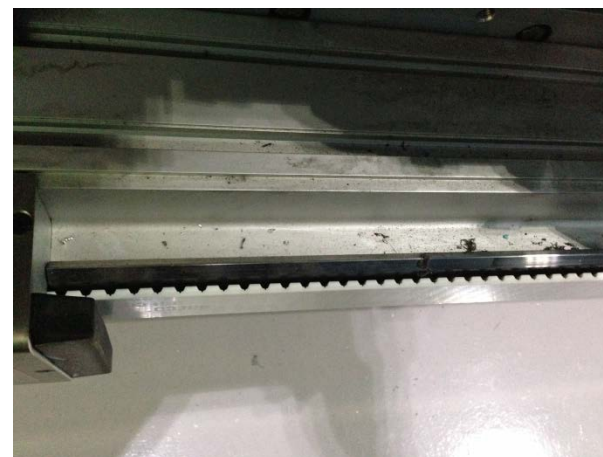


Initialisation module de cueillette

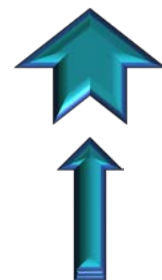

03.L – Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

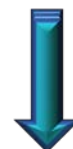


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

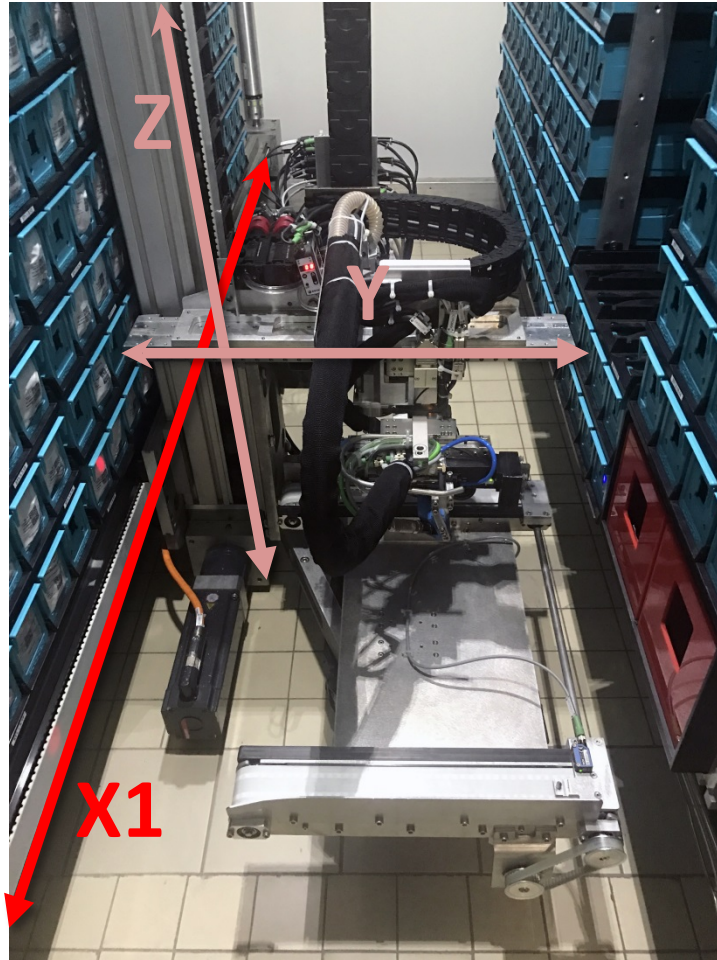


Les axes principaux :

- X1 = axe linéaire qui déplace la navette de l'entrée vers le fond de la cueillette.

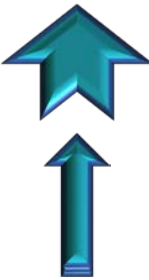


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

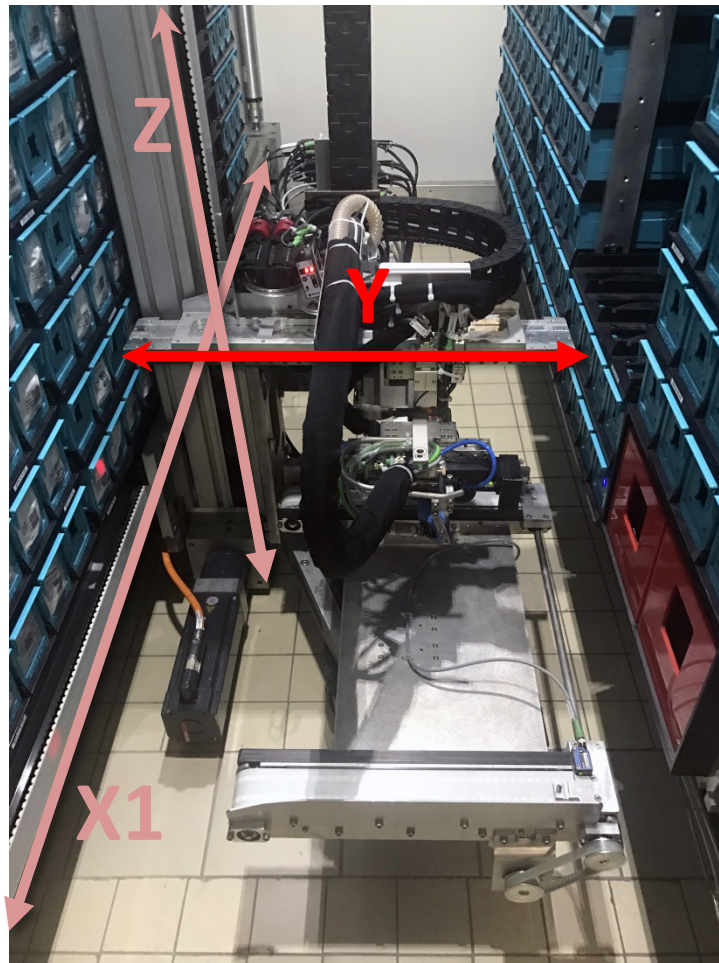

Les axes principaux :


- Y = axe linéaire déplace l'outil « prise boîte/prise sachet » (tête d'aspiration) de la gauche vers la droite.

Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

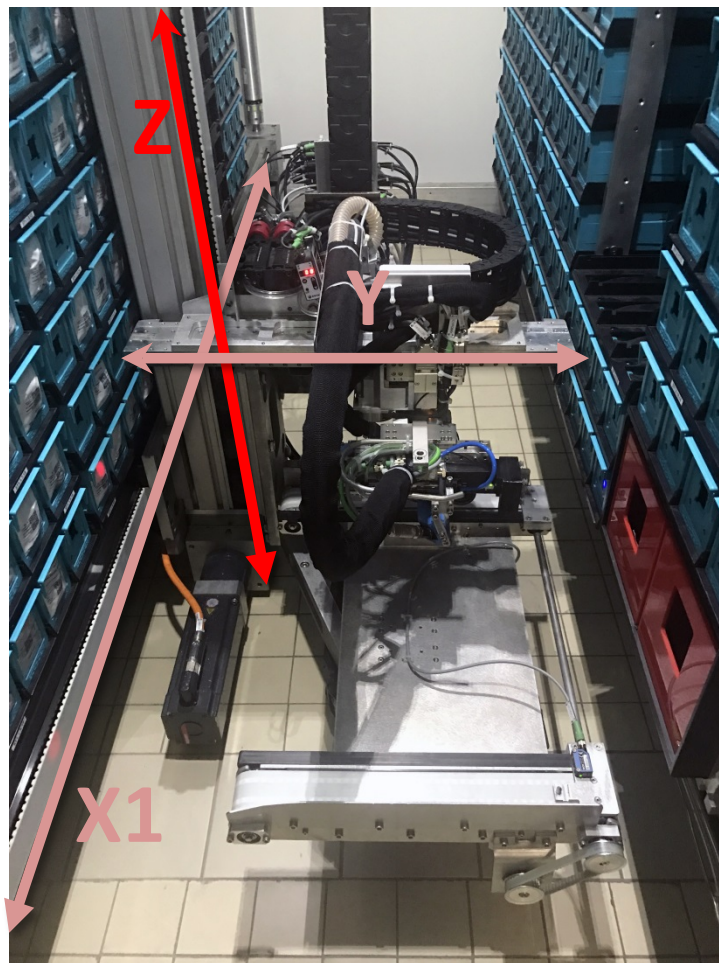

Les axes principaux :

- Z = axe linéaire qui déplace l'ensemble de la navette de bas en haut.

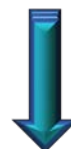


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation




Les axes secondaires :

- T = axe linéaire qui permet l'entrée et la sortie dans les boîtes de l'outil « prise boîte/prise sachet ».


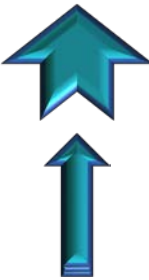


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

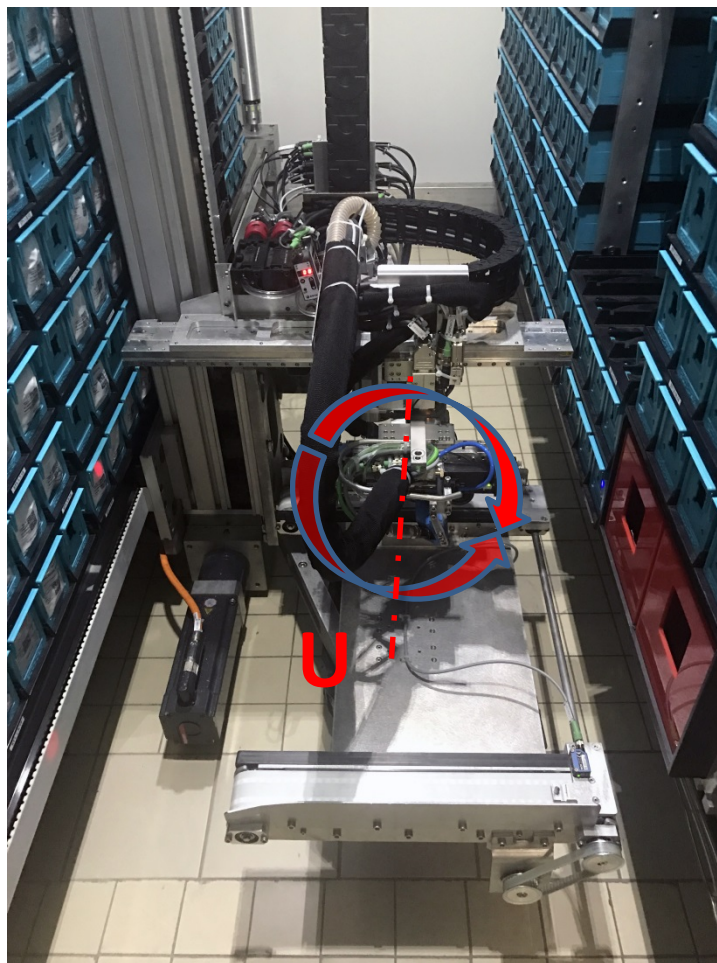


Les axes secondaires :

- U = axe rotatif qui positionne l'outil « prise boîte/prise sachet » sur les boîtes PASS côté droit, sur les boîtes PASS côté gauche et sur le pilulier.

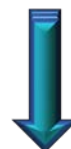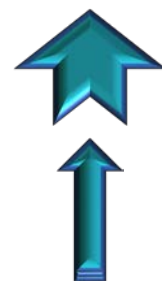


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

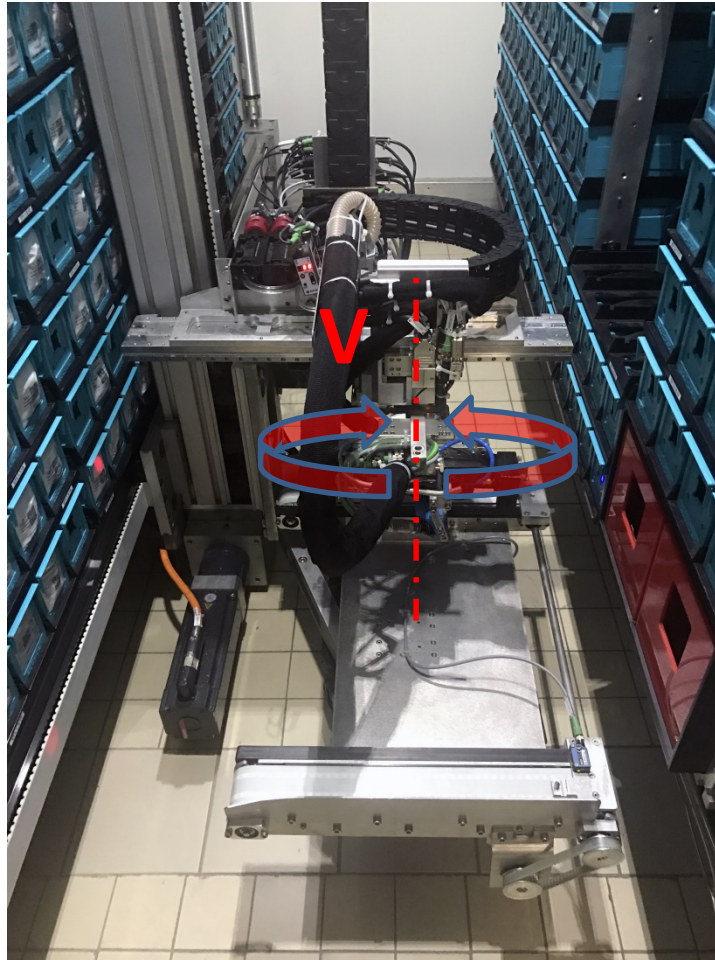


Les axes secondaires :

- V = axe rotatif qui permet un basculement horizontal de l'ensemble de l'outil « prise boîte/prise sachet ». Son rôle est de transférer des boîtes PASS du côté droit vers le côté gauche de la cueillette et inversement.

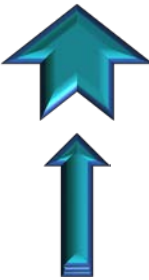


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

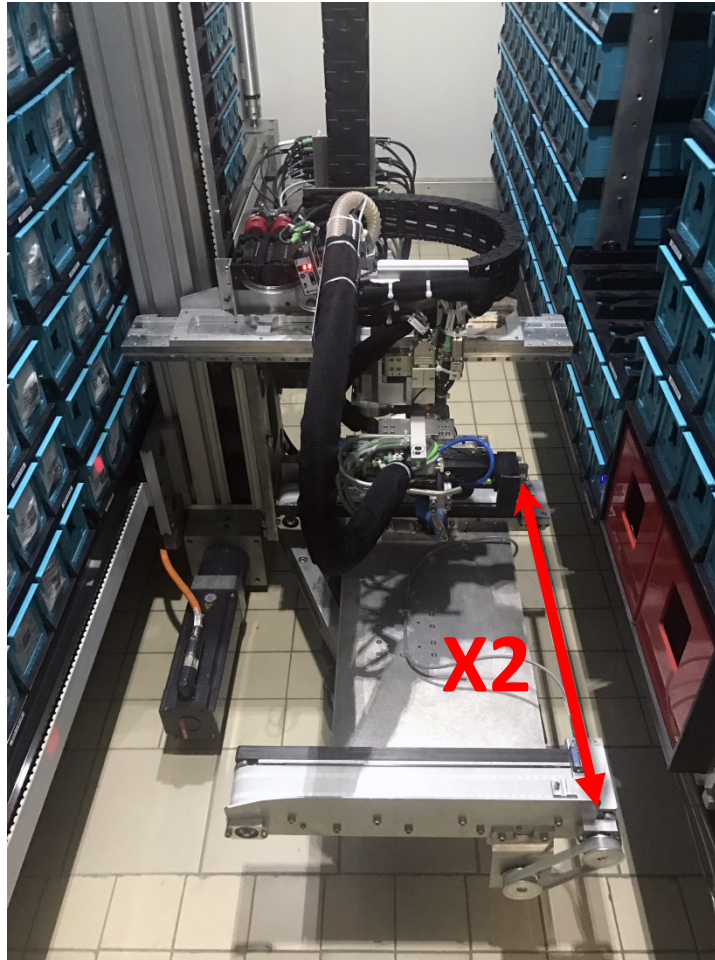

Les axes secondaires :

- X2 = axe linéaire qui déplace le peigne (plateau) en fonction du pilulier à servir.

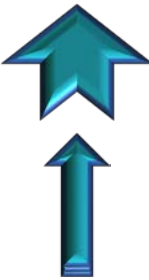


Comprendre et lancer le cycle d'initialisation



En position d'initialisation
ou d'attente mission, la
navette est au fond de la
cueillette.



Comprendre et lancer le cycle d'initialisation

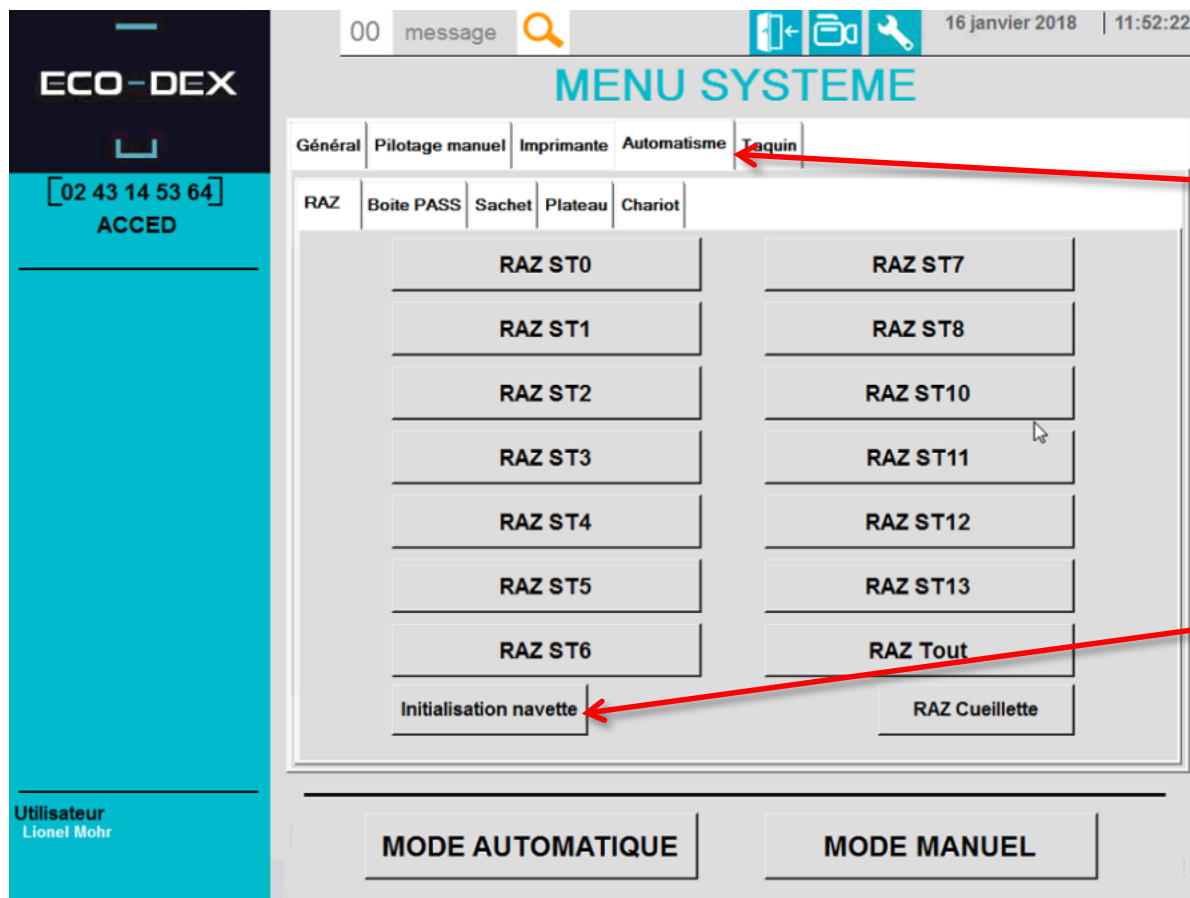

A partir de l'onglet Automatisme, il est possible de mettre la navette en position d'initialisation.


Il suffit d'appuyer sur

Initialisation navette

Fin sous-Module
Retour
sommaire



Gestion du module de cueillette

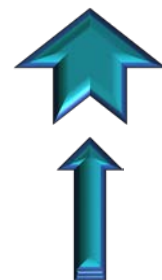


Comprendre et créer les taquins


Comprendre et débloquent les boites
bloquées

Gestion des boites de rejet


Gestion des périmés

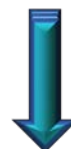


Gestion du module de cueillette

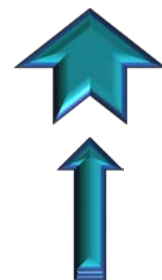

03.M – Comprendre et créer les taquins

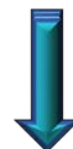


Comprendre et créer les taquins

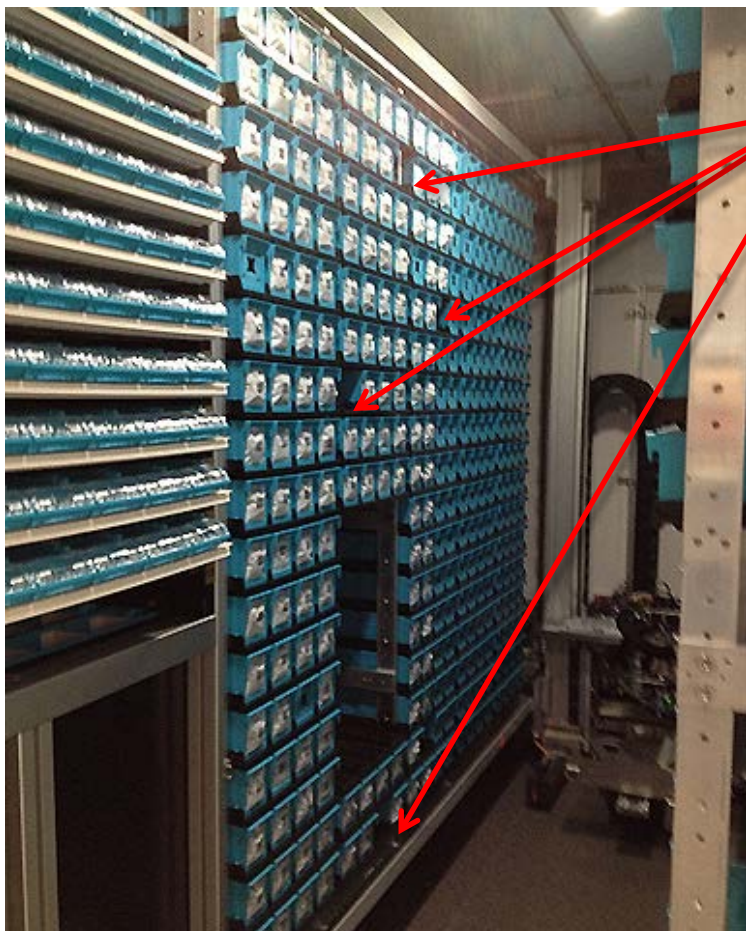

Les taquins (emplacements vides qui permettent les interversions de boites PASS), sont indispensables au bon fonctionnement de la cueillette.


Il en faut au minimum 4 par côté.

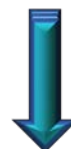

Comprendre et créer les taquins

Pour consulter les taquins :

- Vous pouvez imprimer un ticket avec la liste de ceux-ci.

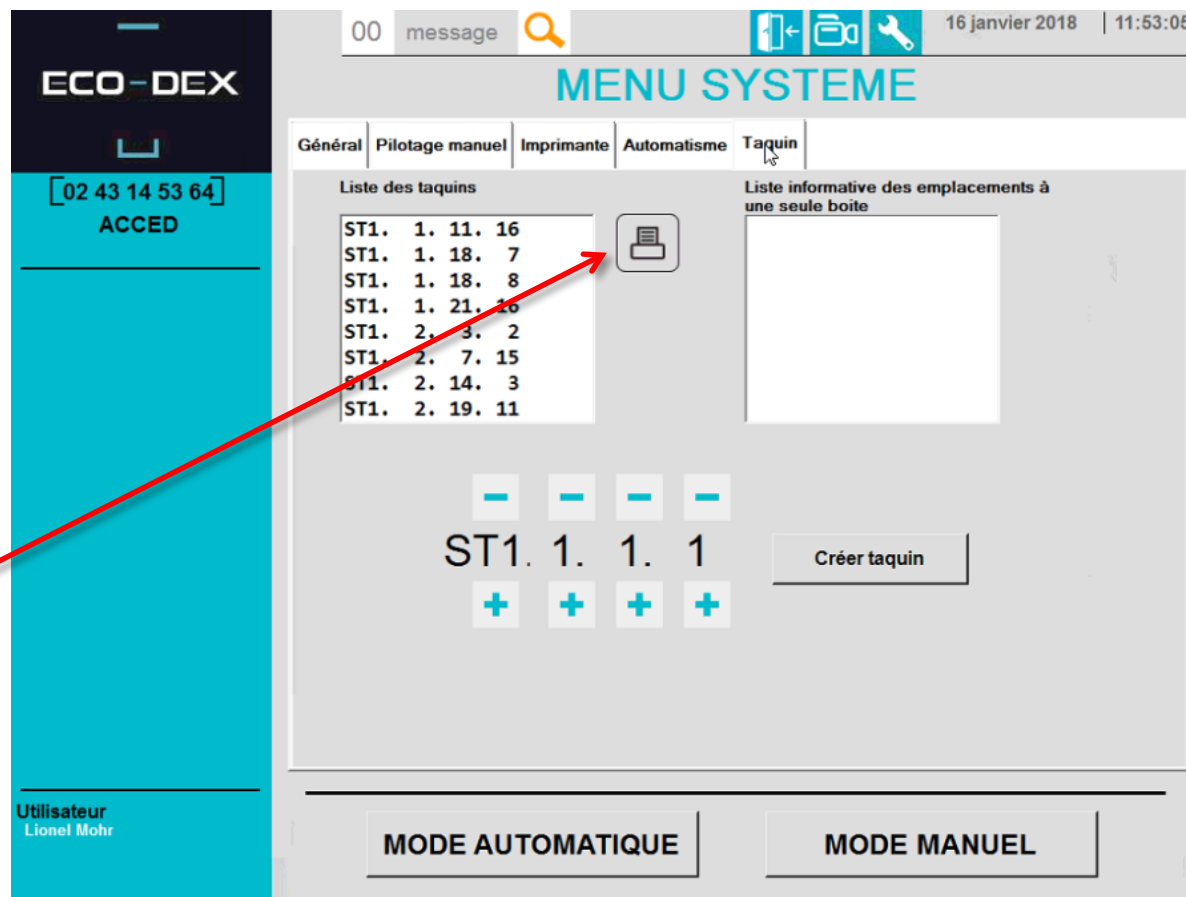

00 message

16 janvier 2018 | 11:53:05

MENU SYSTEME

Général Pilotage manuel Imprimante Automatisation **Taquin**

Liste des taquins

ST1.	1.	11.	16
ST1.	1.	18.	7
ST1.	1.	18.	8
ST1.	1.	21.	16
ST1.	2.	3.	2
ST1.	2.	7.	15
ST1.	2.	14.	3
ST1.	2.	19.	11

Liste informative des emplacements à une seule boîte



ST1. 1. 1. 1

Créer taquin

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Utilisateur Lionel Mohr

Comprendre et créer les taquins

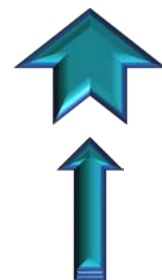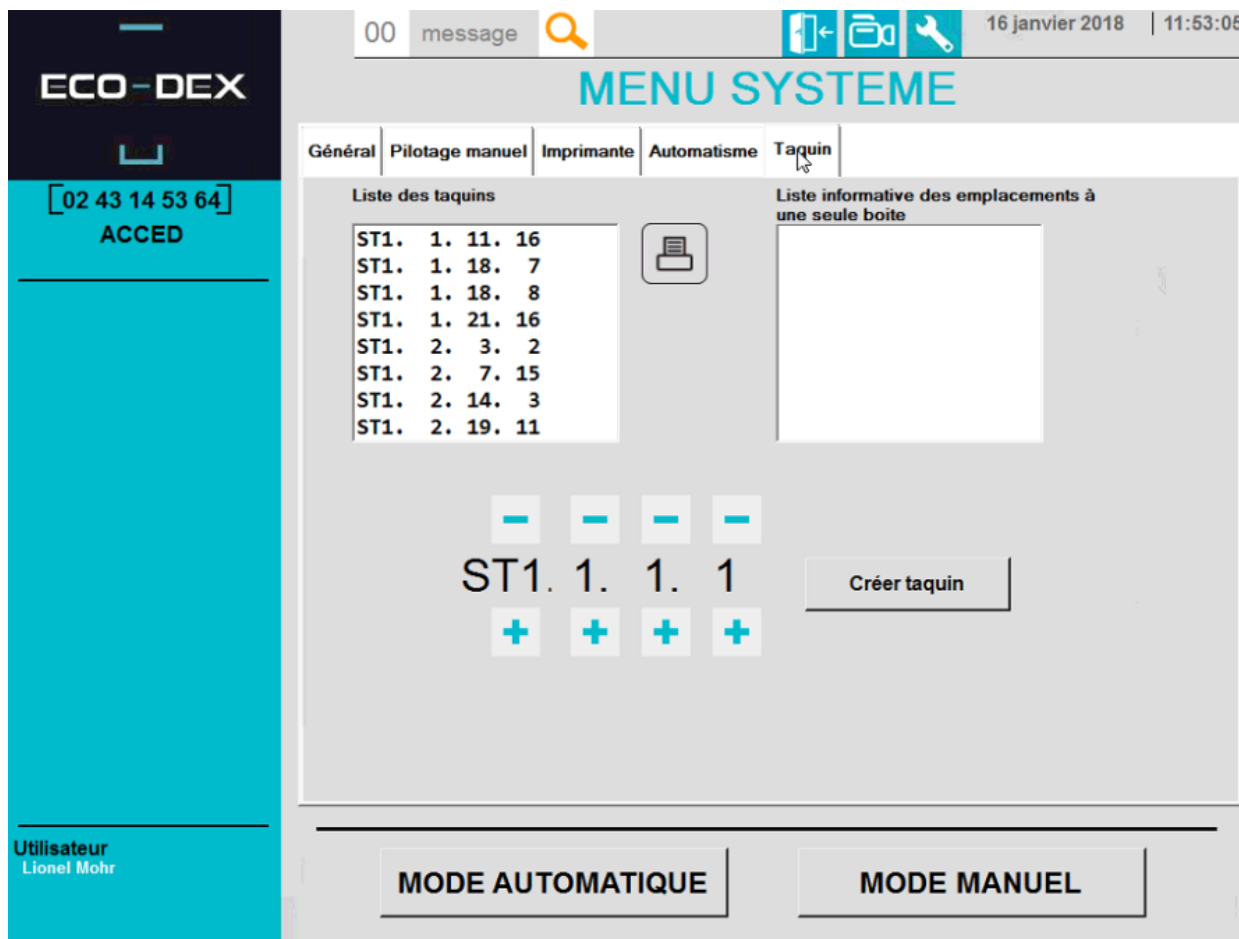ECO-DEX

00 message 16 janvier 2018 11:53:05

MENU SYSTEME

Général Pilotage manuel Imprimante Automatisation **Taquin**

Liste des taquins

ST1.	1.	11.	16
ST1.	1.	18.	7
ST1.	1.	18.	8
ST1.	1.	21.	16
ST1.	2.	3.	2
ST1.	2.	7.	15
ST1.	2.	14.	3
ST1.	2.	19.	11

Liste informative des emplacements à une seule boîte


ST1. 1. 1. 1

Créer taquin


MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Utilisateur Lionel Mohr

- S'il n'y a pas au moins quatre taquins de chaque côté il faudra alors en créer.

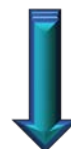

Comprendre et créer les taquins

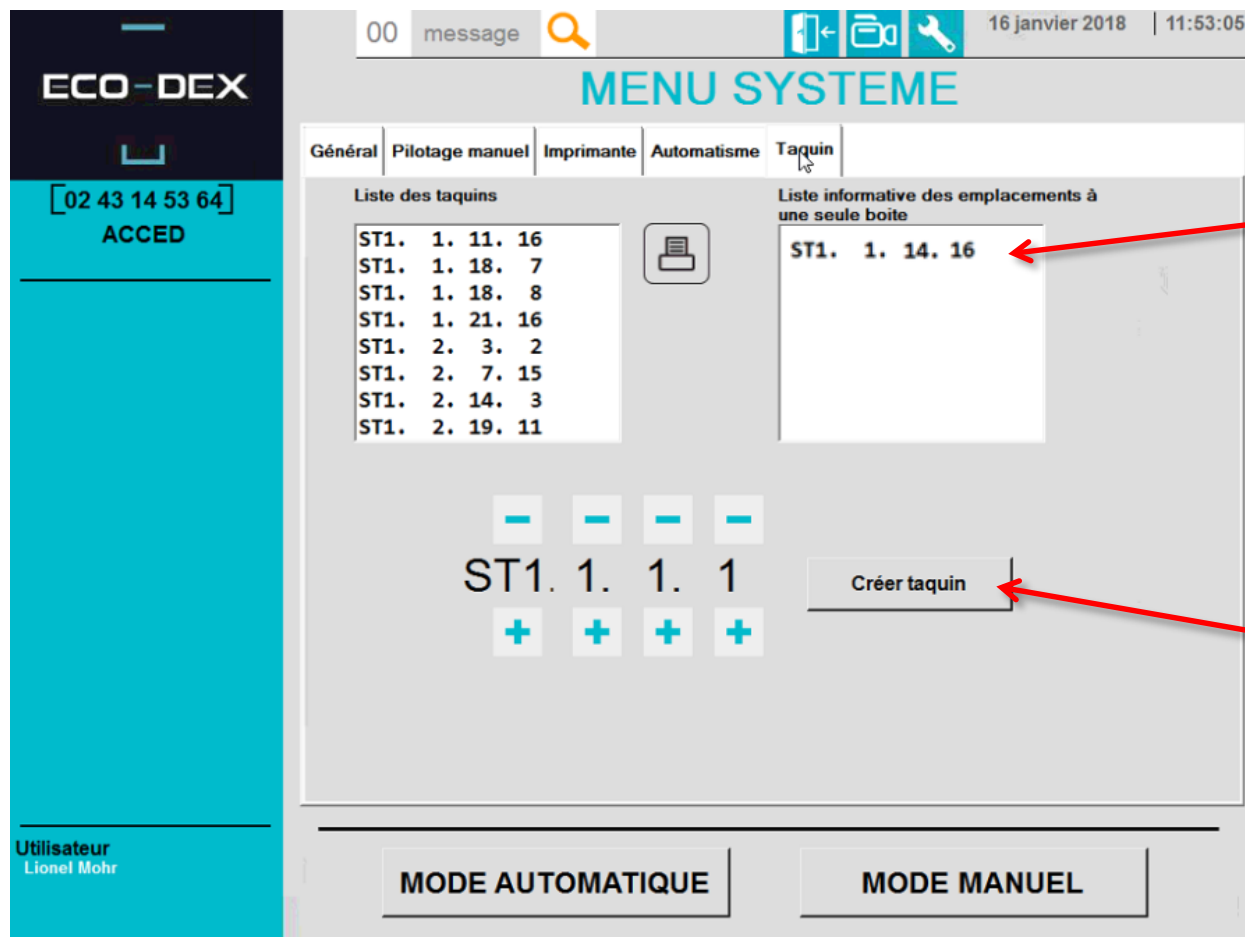

- Choisir un emplacement à une seule boîte en cliquant dessus.
- Vérifier physiquement l'emplacement. (retirer, les boîtes si nécessaire)
- Puis cliquer sur Créer taquin.

Comprendre et créer les taquins


The screenshot displays the 'Median v3.60.8 - Consultation - Emplacements' window. The interface includes a sidebar with various menu items, a top filter section, and a main display area. The main display area features a grid of storage locations and a table of their details. The grid shows a large area of 'Occupé' (Occupied) status. The table on the right lists columns: Emplacement, Etat, Contenant, Format, and N° d. A red arrow points to the table entry for 'ST1. 1. 17. 10. 1'.

- Sur la page de consultation des emplacements, la partie gauche permet la visualisation du positionnement des boîtes PASS dans la zone de stockage.
- Sur la partie droite, figurent tous les emplacements de la zone de stockage numériquement classés ainsi que leur état.

Important : deux emplacements vides se suivant créent, de facto, un « taquin ». Il est donc possible à partir de cette page, « consultation des emplacements », d'élaborer de nouveaux « taquins »

Comprendre et créer les taquins

La page « consultation des taquins » donne un aperçu instantané des positions ou emplacements réservés. Une ligne de positionnement se décompose comme suit :

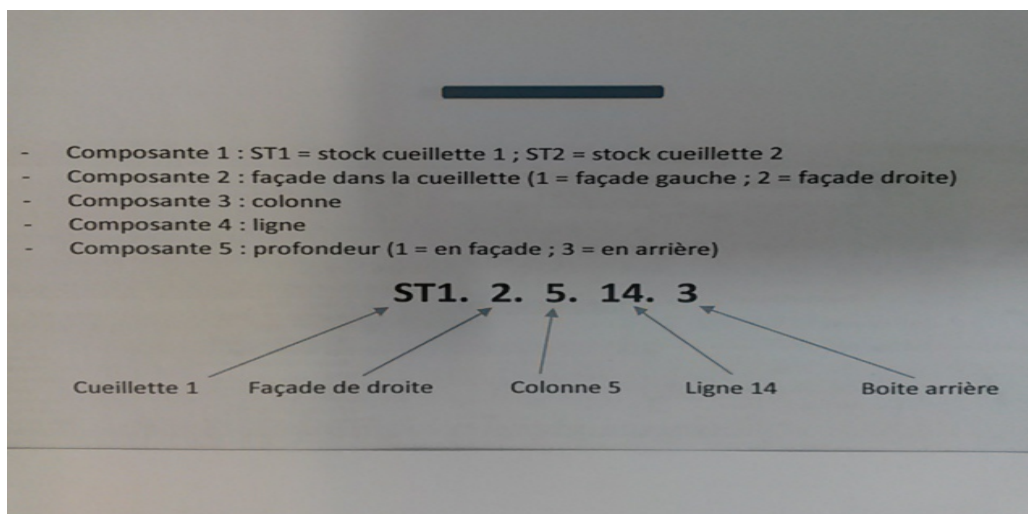

Important : s'il n'y a pas 4 taquins de chaque côté de la cueillette, la création du ou des emplacements manquants s'impose.




Gestion du module de cueillette



03.N – Comprendre et débloquer les boites bloquées




Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

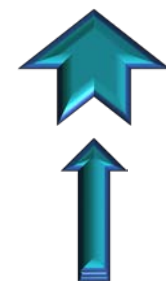

Blo	Emplacement	Etat	Contenant	Commentaire
	ST1. 1. 6. 1. 1	Occupé	000005450	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 1	Occupé	000004855	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 3	Occupé	000004854	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 7. 1	Occupé	000006459	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 13. 1	Occupé	000001348	Sachet non lu
	ST1. 2. 1. 11. 1	Occupé	000001845	Sachet non lu
	ST1. 2. 2. 3. 1	Occupé	000002067	Sachet non lu
	ST1. 2. 20. 8. 1	Occupé	000001941	Sachet non lu


Vérifier les emplacements bloqués en cueillette.

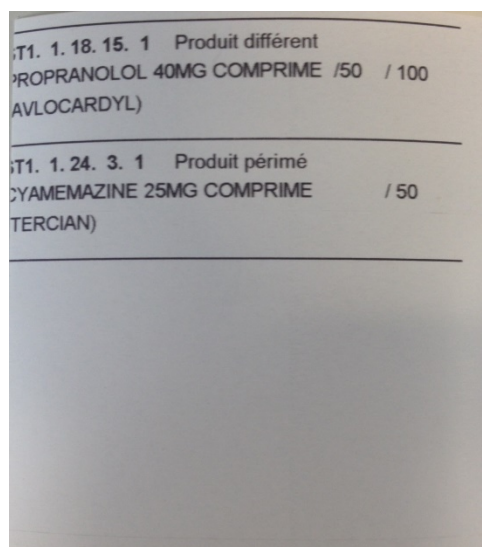

Lors de la cueillette certaines boîtes sont bloquées par l'automate.



Ticket disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

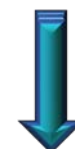


Comprendre et débloquer les boîtes bloquées



Quelles sont les raisons qui bloquent un emplacement ?

- La mauvaise lecture du « Datamatrix » 3 fois consécutivement.
- Un défaut de prise sachet 3 fois consécutivement.
- La présence d'un produit différent que celui attendu.
- La date de péremption du médicament dépassée.

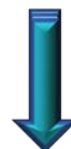


Comprendre et débloquent les boîtes bloquées




Un emplacement « bloqué » entraîne automatiquement, l'impossibilité de son utilisation et par conséquent :

- Les doses unitaires contenues dans les boîtes PASS de cette emplacement ne seront pas prélevées.
- Les boîtes PASS de cette emplacement, lors de la « sortie globale », ne seront pas extraites.

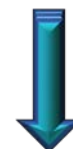

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

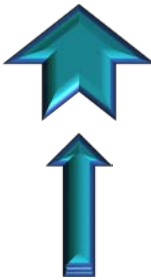

Pour consulter les emplacements bloqués

Dans Médian, il faut :




- Allez dans « Consultation », sélectionner “Emplacements”

Dans la nouvelle page obtenue :


- Sélectionner le module concernée.

- Cocher « Bloquée ».

- Cliquer sur « Visualiser ».

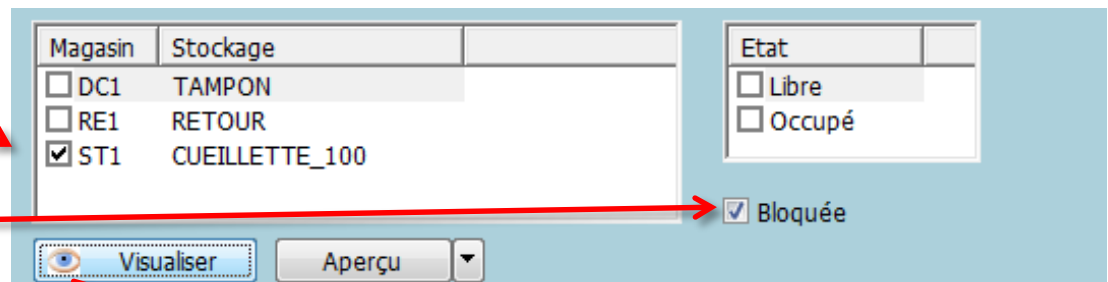

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

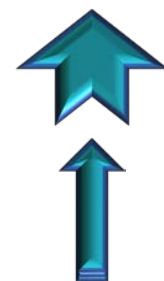


Analyse du blocage :


Blo	Emplacement	Etat	Contenant	Commentaire
	ST1. 1. 6. 1. 1	Occupé	000005450	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 1	Occupé	000004855	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 3	Occupé	000004854	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 7. 1	Occupé	000006459	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 13. 1	Occupé	000001348	Sachet non lu
	ST1. 2. 1. 11. 1	Occupé	000001845	Sachet non lu
	ST1. 2. 2. 3. 1	Occupé	000002067	Sachet non lu
	ST1. 2. 20. 8. 1	Occupé	000001941	Sachet non lu

- Cliquer sur l'emplacement que vous voulez débloquent.
- Lire le commentaire (raison du blocage de l'emplacement, ici « sachet non lu »).
- Remédier physiquement au problème à l'emplacement concerné.
- Cliquer sur :

Bloquage / Débloquage

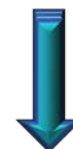

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

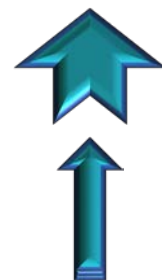

Analyse du blocage :



Il existe différentes raisons de blocage. Afin de pouvoir débloquer un emplacement, il faut procéder de la manière suivante :

Pour **sachet non lu**, aller voir l'emplacement indiqué :


→ Il peut s'agir d'un sachet mal positionné dans la boîte (**repositionner le produit dans la boîte en vérifiant que les produits qui le suivent sont également bien positionnés**),

→ Il peut s'agir d'un défaut d'impression sur le sachet (**regarder si le sachet est lisible. Si oui le remettre. Si non retirer le ou les produits non lisibles de la boîte PASS**).

Une fois ces manœuvres faites, cliquer sur l'icône blocage/déblocage pour débloquer l'emplacement.

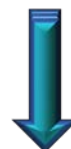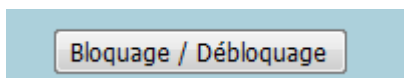

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

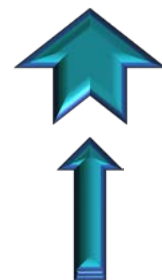

Analyse du blocage :

Pour **Produit différent** :


Noter l'emplacement bloqué.

Si **tous** les produit dans la boîte PASS sont différents (référence ou fraction) de ceux indiqués dans Médian alors **Retirer la boîte PASS pleine de produit différents et mettre une boîte PASS vide à la place.**


!!!! ne surtout pas supprimer dans Médian la quantité dans la boîte PASS pour éviter des erreurs de stock, y mettre simplement une boîte passe vide et lors de la prochaine cueillette les stocks Médian et pharmacie (logiciel GEF) se mettront à jour automatiquement quand une prise sachet sera demandée à cet emplacement.

S'il n'y a qu'un ou plusieurs produits différents de ceux indiqués dans Médian alors **Retirer ce ou ces produits de la boîte PASS.**

!!!! Ne pas modifier la quantité de produits dans Médian, celle-ci se fera toute seule lors des cueillettes.

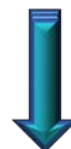

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

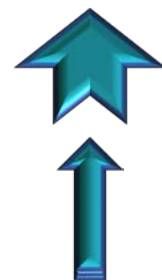

Analyse du blocage :


Pour **Erreur prise sachet** :

Il peut s'agir d'un sachet mal positionné dans la boîte, dans ce cas : **aller voir l'emplacement indiqué** → (**repositionner le produit dans la boîte en vérifiant que les produits qui le suivent sont également bien positionnés**).

Si le sachet est bien positionné lors de la vérification alors noter le ou les emplacements bloqués suite à cette erreur. Les signaler à notre **technicien ECODEX** qui procédera à des tests sur ces emplacements pour voir s'ils nécessitent de nouveaux réglages ou non.

Procéder à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

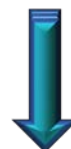

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées



Analyse du blocage :

Pour **Boîte absente** :

Aller dans Médian → Consultation → Emplacement → Sélectionner la cueillette (ST1) puis cliquer sur **Visualiser**. Regarder dans Médian ce qui est indiqué pour cet emplacement (0,1 ou 2 boîtes PASS ???)


Aller voir l'emplacement indiqué : Vérifier physiquement à l'emplacement dans la cueillette si entre ce qu'il doit y avoir dans Médian et ce qu'il y a vraiment est correcte.

S'il y a une différence entre les deux alors mettre l'emplacement au même état indiqué que dans Médian.


Exemple : dans Médian il y a une boîte à l'emplacement st1.1.7.12.1 et à l'emplacement st1.1.7.12.3 (soit un double emplacement) **MAIS** que physiquement il n'y a aucune boîte. **ALORS** mettre 2 boîtes à cet emplacement.

Procéder à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

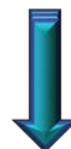

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

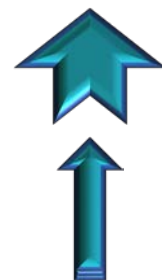

Analyse du blocage :

Pour **Produit périmé** :

Aller dans la cueillette et **prendre** la boîte PASS située à l'emplacement bloqué. La **remplacer** par une boîte passe vide.

!!!! Ne pas modifier la quantité de produits dans Médian, celle-ci se fera toute seule lors des cueillettes.


Retirer les sachets de la boîte PASS et vérifier les dates de péremption de ceux-ci.

Vous pourrez remettre les produits conformes en retours.


Jeter ou retirer du circuit les sachets **non conforme** (date de péremption passée).

Finir par à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

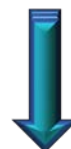

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

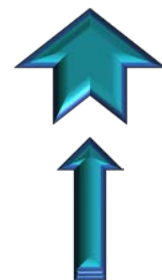

Analyse du blocage :


Pour **Erreur prise boîte**, (erreur pouvant arrivé que lors du transfert ou cycle de nuit)

Noter le ou les emplacements bloqués suite à cette erreur. Les signaler à notre **technicien ECODEX** qui procédera à des tests sur ces emplacements pour voir s'ils nécessitent de nouveaux réglages ou non.

Vérifier si le ou les boîtes ne dépassent pas de leurs emplacements ou si elles ne sont pas abimées (dans ce cas, changé la boîte en remettant les sachets dans la nouvelle boîte PASS).

Finir par à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

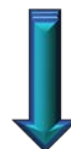

Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

Analyse du blocage :

Pour **Erreur pose boîte**, (erreur pouvant arrivé que lors du transfert ou cycle de nuit)

Regarder si à l'emplacement bloqué il n'y a pas une erreur de stock, pour cela :
 Aller dans Médian → Consultation → Emplacement → Sélectionner la cueillette (ST1)
 puis cliquer sur **Visualiser**. Regarder dans Médian ce qui est indiqué pour cet emplacement (0,1 ou 2 boîtes PASS ???)
 S'il y a une différence entre les deux alors mettre l'emplacement au même état indiqué que dans Médian.
 (Suivre exemple du « d. »)

Si le stock est correct alors c'est la pose de la boîte qui est mauvaise et dans ce cas :

Noter le ou les emplacements bloqués suite à cette erreur. Les signaler à notre **technicien ECODEX** qui procédera à des tests sur ces emplacements pour voir s'ils nécessitent de nouveaux réglages ou non.

Finir par à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage





Comprendre et débloquer les boîtes bloquées

00 message 16 janvier 2018 11:51:39

MENU SYSTEME

Général | Pilotage manuel | Imprimante | Automatisme | Taquin

Sélection manuelle

Porte	OUVERTE	DEVERROUILLAGE	VERROUILLAGE	FERMEE
Cueillette	DEVERROUILLÉE			VERROUILLÉE
Porte CPU	OUVERTE	DEVERROUILLAGE	VERROUILLAGE	FERMEE
	DEVERROUILLÉE			VERROUILLÉE
Porte CPU Face 1		POSITIONNEMENT ET DEVERROUILLAGE		
Porte CPU Face 2		POSITIONNEMENT ET DEVERROUILLAGE		
Porte CPU Face 3		POSITIONNEMENT ET DEVERROUILLAGE		
Porte CPU Face 4		POSITIONNEMENT ET DEVERROUILLAGE		
Indexeur	Info Recul Ev Recul	RECUL	AVANCE	Info Avance Ev Avance

Imprimer les boîtes PASS bloquées Débloquer les boîtes PASS Réimprimer pilulier

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Il est également possible de consulter la liste des emplacements bloqués en cliquant sur :

Imprimer les boîtes PASS bloquées



Disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.


Et de les débloquent en cliquant sur :

Débloquent les boîtes PASS


Comprendre et débloquer les boîtes bloquées



Ticket imprimé avec exemple de blocage :

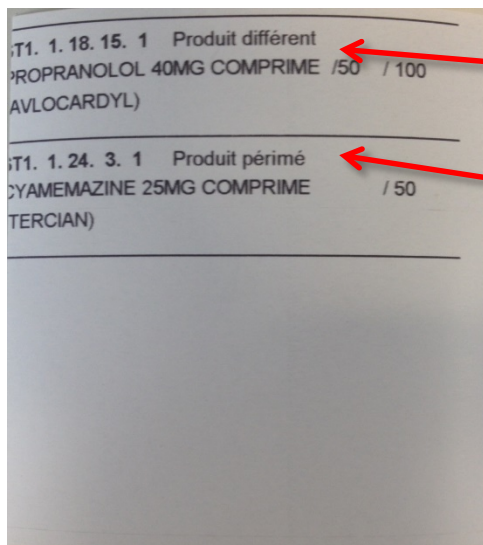

- Sachet non lu.
- Erreur de prise sachet.
- Produit différent.
- Produit périmé

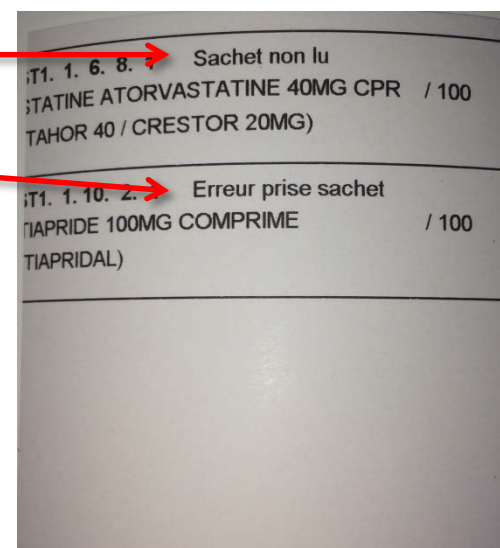

Fin sous-Module
Retour
sommaire




Ticket disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.



Gestion du module de cueillette



03.0 – Gestion des boites de rejet

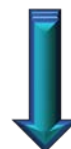


Gestion des boites de rejet

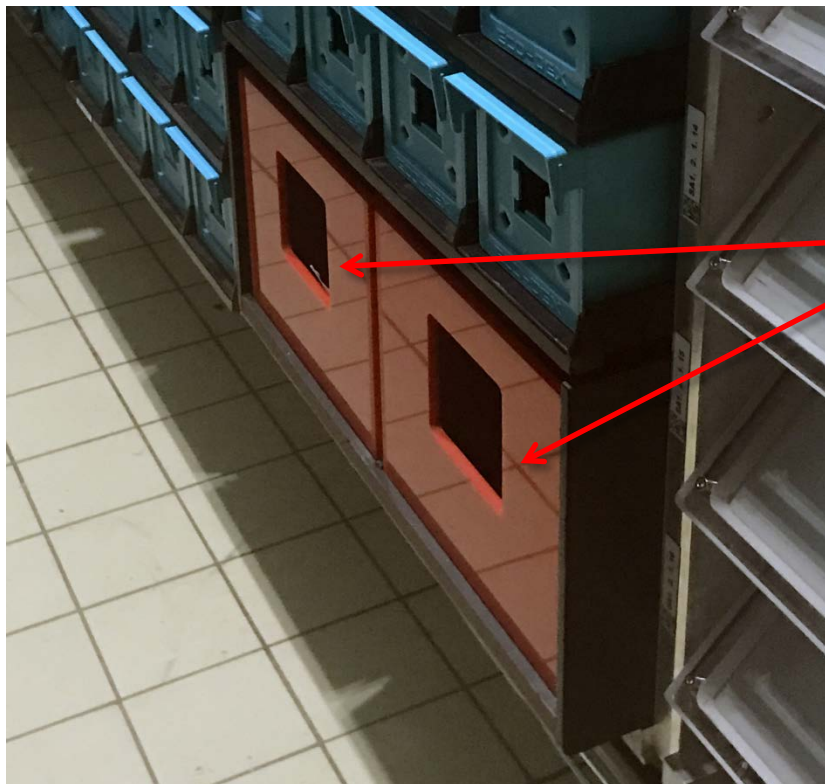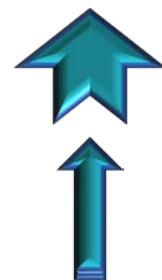


Les boites de rejet sont en gestion manuelle.

Elles ont une grande capacité, mais il faut les vider au moins quotidiennement.


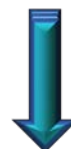


Gestion des boites de rejet

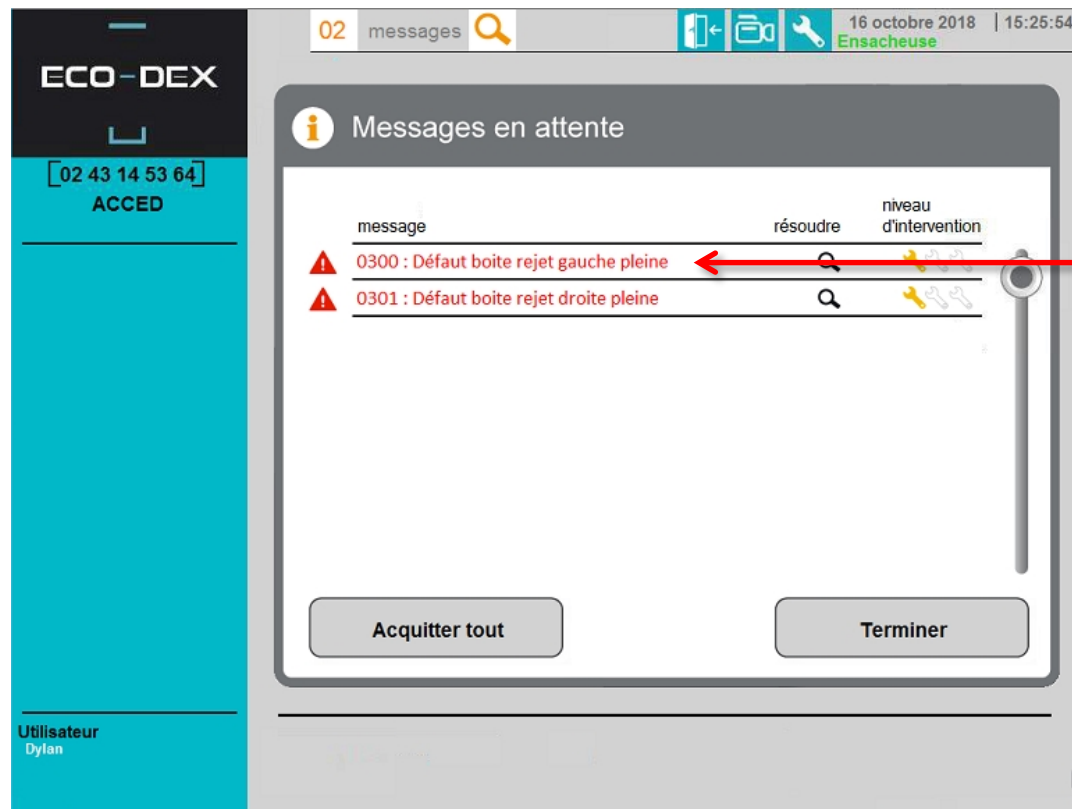


Lors de l'utilisation, si les boites de rejet ne sont pas vidées, les messages suivant peuvent apparaitre.

Gestion des boites de rejet

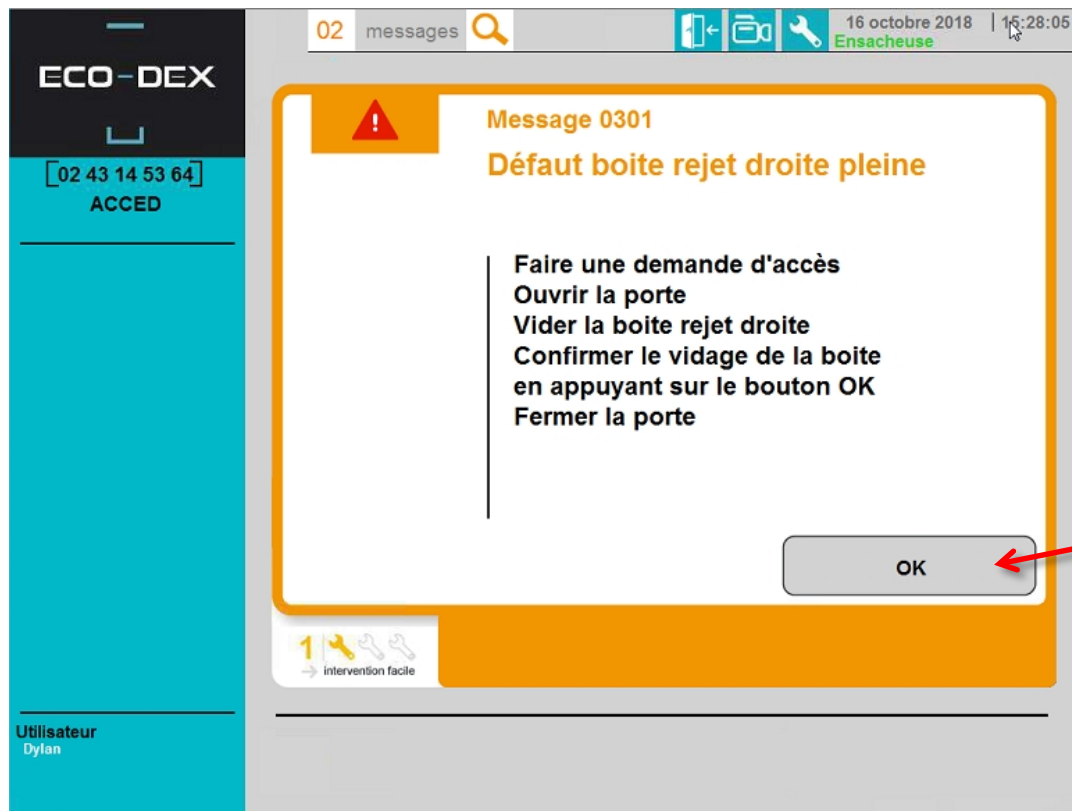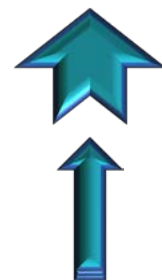

Il suffit alors de vider les boites de rejet manuellement et de confirmer en appuyant sur OK.

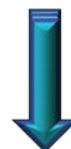

Gestion des boites de rejet



Vider manuellement les deux boites afin de trier les sachets.

Les sachets lisibles peuvent être réintroduit en retour produit.


Voir la documentation ([03.G - Cycle de retour produit](#))




Gestion du module de cueillette




03.P – Gestion des périmés

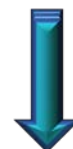

Gestion des périmés

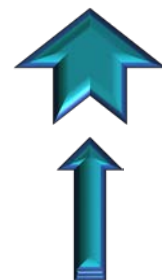

Les produits périmés sont à sortir régulièrement.

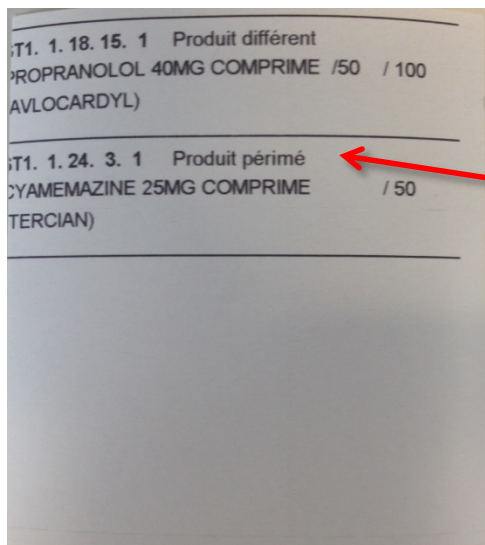


Les boites contenant des produit périmés sont automatiquement bloquées

- Produit périmé




Ticket disponible uniquement dans les modules disposant d'imprimantes.

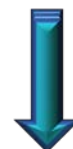


Gestion des périmés

Pour sortir les produits périmés :

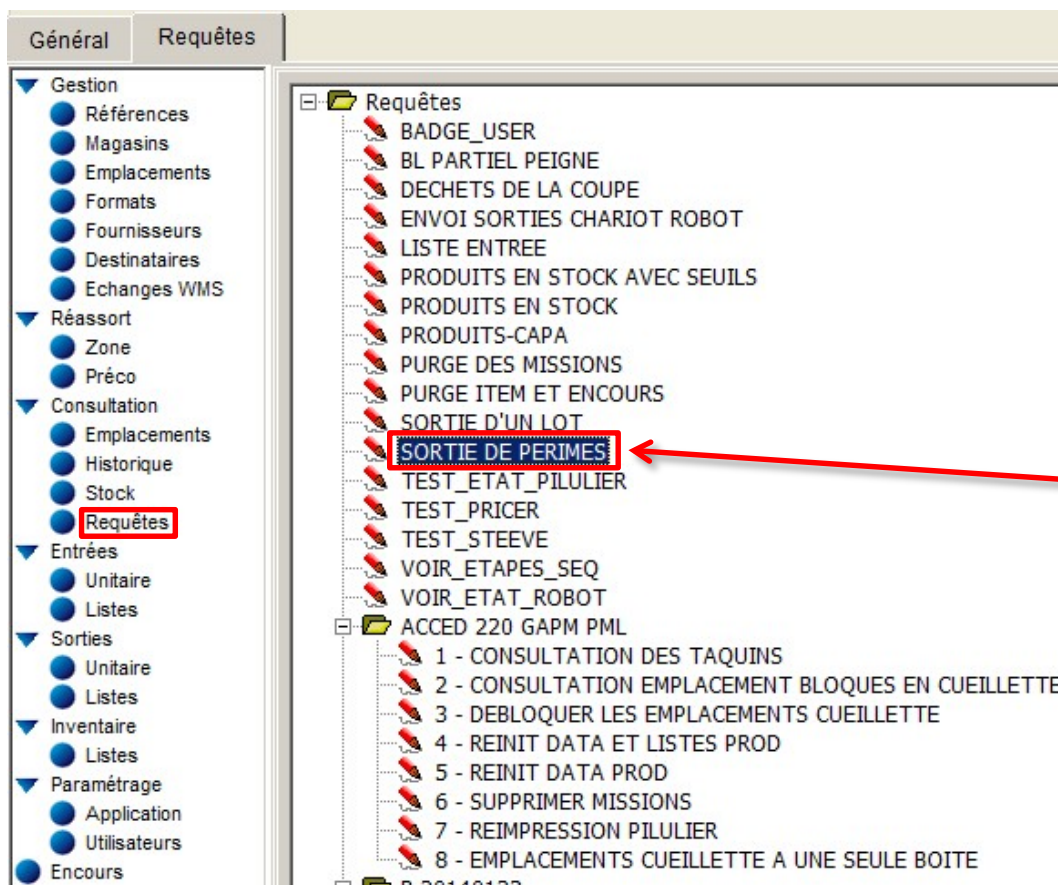


Aller dans médian et cliquer :

- Requêtes
- Sortie de périmés

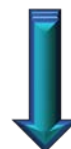


Gestion des périmés

Saisissez une date pivot de péremption (M+2)

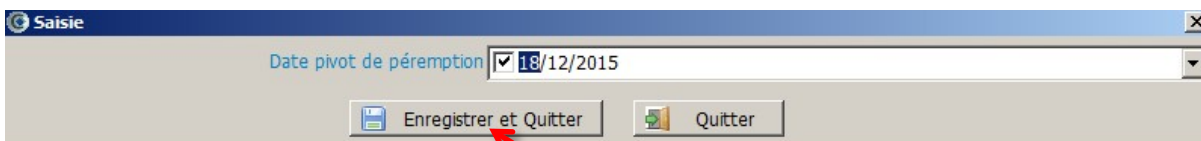

The screenshot shows a window titled 'Saisie'. It contains a label 'Date pivot de péremption' followed by a date field containing '18/12/2015'. Below the date field are two buttons: 'Enregistrer et Quitter' and 'Quitter'. A red arrow points to the 'Enregistrer et Quitter' button.


Cliquer sur Enregistrer et Quitter.

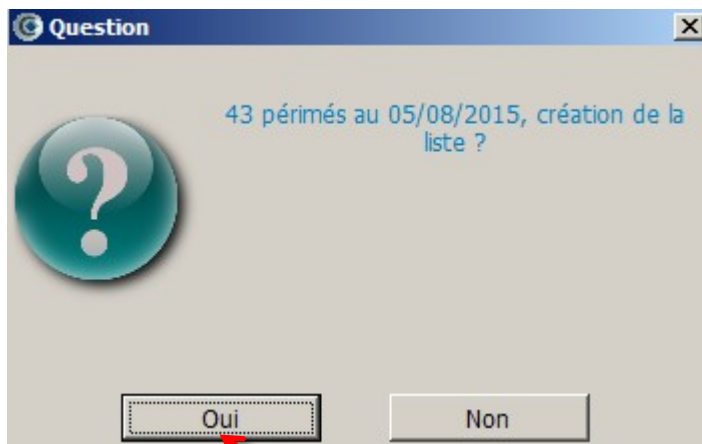

The screenshot shows a dialog box titled 'Question'. It contains a large question mark icon and the text '43 périmés au 05/08/2015, création de la liste ?'. At the bottom are two buttons: 'Oui' and 'Non'. A red arrow points to the 'Oui' button.

Cliquer sur Oui.

Gestion des périmés

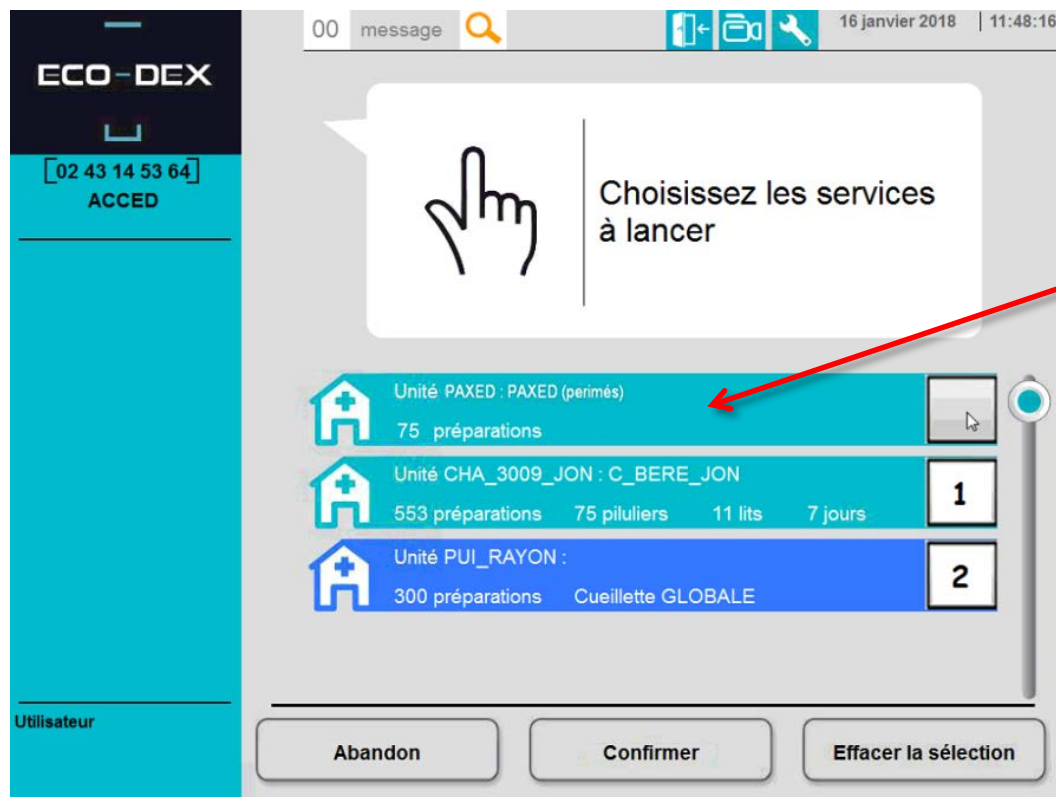00 message

16 janvier 2018 | 11:48:16

ECO-DEX

[02 43 14 53 64]
ACCED

Choisissez les services à lancer

Unité PAXED : PAXED (perimés)	75 préparations	
Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	553 préparations 75 piluliers 11 lits 7 jours	1
Unité PUI_RAYON :	300 préparations Cueillette GLOBALE	2

Utilisateur

Abandon Confirmer Effacer la sélection

Un service est alors créé, il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner et de confirmer pour le lancer.

